


Auswahl eines selbstklebenden Urinal-Kondoms zur Versorgung einer mittleren oder schweren Harninkontinenz

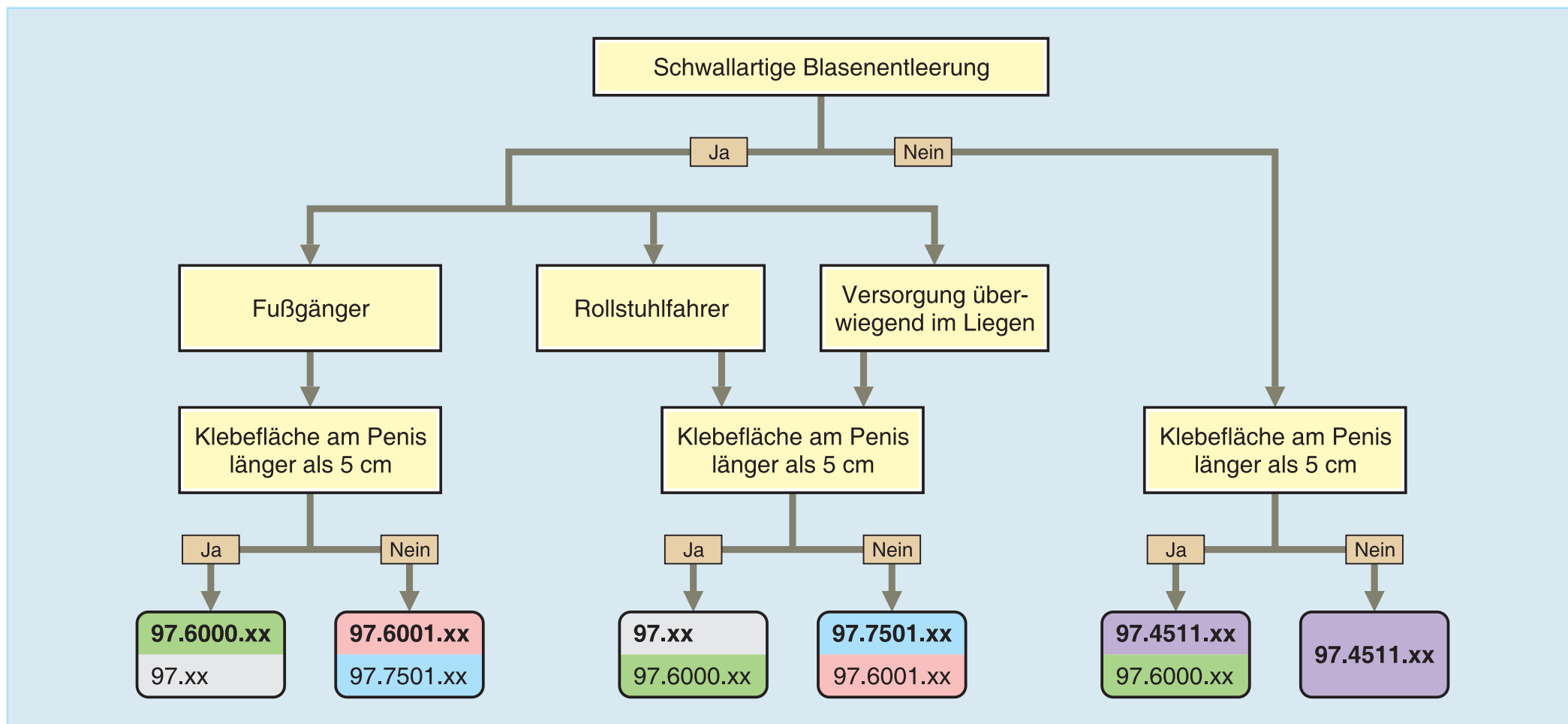

Wichtig!

- Kondom in passender Größe verwenden (Größe mit dem Maßband ermitteln)
- die Haut sollte im Kleberegion möglichst trocken und fettfrei sein
- Position des Kondoms so wählen, dass die Pufferzone die gewünschte Länge hat
- Kondom mit dem Urin-Auffangbeutel verbinden und darauf achten, dass der Urin ungehindert ablaufen kann

Beratungstelefon: +49 6226 960 069

Wenn mit den getesteten Kondomen kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden konnte, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenberatung oder informieren sich in unserer „Schulungsmappe – Kondom-Urinal“, die wir Ihnen kostenlos zusenden oder die Sie sich von unserer Homepage herunterladen können.

SAUER-Comfort – Selbstklebendes Urinal-Kondom

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pufferzone	Klebezone	Kleber	Größe
97.xx	Standard	75 mm	50 mm	normal	11 (18–40 mm)
97.7501.xx	Blau	75 mm	50 mm	stark	11 (18–40 mm)
97.6000.xx	Grün	60 mm	50 mm	normal	11 (18–40 mm)
97.6001.xx	Rot	60 mm	50 mm	stark	11 (18–40 mm)
97.4511.xx	Violett	45 mm	25 mm	stark	9 (18–35 mm)

Bei der Best.-Nr. wird „xx“ durch die gewünschte Größe ersetzt (z. B. 97.7501.26)