

SAUER-Comfort

Etui pénien urinaire autocollant

L'étui pénien et la colle sont en matériau synthétique, avec le raccord de tubulure intégré, pour le raccordement à toutes les poches urinaires avec et sans adaptateur.

11 tailles.

Conditionnement par boîtes de 30 pièces, 1 tissu de protection (adapté à la taille de l'étui pénien) compris.

Etui pénien autocollant – SAUER-Comfort – Standard

Longueur 130 mm, zone tampon 75 mm, colle normale

Ø mm	Réf.
18	97.18
20	97.20
22	97.22
24	97.24
26	97.26
28	97.28
30	97.30
32	97.32
35	97.35
37	97.37
40	97.40

Etui pénien autocollant – SAUER-Comfort – Bleu

Longueur 130 mm, zone tampon 75 mm, colle plus forte

Ø mm	Réf.
18	97.7501.18
20	97.7501.20
22	97.7501.22
24	97.7501.24
26	97.7501.26
28	97.7501.28
30	97.7501.30
32	97.7501.32
35	97.7501.35
37	97.7501.37
40	97.7501.40

Etui pénien autocollant – SAUER-Comfort – Vert

Longueur 115 mm, zone tampon 60 mm, colle normale

Ø mm	Réf.
18	97.6000.18
20	97.6000.20
22	97.6000.22
24	97.6000.24
26	97.6000.26
28	97.6000.28
30	97.6000.30
32	97.6000.32
35	97.6000.35
37	97.6000.37
40	97.6000.40

Etui pénien autocollant – SAUER-Comfort – Rouge

Longueur 115 mm, zone tampon 60 mm, colle plus forte

Ø mm	Réf.
18	97.6001.18
20	97.6001.20
22	97.6001.22
24	97.6001.24
26	97.6001.26
28	97.6001.28
30	97.6001.30
32	97.6001.32
35	97.6001.35
37	97.6001.37
40	97.6001.40

Vous avez des questions en matière des étuis péniers ? Vous aimeriez recevoir des échantillons gratuits ?

Veillez vous adresser à notre assistance conseil :

Tel. +49 6226 960 104
export@manfred-sauer.de



MADE IN GERMANY Nos produits sont développés et produits à Lobbach, Allemagne.

MANFRED SAUER GMBH Hersteller von Medizinprodukten
Neurott 7 – 15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com



MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten

SAUER-Comfort

... sécurité et simplicité d'utilisation

Sauer
Comfort




L'étui pénien urinaire autocollant avec la zone tampon unique

Problèmes


L'emploi d'un étui pénien urinaire peut causer des problèmes divers qui résultent souvent des propriétés mêmes de l'étui choisi.

Pour éviter ces problèmes, un étui pénien doit répondre aux exigences particulières.

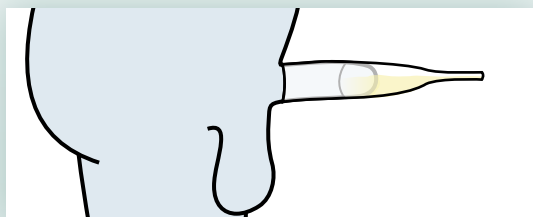


Formation de «flaques»

Avec les étuis fabriqués d'un matériau plus solide, souvent un petit résidu de l'urine reste dans l'étui.

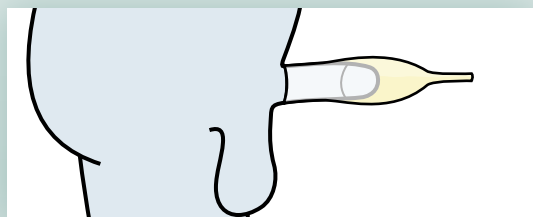

Evacuation insuffisante

En cas d'émission spontanée d'urines il est impossible d'évacuer toute de suite l'urine dans la poche.

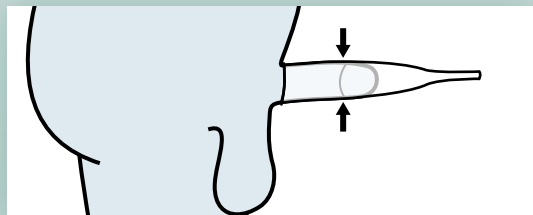

L'étui n'a pas la bonne taille

Les étuis mal adaptés ne permettent souvent pas un collage fiable.

SAUER-Comfort – étui pénien urinaire autocollant

Les étuis péniers sont développés et fabriqués sur place. Ils sont fabriqués dans notre entreprise à Lobbach et présentent les caractéristiques décisives qui les rendent indispensables aux utilisateurs en termes de sécurité, de fiabilité, de simplicité d'utilisation sans oublier le confort dans le port.

❶ Raccord de tubulure

Pour le raccord à toutes les poches urinaires avec et sans adaptateur. Le raccord de tubulure est de couleur variable en fonction du modèle d'étui.

Longueur: 50 mm.

❷ Zone tampon

Offre un tampon suffisant en cas d'importante émission spontanée d'urines pour éviter d'influencer le collage, ce qui pourrait entraîner le décollage de l'étui pénien. Le talc confère à la zone tampon un aspect légèrement opaque et empêche que l'étui se colle sur lui-même durant l'utilisation.

Longueur: 75 mm ou 60 mm.

❸ Zone avec colle

Avec deux types de colle d'une intensité différente. Dans la zone avec colle, l'étui pénien est transparent pour pouvoir observer la situation de la peau sans enlever l'étui pénien.

Longueur: 50 mm.

❹ 11 tailles


Leur taille finement échelonnée (diamètre 18–40 mm), permet une adaptation exacte. Plus l'adaptation est bonne, plus le collage est sûr.



Langette de mesure

Pour déterminer la taille exacte de l'étui pénien.

Gratuite.

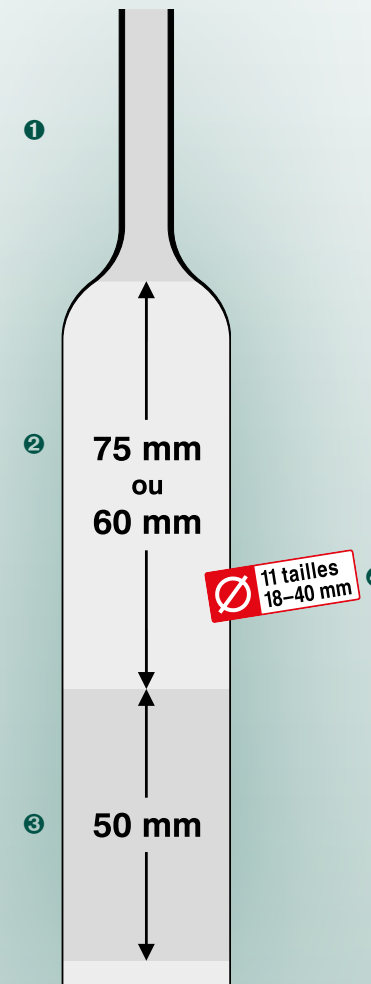

Contrôle à 100 %

Pour offrir à l'utilisateur la plus grande sécurité possible, tous les étuis péniers sont contrôlés *individuellement* tant au niveau de l'étanchéité qu'à la résistance à la déchirure.