

SAUER-Comfort

Selbstklebende Urinal-Kondome


Kondom und Kleber bestehen aus synthetischen Materialien. Mit angetauchtem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter. In 9 Größen erhältlich.

SAUER-Comfort – Violett

Länge 75 mm, Pufferzone 45 mm, Klebezone 25 mm, starker Kleber



Ø mm	Best.-Nr.	PZN
18	97.4511.18	11054619
20	97.4511.20	11054625
22	97.4511.22	11054631
24	97.4511.24	11054648
26	97.4511.26	11054654
28	97.4511.28	11054660
30	97.4511.30	11054677
32	97.4511.32	11054683
35	97.4511.35	11054708

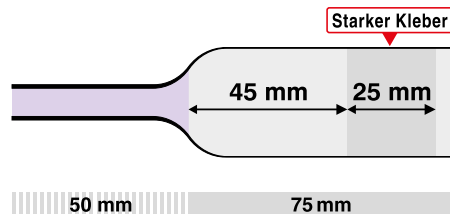

Bei Fragen zu Urinal-Kondomen und Musterwünschen wenden Sie sich bitte an unser Beratungsteam:

Tel. +49 6226 960 069
info@manfred-sauer.de

Unsere Produkte sind von den Krankenkassen anerkannte und erstattungsfähige Hilfsmittel. Sie werden im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes aufgeführt.



MADE IN GERMANY Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach.

MANFRED SAUER GMBH Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 100 • Fax +49 6226 960 010
Hersteller von Medizinprodukten info@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com

30 Kondome pro Packung, 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.



MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten

SAUER-Comfort

Sicherheit und einfache Handhabung


Sauer
Comfort
violett



Das selbstklebende Urinal-Kondom
mit der kurzen Klebezone


Probleme

Bei der Anwendung eines Urinal-Kondoms können unterschiedliche Probleme auftreten, die oft auch mit den Eigenschaften des gewählten Kondoms zusammenhängen. Um den aufgeführten Problemen entgegenzuwirken, muss ein Urinal-Kondom besonders hohe Anforderungen erfüllen.

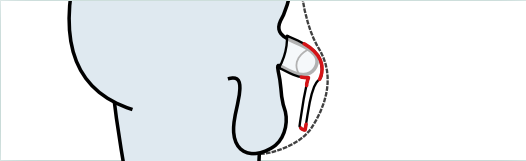

Reibung

Kondome ohne flexible Pufferzone können an der Kleidung reiben, was zu einem vorzeitigem Ablösen des Kondoms führen kann.

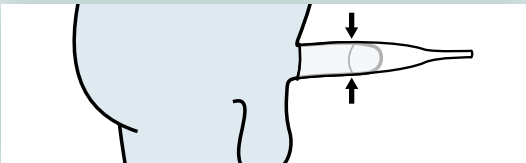


Keine passende Größe?

Schlecht angepasste Kondome ermöglichen meist keine sichere Klebeverbindung.



Pfützenbildung

Bei Kondomen aus festerem Material bleibt häufig ein Urinrest im Kondom zurück.

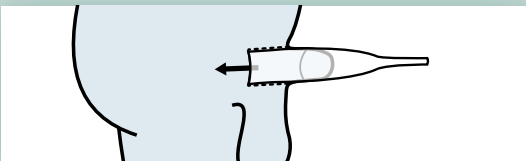

Retrahierter Penis

Der Penis zieht sich in den Bauchraum zurück, wodurch weniger Klebefläche zur Verfügung steht.

SAUER-Comfort – Violett

Aus eigener Entwicklung und Produktion. Die Kondome werden in unserem Betrieb in Lobbach hergestellt und haben die Merkmale, die für den Anwender entscheidend sind, wenn es um einfache Handhabung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und nicht zuletzt um einen hohen Tragekomfort geht.

1 Schlauchansatz

Zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter. Je nach Ausführung des Kondoms ist der Schlauchansatz unterschiedlich gefärbt.

Länge: 50 mm

2 Pufferzone

Ermöglicht ein enges Anlegen des Kondoms an den Körper. So wird ein Reiben zwischen Unterwäsche und Kondom, das zum Ablösen des Kondoms führen könnte, weitgehend vermieden. Der Schlauch zum Urin-Auffangbeutel kann beliebig nach links oder rechts gelegt werden.

Länge der Pufferzone: 45 mm

3 Kurze Klebezone

Bei einer kleinen Klebefläche ist eine kurze Klebezone vorteilhafter, weil am Ende des Kondoms kein klebriger Ring verbleibt, der sonst mit der Unterwäsche verkleben könnte. Dafür ist der Kleber stärker ausgelegt und sorgt für eine sichere Klebeverbindung. Im Bereich der Klebezone ist das Kondom transparent, um das Hautbild beobachten zu können, ohne das Kondom abzulösen.

Länge der Klebezone: 25 mm


4 9 Größen

Durch die fein abgestuften Größen (Durchmesser 18–35 mm) ist eine exakte Anpassung möglich. Je höher die Passgenauigkeit des Kondoms, umso sicherer ist die Klebeverbindung.

Beim Urinal-Kondom SAUER-Comfort – Violett ist die Klebezone deutlich verkürzt, was vor allem Anwendern mit wenig Klebefläche, aber ohne schwallartige Blasenentleerung entgegenkommt. Wegen der kurzen Form ist dieses Kondom in den kleinen Größen auch für Kinder geeignet.

Maßband

Zur Ermittlung der exakten Kondomgröße. Es ist kostenlos erhältlich.

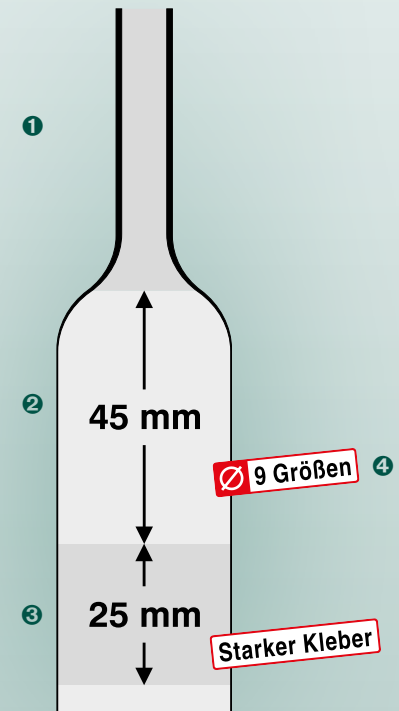

100 %-Prüfung

Um dem Anwender eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten, werden alle Urinal-Kondome *einzel*n auf Dichtigkeit und Reißfestigkeit geprüft.