


Languette de mesure dans la taille originale à imprimer et à découper soi-même*


Languette de mesure

Destinée à déterminer la taille exacte de l'étui pénien urinaire nécessaire. Plus l'ajustement de l'étui pénien urinaire est précis, plus le collage est sûr.


Pour la mesure, on place la languette de mesure vers le centre du pénis. Si le collage est régulièrement effectué à l'état d'érection, la mesure devrait également être effectuée à l'état d'érection.

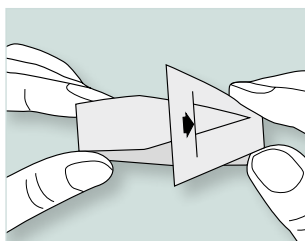

Passez la pointe de la languette de mesure à travers l'échancrure par arrière.

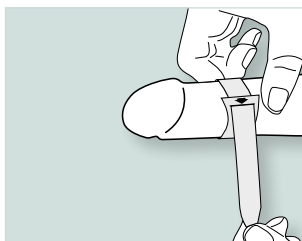

Enfilez la languette de mesure sur le pénis et resserrez-la autour le milieu du pénis. Assurez-vous que la languette soit ajustée sur la peau sans sangler le pénis.

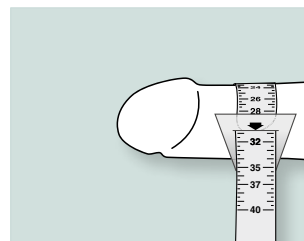



Si possible, lisez la valeur mesurée avec la languette encore en position. La valeur indiquée par la pointe de flèche représente la taille de l'étui pénien (par exemple 30 mm). Si la flèche se situe entre deux tailles, veuillez choisir le plus petit diamètre.

*Mode d'emploi pour l'impression:

1. Imprimez cette page en format A4 à l'échelle 100 %
2. Veillez à ce qu'aucune « mise à l'échelle » ne soit activée dans les paramètres d'impression; dans le Reader Adobe, paramétrer « taille réelle » dans les options d'impression.
3. Pour effectuer un contrôle, vous pouvez vérifier si cette ligne a une longueur de 8 cm.



Si les indications ne correspondent pas, les paramètres de votre imprimante sont incorrects!

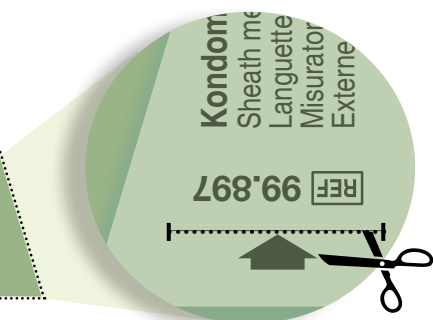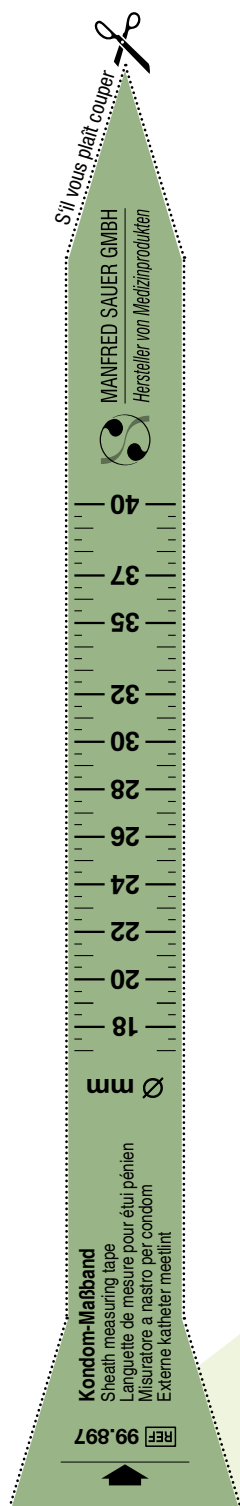

Veillez s'il vous plaît découper une fente de la largeur indiquée.

Téléphone assistance conseil: +49 6226 960 104 • Lundi–Jeudi 10.00–16.00 h, Vendredi 8.00–15.00 h



MANFRED SAUER GMBH
Hersteller von Medizinprodukten

Neurott 7–15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com