

## Emballage fonctionnel

### Utilisation variable

L'emballage fonctionnel peut être utilisé comme rallonge pour évacuer l'urine directement dans la toilette. Pousser la sonde jusqu'à ce que le connecteur bouche l'emballage fonctionnel.




#### Marques de déchirement ▼ déchirer ici

- 1 Ouvrir
- 2 En arrachant par secousses on obtient une partie de film (glissière) qui peut servir comme aide à l'introduction

## Sonde à usage unique prélubrifiée

**IQ 3204.xx** longueur 40 cm, **immédiatement prête à l'emploi**, prélubrifiée, emballage fonctionnel, stérile

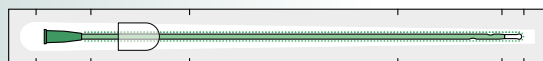

	Taille*	
	CH	mm
●	10	3,3
○	12	4,0
●	14	4,7
●	16	5,3
●	18	6,0

\* La taille de la sonde se réfère à son diamètre extérieur mesuré en Charrière (CH) et en millimètres. Le connecteur possède un code de couleur en fonction de la taille.

Tel. +49 6226 960 104  
export@manfred-sauer.de

*Avez-vous des questions concernant la sonde à usage unique IQ-Cath? S'il vous plaît appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail.*



XF 2019-11  
REF 99.931



**MADE IN GERMANY** Nos produits sont développés et produits à Lobbach, Allemagne.



**MANFRED SAUER GMBH**  
Hersteller von Medizinprodukten

Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany  
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011  
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com



**MANFRED SAUER GMBH**

Hersteller von Medizinprodukten

# iQCATH

Immédiatement prête à l'emploi – **Lubrifiant**

## Sonde à usage unique pour un sondage doux

## La sonde à 3 zones fonctionnelles

Pour garantir une insertion facile et douce de la sonde IQ-Cath dans l'urètre, les versions avec une longueur de 40 cm ou de 30 cm sont divisées en trois zones fonctionnelles :

### Tête sphérique (brevetée)

La tête de la sonde IQ-Cath est constituée par une sphère souple assise sur une hampe flexible. Cette combinaison permet à la sonde de passer les zones étroites, les échancrures et autres.

### Zone flexible (brevetée)

La tête est suivie par une zone très flexible d'environ 5 cm de long. Elle soutient la capacité de la sonde à suivre le cours de l'urètre sans pression exagérée (cela ne vaut pas pour les sondes avec une longueur de 12 cm).

#### Œillets arrondis :

Les œillets de la sonde sont arrondis pour éviter de blesser la muqueuse très sensible de l'urètre.

### Zone d'introduction

Cette zone de la sonde IQ-Cath, qui s'étend jusqu'au connecteur, est relativement rigide. Cela permet une bonne introduction de la sonde.


### **IQ**CATH 32 Film de l'utilisateur

Il y a des vidéos qui sont faites par des utilisateurs pour des utilisateurs. Ces films sont conçus pour vous aider à trouver la meilleure méthode pour l'utilisation de la sonde IQ-Cath lors de l'autosondage.




**4 à 6x par jour, 150x par mois, 1800x par an. C'est la fréquence à laquelle une sonde est introduite par l'urètre dans la vessie par l'utilisateur moyen de l'auto-sondage pour la vider. Pour ce faire, l'accent doit être mis sur la qualité et la sécurité de l'utilisation de la sonde pour éviter des lésions dès le début.**


**Description de l'application** – les informations suivantes ne remplacent pas une visite chez le médecin et une lecture attentive du mode d'emploi.

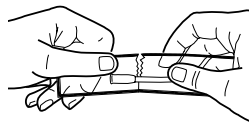


Ouvrir le sac en aluminium, sortir une sonde et ouvrir l'emballage fonctionnel au pointillé de déchirure près du connecteur.

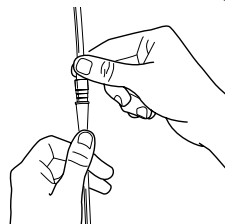


Puis raccorder la sonde à une poche à urine, si nécessaire.

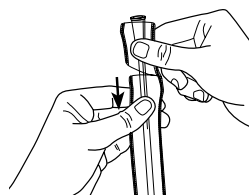

Utilisez le pointillé de déchirure suivant pour arracher par secousses l'emballage fonctionnel ainsi qu'il vous reste une partie du film avec une longueur de 5 cm (glissière) qui peut servir comme aide à l'insertion.

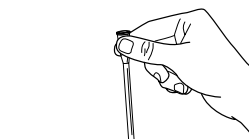

Poussez la glissière vers la tête sphérique ...

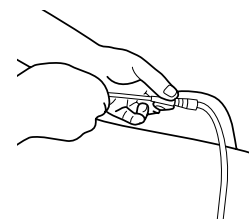

... et utilisez-la pour insérer la sonde d'une manière sûre et sans toucher la sonde directement.

Tête sphérique

Zone flexible

Zone d'introduction