




**Description de l'application** – les informations suivantes ne remplacent pas une visite chez le médecin et une lecture attentive du mode d'emploi.

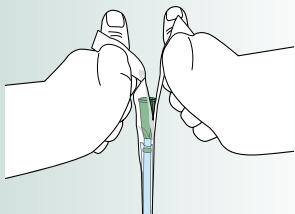

Tenir la sonde verticale avec la pointe vers le bas et ouvrir l'emballage « Peel » au pointillé antérieur (connecteur).

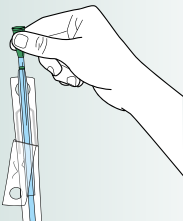

Sortir la sonde du film plastique « Peel » par le connecteur. Brancher la sonde à une poche urinaire si nécessaire.

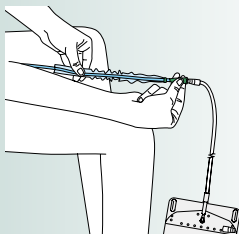

Introduire la sonde avec précaution dans l'urètre jusqu'à l'écoulement de l'urine. Retirer la sonde lentement de l'urètre quand l'urine cesse de couler.

## 2 longueurs



Tel. +49 6226 960 104  
export@manfred-sauer.de

*Avez-vous des questions concernant la sonde à usage unique IQ-Cath? S'il vous plaît appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail.*



XF 2019-11  
REF 99.910



**MADE IN GERMANY** Nos produits sont développés et produits à Lobbach, Allemagne.



**MANFRED SAUER GMBH**  
Hersteller von Medizinprodukten

Neurott 7 – 15 • 74931 Lobbach • Germany  
Tel. +49 6226 960 100 • Fax +49 6226 960 010  
info@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com



**MANFRED SAUER GMBH**

Hersteller von Medizinprodukten

# IQ-CATH

La sonde à 3 zones fonctionnelles  
avec « Sleeve »



**Sonde à usage unique pour  
un sondage doux**

## La sonde à 3 zones fonctionnelles

Pour garantir une insertion facile et douce de la sonde IQ-Cath dans l'urètre, les versions avec une longueur de 40 cm ou de 30 cm sont divisées en trois zones fonctionnelles :

### Tête sphérique (brevetée)

La tête de la sonde IQ-Cath est constituée par une sphère souple assise sur une hampe flexible. Cette combinaison permet à la sonde de passer les zones étroites, les échancrures et autres.

### Zone flexible (brevetée)

La tête est suivie par une zone très flexible d'environ 5 cm de long. Elle soutient la capacité de la sonde à suivre le cours de l'urètre sans pression exagéré (cela ne vaut pas pour les sondes avec une longueur de 12 cm).

### Œillets arrondis :

Les œillets de la sonde sont arrondis pour éviter de blesser la muqueuse très sensible de l'urètre.

### Zone d'introduction

Cette zone de la sonde IQ-Cath, qui s'étend jusqu'au connecteur, est relativement rigide. Cela permet une bonne introduction de la sonde.

### IQ-CATH-VIDEOS DES UTILISATEURS

Il y a des vidéos qui sont faites par des utilisateurs pour des utilisateurs. Ces films sont conçus pour vous aider à trouver la meilleure méthode pour l'utilisation de la sonde IQ-Cath lors de l'autosondage.



4 à 6x par jour, 150x par mois, 1800x par an.

C'est la fréquence à laquelle une sonde est introduite par l'urètre dans la vessie par l'utilisateur moyen de l'auto-sondage pour la vider. Pour ce faire, l'accent doit être mis sur la qualité et la sécurité de l'utilisation de la sonde pour éviter des lésions dès le début.

### Sleeve

#### L'insertion en technique no touch

Le Sleeve est un film plastique qui couvre la sonde stérile entièrement et qui assure son introduction sans la toucher directement.




### Emballage « Peel » Emploi simple

Des orifices adaptés assurent l'ouverture douce et facile (« Peel ») de l'emballage sans toucher la sonde.




### Catégories des sondes avec « Sleeve » (guide à l'introduction) Sonde hydrophile à usage unique

**IQ 4304.xx** longueur 40 cm, **immédiatement prête à l'emploi**, solution NaCl 0,9 % stérile activé, Sleeve (guide à l'introduction), emballage « Peel », stérile

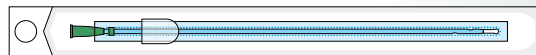

**IQ 4303.xx** longueur 40 cm, **immédiatement prête à l'emploi**, solution NaCl 0,9 % stérile activé, Sleeve (guide à l'introduction), emballage « Peel », stérile

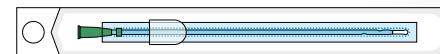

Taille\*  
CH mm

- 10 3,3
- 12 4,0
- 14 4,7
- 16 5,3
- 18 6,0

- 10 3,3
- 12 4,0
- 14 4,7

\* La taille de la sonde se réfère à son diamètre extérieur mesuré en Charrière (CH) et en millimètres. Le connecteur possède un code de couleur en fonction de la taille.

Tête sphérique

Zone flexible

Zone d'introduction