

Versionen des IQ-Cath

Länge des Katheters

Die Angabe bezieht sich auf die (effektive) Länge des Katheters ohne Konnektor: 40 cm vorrangig für Männer, 30 cm vorrangig für Jungen, 12 cm vorrangig für Frauen. Die genannten Längen sind nicht für alle Kathedertypen erhältlich.

Größe	●	○	●	●	●
CH	10	12	14	16	18
mm	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0

Die Größe des Katheters bezieht sich auf ihren Außendurchmesser und wird in CH (Charrière) und Millimeter angegeben. Der Konnektor ist farblich nach der Größe codiert.

Hydrophile Einmalkatheter

	IQ-Cath	Gebrauchsfertig	Extra	Länge	CH
Funktionsverpackung	20 <input type="checkbox"/>	Nein	–	40 cm	● ○ ● ● ● X
	21 <input type="checkbox"/>	Ja	–	40 cm	● ○ ● ● ● ●
Peelverpackung	29	Nein	–	40 cm	● ○ ● ● ● ●
	29	Nein	–	12 cm	● ○ ● X X
	23	Sofort	–	40 cm	● ○ ● ● ● ●
	23	Sofort	–	30 cm	● ○ ● X X
	23	Sofort	–	12 cm	● ○ ● X X
	43	Sofort	Sleeve	40 cm	● ○ ● ● ● ●
43	Sofort	Sleeve	30 cm	● ○ ● X X	
Urin-Auffangbeutel	26 <input type="checkbox"/>	Ja	–	40 cm	X ○ ● ● ● ●
☐ z. T. auch mit Umverpackung erhältlich					10 12 14 16 18

Gel-Einmalkatheter

	IQ-Cath	Gebrauchsfertig	Extra	Länge	CH
Funktionsverpackung	30	Nein	–	40 cm	X ○ ● ● ● X
	31 <input type="checkbox"/>	Ja	–	40 cm	● ○ ● ● ● X
	32	Sofort	–	40 cm	● ○ ● ● ● ●
Urin-Auffangbeutel	36 <input type="checkbox"/>	Ja	–	40 cm	X ○ ● ● ● X
☐ z. T. auch mit Umverpackung erhältlich					10 12 14 16 18

Tel. +49 6226 960 104
export@manfred-sauer.de

Bei Fragen zu unserem Einmalkatheter IQ-Cath und Musterwünschen rufen Sie uns an oder schreiben uns eine E-Mail.



MADE IN GERMANY Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach.

MANFRED SAUER GMBH Hersteller von Medizinprodukten
Neurott 7–15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com



MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten

iQCATH

... der 3-Zonen-Katheter



Einmalkatheter für
schonendes Katheterisieren

Der 3-Zonen-Katheter

Um den Katheter IQ-Cath leicht und schonend in die Harnröhre einführen zu können, ist er in den **Längen 40 cm und 30 cm** in drei funktionelle Bereiche unterteilt:

Kugelkopf (patentiert)

Der Kopf des IQ-Cath besteht aus einer weichen Kugel, die auf einem flexiblen Schaft sitzt. Durch diese Kombination kann der Katheter nahezu ungehindert Engstellen, Ausbuchtungen u. ä. passieren.

Flexible Zone (patentiert)

Nach dem Kopf folgt ein etwa 5 cm langer besonders biegsamer Bereich, der die Fähigkeit des Katheters unterstützt, ohne starken Druck dem Verlauf der Harnröhre zu folgen (entfällt bei der Länge 12 cm).

Verrundete Augen:

Die Katheteraugen sind verrundet, um Verletzungen der empfindlichen Harnröhrenschleimhaut vorzubeugen.

Führungszone

Dieser Bereich des IQ-Cath, der sich bis zum Konnektor fortsetzt, ist verhältnismäßig starr ausgelegt. Dadurch lässt sich der Katheter gut nachführen.

4–6× am Tag, 150× im Monat, 1800× im Jahr. Etwa so häufig führt ein durchschnittlicher Anwender des intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) den Katheter durch die Harnröhre in die Blase ein, um sie zu entleeren. Deshalb kommt es auf die Qualität und die Anwendungssicherheit des Katheters an, um Verletzungen von Anfang an vorzubeugen!

Sleeve

Berührungsfreies Einführen

Der Sleeve, eine dünne Folie, umschließt vollkommen den Katheter und gewährleistet ein berührungsfreies Einführen.

Peelverpackung

Einfache Handhabung

Greiflöcher ermöglichen ein behutsames, leichtes Aufziehen („peelen“) der Verpackung ohne den Katheter zu berühren.


Funktionsverpackung

Variable Anwendung

Die Funktionsverpackung kann als Verlängerung zum direkten Ablauf des Urins in die Toilette verwendet werden. Dazu den Katheter so weit nach vorne schieben, bis der Konnektor abdichtet.

All In One Version...



...für den hydrophilen oder den Gel-Katheter. Fassungsvermögen des Auffangbeutels 1 Liter.

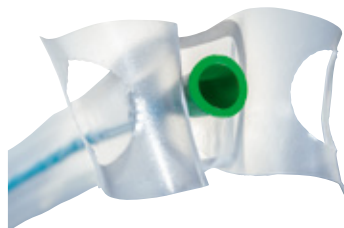

Reißmarken

▼ hier einreißen

- 1 Öffnen
- 2 ruckweises Abreißen erzeugt ein Folienstück (Gleiter), das als Einführhilfe dient

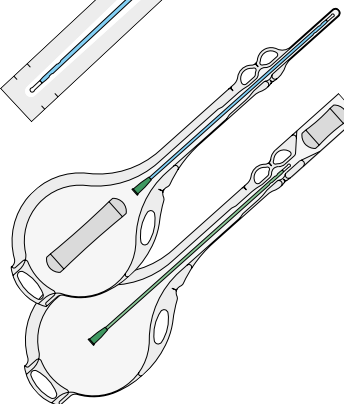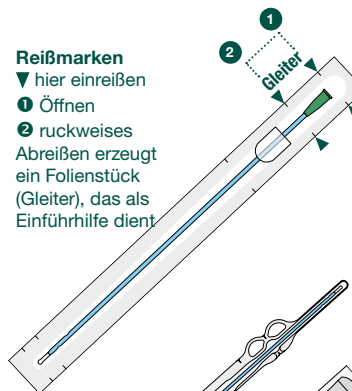

IQCATH-ANWENDERFILME:

www.manfred-sauer.com/anwenderfilme

