

Catégories des sondes

Longueur de la sonde

L'indication de la longueur se réfère à la longueur sans connecteur : 40 cm principalement pour hommes, 30 cm principalement pour garçons, 12 cm principalement pour femmes. Les longueurs mentionnées ci-dessus ne sont pas disponibles pour tous les types des sondes.

Taille	●	○	●	●	●
CH	10	12	14	16	18
mm	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0

La taille de la sonde se réfère à son diamètre extérieur mesuré en Charrière (CH) et en millimètres. Le connecteur possède un code de couleur en fonction de la taille.

Sonde hydrophile à usage unique

	IQ-Cath	prête à l'emploi	extra	longueur	CH
Emballage fonctionnel	20 <input type="checkbox"/>	Non	–	40 cm	● ○ ● ● ● X
	21 <input type="checkbox"/>	Oui	–	40 cm	● ○ ● ● ● ●
Emballage « Peel »	29	Non	–	40 cm	● ○ ● ● ● ●
	29	Non	–	12 cm	● ○ ● ● X X
	23	immédiatement	–	40 cm	● ○ ● ● ● ●
	23	immédiatement	–	30 cm	● ○ ● ● X X
	23	immédiatement	–	12 cm	● ○ ● ● X X
	43	immédiatement	Sleeve	40 cm	● ○ ● ● ● ●
43	immédiatement	Sleeve	30 cm	● ○ ● ● X X	
Poche urinaire	26 <input type="checkbox"/>	Oui	–	40 cm	X ○ ● ● ● ●
<input type="checkbox"/> partiellement aussi avec suremballage					10 12 14 16 18

Sonde à usage unique à utiliser avec lubrifiant

	IQ-Cath	prête à l'emploi	extra	longueur	CH
Emballage fonctionnel	30	Non	–	40 cm	X ○ ● ● ● ● X
	31 <input type="checkbox"/>	Oui	–	40 cm	● ○ ● ● ● ● X
	32	immédiatement	–	40 cm	● ○ ● ● ● ● ●
Poche urinaire	36 <input type="checkbox"/>	Oui	–	40 cm	X ○ ● ● ● ● X
<input type="checkbox"/> partiellement aussi avec suremballage					10 12 14 16 18

Tel. +49 6226 960 104
export@manfred-sauer.de

Avez-vous des questions concernant la sonde à usage unique IQ-Cath? S'il vous plaît appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail.



MADE IN GERMANY Nos produits sont développés et produits à Lobbach, Allemagne.

MANFRED SAUER GMBH Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany
 Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011
 export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com



MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten

iQCATH

La sonde à 3 zones fonctionnelles



Sonde à usage unique pour un sondage doux

La sonde à 3 zones fonctionnelles

Pour garantir une insertion facile et douce de la sonde IQ-Cath dans l'urètre, les versions avec une longueur de 40 cm ou de 30 cm sont divisées en trois zones fonctionnelles :

Tête sphérique (brevetée)

La tête de la sonde IQ-Cath est constituée par une sphère souple assise sur une hampe flexible. Cette combinaison permet à la sonde de passer les zones étroites, les échancrures et autres.

Zone flexible (brevetée)

La tête est suivie par une zone très flexible d'environ 5 cm de long. Elle soutient la capacité de la sonde à suivre le cours de l'urètre sans pression exagérée (cela ne vaut pas pour les sondes avec une longueur de 12 cm).

Œillets arrondis :

Les œillets de la sonde sont arrondis pour éviter de blesser la muqueuse très sensible de l'urètre.

Zone d'introduction

Cette zone de la sonde IQ-Cath, qui s'étend jusqu'au connecteur, est relativement rigide. Cela permet une bonne introduction de la sonde.

IQ-CATH-VIDEOS DES UTILISATEURS

Il y a des vidéos qui sont faites par des utilisateurs pour des utilisateurs. Ces films sont conçus pour vous aider à trouver la meilleure méthode pour l'utilisation de la sonde IQ-Cath lors de l'autosondage.



4 à 6x par jour, 150x par mois, 1800x par an.


C'est la fréquence à laquelle une sonde est introduite par l'urètre dans la vessie par l'utilisateur moyen de l'auto-sondage pour la vider. Pour ce faire, l'accent doit être mis sur la qualité et la sécurité de l'utilisation de la sonde pour éviter des lésions dès le début.



Sleeve

L'insertion en technique no touch

Le Sleeve est un film plastique qui couvre la sonde stérile entièrement et qui assure son introduction sans la toucher directement.

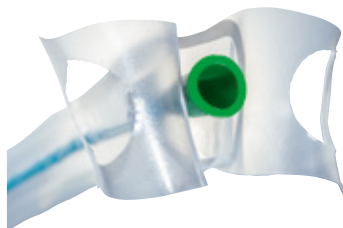


Emballage « Peel » Emploi simple

Des orifices adaptés assurent l'ouverture douce et facile (« Peel ») de l'emballage sans toucher la sonde.

Marques de déchirement

▼ déchirer ici

- 1 Ouvrir
- 2 En arrachant par secousses on obtient une partie de film (glissière) qui peut servir comme aide à l'introduction

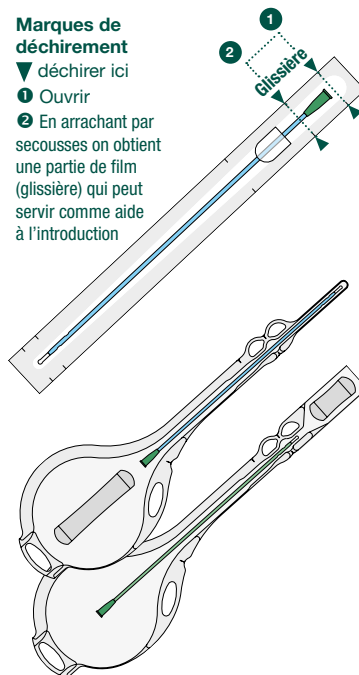

Emballage fonctionnel

Utilisation variable

L'emballage fonctionnel peut être utilisé comme rallonge pour évacuer l'urine directement dans la toilette. Pousser la sonde jusqu'à ce que le connecteur bouche l'emballage fonctionnel.

Tout-en-un Version...

... pour la sonde hydrophile ou à utiliser avec lubrifiant. Capacité de la poche à urine 1 litre.

Tête sphérique

Zone flexible

Zone d'introduction