

## Auxiliaires pour l'autosondage

La conception de ces auxiliaires a été effectuée en étroite collaboration avec des personnes concernées (tétraplégiques et paraplégiques, hommes et femmes) et des ergothérapeutes. L'objectif en était de favoriser l'opération de l'auto-sondage en toute indépendance ou de la faciliter.



MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten

# iQ CATH

... pour femmes



### Coussin écarteur

REF 110.02

### Miroir avec bande de fixation

REF 110.33



### Set de drainage

REF 110.65

Tube d'allongement de la sonde pour une évacuation propre de l'urine dans les toilettes.

Tel. +49 6226 960 104  
export@manfred-sauer.de

*Avez-vous des questions concernant la sonde à usage unique IQ-Cath? S'il vous plaît appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail.*



XF 2020-10  
REF 99.913



MADE IN GERMANY

Nos produits sont développés et produits à Lobbach, Allemagne.



MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten

Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany

Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011

export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com

Sonde à usage unique pour  
un sondage doux

4 à 6x par jour, 150x par mois, 1800x par an.

C'est la fréquence à laquelle une sonde est introduite par l'urètre dans la vessie par l'utilisatrice moyenne de l'auto-sondage pour la vider. Pour ce faire, l'accent doit être mis sur la qualité et la sécurité de l'utilisation de la sonde pour éviter des lésions dès le début.

## Composition

### Tête sphérique (brevetée)

La tête de la sonde IQ-Cath est constituée par une sphère souple assise sur une hampe flexible. Cette combinaison permet à la sonde de passer les zones étroites, les échancrures et autres.

### Pas de zone flexible

Contrairement au cathéter à 3 zones, le cathéter IQ pour femmes ou filles n'a pas de zone flexible.

### Zone d'introduction

Cette zone de la sonde IQ-Cath, qui s'étend jusqu'au connecteur, est relativement rigide. Cela permet une bonne introduction de la sonde.

**Œillets arrondis :**  
Les œillets de la sonde sont arrondis pour éviter de blesser la muqueuse très sensible de l'urètre.


### Le connecteur

Le connecteur extra-long (env. 5 cm) permet la préhension sûre et un maniement plus facile.

## Emballage « Peel » Emploi simple

Des orifices adaptés assurent l'ouverture douce et facile (« Peel ») de l'emballage sans toucher la sonde.

Tenir la sonde à la verticale avec la pointe vers le bas et ouvrir l'emballage « Peel » au pointillé antérieur (connecteur). Éviter de toucher la sonde directement (sauf pour le connecteur).

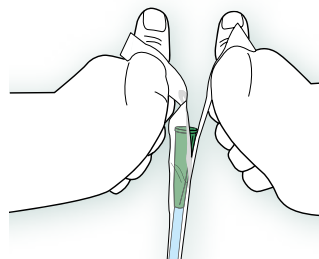

## Longueur de la sonde

L'indication de la longueur se réfère à la longueur sans connecteur.

## Sonde hydrophile à usage unique

**IQ 2902.xx** longueur 12 cm, non prête à l'emploi, emballage « Peel », stérile



Taille\*


CH mm

● 10 3,3

○ 12 4,0

● 14 4,7

**IQ 2302.xx** longueur 12 cm, **immédiatement prête à l'emploi**, solution NaCl 0,9 % stérile activé, emballage « Peel », stérile

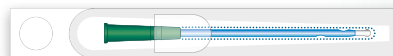

● 10 3,3

○ 12 4,0

● 14 4,7

\* La taille de la sonde se réfère à son diamètre extérieur mesuré en Charrière (CH) et en millimètres. Le connecteur possède un code de couleur en fonction de la taille.

Tête sphérique

Zone d'introduction

Connecteur