

### Anneau de dilatation KIC

Pour élargir la perforation des étuis péniers KIC.  
En matière plastique facile d'entretien.


Quantité	REF
1 pièce	<b>100.01</b>



100.01




100.05

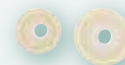

103.24

103.35

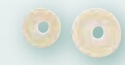

103.30.D

103.35.D

### Etui pénien KIC – Original

Longueur 165 mm, latex naturel, sans raccord de tubulure, avec perforation étampée.

Taille	REF
24 mm	<b>103.24</b>
26 mm	<b>103.26</b>
28 mm	<b>103.28</b>
30 mm	<b>103.30</b>
32 mm	<b>103.32</b>
35 mm	<b>103.35</b>

30 étuis péniers KIC et 10 raccords KIC par paquet, 1 tissu de protection (adapté à la taille de l'étui pénien) est joint.

### Etui pénien KIC – Extra fin

Longueur 200 mm, latex naturel, sans raccord de tubulure, avec perforation étampée.

Taille	REF
30 mm	<b>103.30.D</b>
35 mm	<b>103.35.D</b>

# SYSTEMEKIC

Une bonne solution ...



... pour combiner l'étui pénien  
avec l'autosondage intermittent

Si vous avez des questions sur le système KIC veuillez vous adresser à l'adresse suivante :

**Tel. +49 6226 960 104**  
**export@manfred-sauer.de**



XF 2021-03  
REF 99.920

4 2 5 0 2 7 4 5 3 6 0 2 6

MADE IN GERMANY Nos produits sont développés et produits à Lobbach, Allemagne.




MANFRED SAUER GMBH  
Hersteller von Medizinprodukten

Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany  
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011  
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com

# SYSTEME KIC

Nous avons développé le système KIC pour les personnes qui vident leur vessie plusieurs fois par jour en utilisant une sonde (autosondage intermittent), mais sont incontinentes entre les périodes de sondage et, pour cette raison, se mettent un étui pénien urinaire.

Par conséquent, ils doivent coller un nouvel étui pénien après chaque sondage, chose qui peut aggraver la peau en plus.

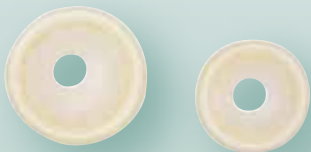

Dans le système KIC, un raccord amovible remplace le raccord de tubulure de l'étui pénien en tant que liaison avec la poche urinaire. Ce raccord peut être enlevé et l'étui pénien – élargi avec l'anneau de dilatation – enroulé sur le pénis de façon à libérer sa pointe pour la désinfection et le sondage. Puis l'étui est remis dans sa position d'origine et raccordé au système d'évacuation en place. Ce processus peut être répété autant de fois que souhaité.

**Avec le système KIC, il suffit d'effectuer une seule pose quotidienne d'étui pénien – cela est plus doux à la peau et se révèle plus économique !**

**Le système KIC comprend les composantes suivantes:**

#### L'anneau de dilatation KIC

Pour élargir la perforation des étuis péniers KIC pour libérer la pointe du pénis pour l'insertion d'une sonde.

#### Etui pénien KIC

Avec une perforation estampée permettant la dilatation et le retour intégral à la forme d'origine. Ces étuis péniers en latex sont disponibles dans les versions « Original » en 11 tailles et « Extra fin » en 3 tailles.

#### Le raccord KIC

Remplace le raccord de tubulure courant de l'étui pénien. Ce raccord peut être enlevé de l'étui pénien. Cela est indispensable pour enrouler l'étui sur la pointe du pénis avec l'anneau de dilatation.

**Entretien et désinfection:** L'anneau de dilatation et le raccord KIC peuvent être nettoyés sans problème avec les produits désinfectants disponibles sur le marché.

**Pour utiliser le système KIC, vous avez besoin :**

- De l'anneau de dilatation KIC
- D'étuis péniers KIC (Latex)
- Colle-peau ou bandelettes collantes


## Combinaison entre l'étui pénien et l'autosondage




Pour effectuer le sondage, enlever le connecteur KIC – et ainsi déconnecter la poche urinaire – de l'étui.



Insérer les petites dents de l'anneau de dilatation dans la perforation de l'étui pénien.

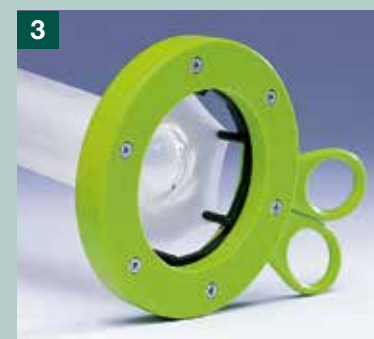

Élargir l'étui pénien ...

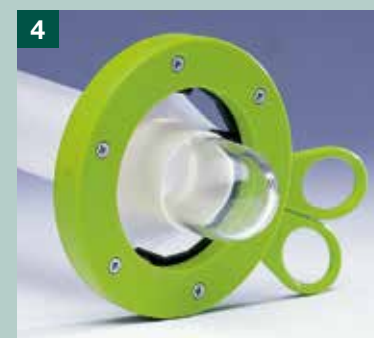

... et l'enrouler en arrière. La pointe du pénis reste libre et ainsi on la peut facilement désinfecter et effectuer le sondage.