

## Hilfsmittel für den ISK

Die Entwicklung dieser Hilfsmittel fand in enger Zusammenarbeit mit querschnittgelähmten Frauen und Ergotherapeuten statt. Ziel dabei war, die selbstständige Durchführung des ISK (Intermittierender Selbstkatheterismus) zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.



Knie-Spreiz-Kissen  
Best.-Nr./REF 110.02



Spiegel mit Klettband  
Best.-Nr./REF 110.31



Knie-Spreizer S  
Best.-Nr./REF 110.06

Knie-Spreizer M  
Best.-Nr./REF 110.05

Spiegel mit Halterung  
Best.-Nr./REF 110.32

Lampe  
Best.-Nr./REF 110.36



Optilux Spiegel  
Best.-Nr./REF 110.70 ... 110.73

Bei Fragen zum **IQ-Cath** und bei Musteranforderung wenden Sie sich bitte an unsere Kundenberatung:

Tel. +49 6226 960 069  
[info@manfred-sauer.de](mailto:info@manfred-sauer.de)



**MADE IN GERMANY** Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach.

**MANFRED SAUER GMBH** Hersteller von Medizinprodukten  
Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany  
Tel. +49 6226 960 100 • Fax +49 6226 960 010  
[info@manfred-sauer.de](mailto:info@manfred-sauer.de) • [www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)



**MANFRED SAUER GMBH**  
Hersteller von Medizinprodukten


**IQCATH**

Frauen



**Einmalkatheter für  
schonendes Katheterisieren**


## Originalgröße

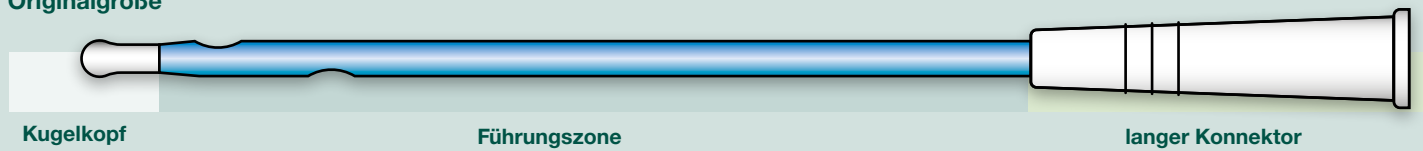

## Aufbau des IQ-Cath

4 – 6 × am Tag, 150 × im Monat, 1800 × im Jahr. Etwa so häufig führt eine durchschnittliche Anwenderin des intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) den Katheter durch die Harnröhre in

die Blase ein, um sie zu entleeren. Deshalb kommt es auf die Qualität und die Anwendungssicherheit des Katheters an, um Verletzungen von Anfang an vorzubeugen!

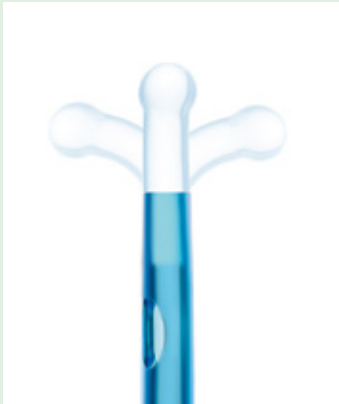

### Kugelkopf (patentiert)

Der Kopf des IQ-Cath besteht aus einer weichen Kugel, die auf einem flexiblen Schaft sitzt. Durch diese Kombination kann der Katheter nahezu ungehindert Engstellen, Ausbuchtungen u. ä. passieren.

### Führungszone

Dieser Bereich des IQ-Cath, der sich bis zum Konnektor fortsetzt, ist verhältnismäßig starr ausgelegt. Dadurch lässt sich der Katheter gut nachführen.

### Konnektor

Der extralange Konnektor ermöglicht Griffsicherheit und bessere Handhabung.



**Verrundete Augen:** Die Katheteraugen sind verrundet, um Verletzungen der empfindlichen Harnröhrenschleimhaut vorzubeugen.

## Peelverpackung Einfache Handhabung


Greiflöcher ermöglichen ein behutsames, leichtes Aufziehen („peelen“) der Verpackung ohne den Katheter zu berühren.



## Versionen des IQ-Cath


### Hydrophiler Einmalkatheter

**IQ 2902.xx** Länge 17 cm, nicht gebrauchsfertig, Peelverpackung, steril

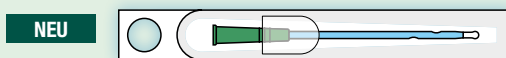

NEU

**IQ 2302.xx** Länge 17 cm, sofort gebrauchsfertig, NaCl-Lösung 0,9%, aktiviert, Peelverpackung, steril

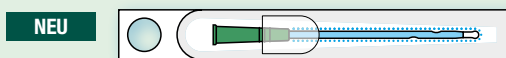

NEU

**Sofort gebrauchsfertig!**

Größe\*

- CH 10
- CH 12
- CH 14

- CH 10
- CH 12
- CH 14

\*Der Konnektor ist farblich nach der Größe codiert (CH = xx). Der Durchmesser wird in CH (Charrière) angegeben.

