

Hilfsmittel für den ISK

Die Entwicklung dieser Hilfsmittel fand in enger Zusammenarbeit mit querschnittgelähmten Frauen und Ergotherapeuten statt. Ziel dabei war, die selbstständige Durchführung des ISK (Intermittierender Selbstkatheterismus) zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.



Knie-Spreiz-Kissen
Best.-Nr./REF 110.02



Spiegel mit Klettband
Best.-Nr./REF 110.31



Knie-Spreizer S
Best.-Nr./REF 110.06

Knie-Spreizer M
Best.-Nr./REF 110.05

Spiegel mit Halterung
Best.-Nr./REF 110.32

Lampe
Best.-Nr./REF 110.36



Optilux Spiegel
Best.-Nr./REF 110.70 ... 110.73

Haben Sie Fragen zum Einmalkatheter IQ-Cath?

Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail:

Tel. +49 6226 960 104
export@manfred-sauer.de



XD 2018-06
REF 99.913



MADE IN GERMANY Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach.



MANFRED SAUER GMBH
Hersteller von Medizinprodukten

Neurott 7 – 15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com



MANFRED SAUER GMBH
Hersteller von Medizinprodukten


iQ CATH

Frauen



**Einmalkatheter für
schonendes Katheterisieren**


Originalgröße

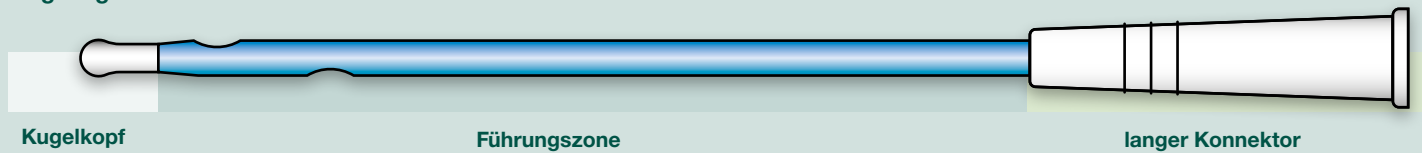

Aufbau des IQ-Cath

4 – 6 × am Tag, 150 × im Monat, 1800 × im Jahr. Etwa so häufig führt eine durchschnittliche Anwenderin des intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) den Katheter durch die Harnröhre in

die Blase ein, um sie zu entleeren. Deshalb kommt es auf die Qualität und die Anwendungssicherheit des Katheters an, um Verletzungen von Anfang an vorzubeugen!

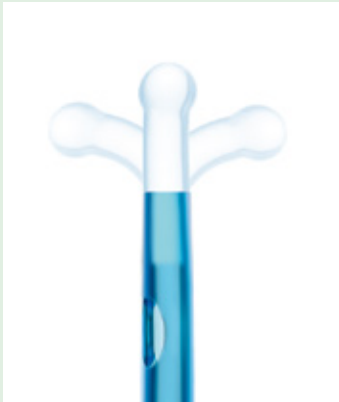

Kugelkopf (patentiert)

Der Kopf des IQ-Cath besteht aus einer weichen Kugel, die auf einem flexiblen Schaft sitzt. Durch diese Kombination kann der Katheter nahezu ungehindert Engstellen, Ausbuchtungen u. ä. passieren.



Führungszone

Dieser Bereich des IQ-Cath, der sich bis zum Konnektor fortsetzt, ist verhältnismäßig starr ausgelegt. Dadurch lässt sich der Katheter gut nachführen.



Konnektor

Der extralange Konnektor ermöglicht Griffsicherheit und bessere Handhabung.



Verrundete Augen: Die Katheteraugen sind verrundet, um Verletzungen der empfindlichen Harnröhrenschleimhaut vorzubeugen.

Peelverpackung Einfache Handhabung


Greiflöcher ermöglichen ein behutsames, leichtes Aufziehen („peelen“) der Verpackung ohne den Katheter zu berühren.



Versionen des IQ-Cath


Hydrophiler Einmalkatheter

IQ 2902.xx Länge 17 cm, nicht gebrauchsfertig, Peelverpackung, steril

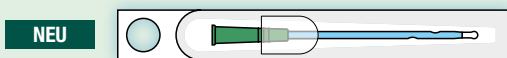

NEU

IQ 2302.xx Länge 17 cm, sofort gebrauchsfertig, NaCl-Lösung 0,9%, aktiviert, Peelverpackung, steril

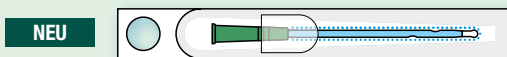

NEU

Sofort gebrauchsfertig!

Größe*

- CH 10
- CH 12
- CH 14

- CH 10
- CH 12
- CH 14

*Der Konnektor ist farblich nach der Größe codiert (CH = xx). Der Durchmesser wird in CH (Charrière) angegeben.

