


SAUER-Comfort – l'étui pénien urinaire autocollant

Conditionnement par boîtes de 30 pièces, 1 tissu de protection (adapté à la taille de l'étui pénien) compris.

Standard 97.xx

Longueur totale environ 180 mm, zone tampon 75 mm, zone avec colle 50 mm, colle normal

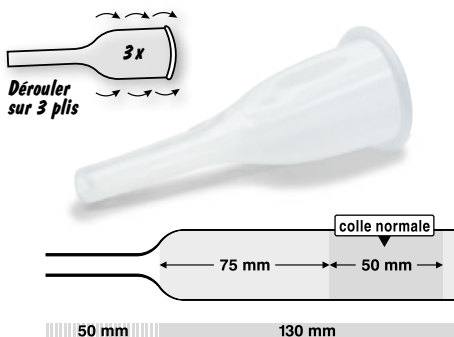


11 tailles
18–40 mm

Ø mm	REF
18	97.18
20	97.20
22	97.22
24	97.24
26	97.26
28	97.28
30	97.30
32	97.32
35	97.35
37	97.37
40	97.40

Bleu 97.7501.xx

Longueur totale environ 180 mm, zone tampon 75 mm, zone avec colle 50 mm, colle plus forte

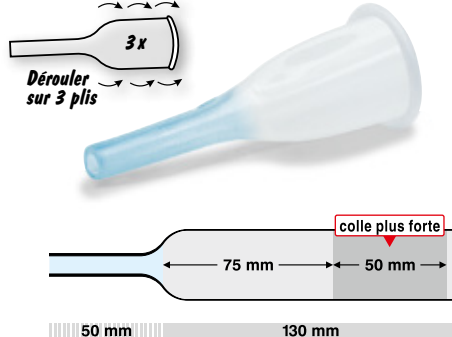


9 tailles
22–40 mm

Ø mm	REF
22	97.7501.22
24	97.7501.24
26	97.7501.26
28	97.7501.28
30	97.7501.30
32	97.7501.32
35	97.7501.35
37	97.7501.37
40	97.7501.40

Vert 97.6000.xx

Longueur totale environ 165 mm, zone tampon 60 mm, zone avec colle 50 mm, colle normal

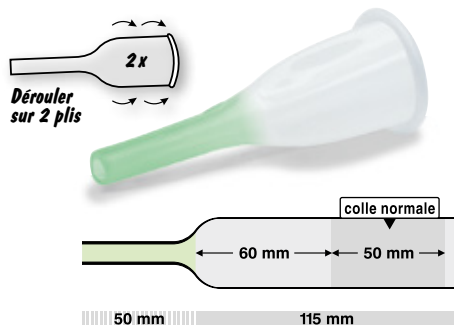


9 tailles
20–40 mm

Ø mm	REF
20	97.6000.20
24	97.6000.24
26	97.6000.26
28	97.6000.28
30	97.6000.30
32	97.6000.32
35	97.6000.35
37	97.6000.37
40	97.6000.40

Rouge 97.6001.xx

Longueur totale environ 165 mm, zone tampon 60 mm, zone avec colle 50 mm, colle plus forte

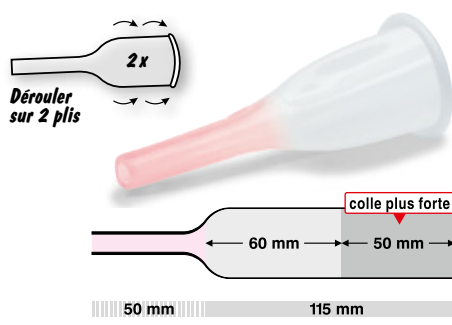


9 tailles
22–40 mm

Ø mm	REF
22	97.6001.22
24	97.6001.24
26	97.6001.26
28	97.6001.28
30	97.6001.30
32	97.6001.32
35	97.6001.35
37	97.6001.37
40	97.6001.40

Violet 97.4511.xx

Longueur totale environ 125 mm, zone tampon 45 mm, zone avec colle 25 mm, colle plus forte

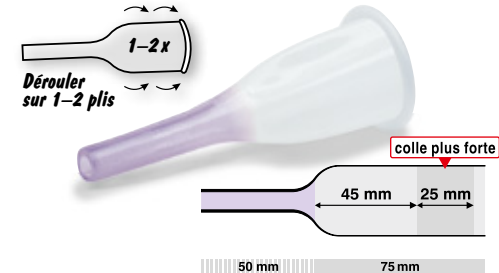

9 tailles
18–35 mm

Ø mm	REF
18	97.4511.18
20	97.4511.20
22	97.4511.22
24	97.4511.24
26	97.4511.26
28	97.4511.28
30	97.4511.30
32	97.4511.32
35	97.4511.35

Etuis péniers urinaires autocollants – SAUER-Comfort

Conduit de raccord


Coloré différemment selon type.

Zone tampon


Talquée, d'où l'apparence légèrement laiteuse.

Zone avec colle

Adhésive en 2 variations.

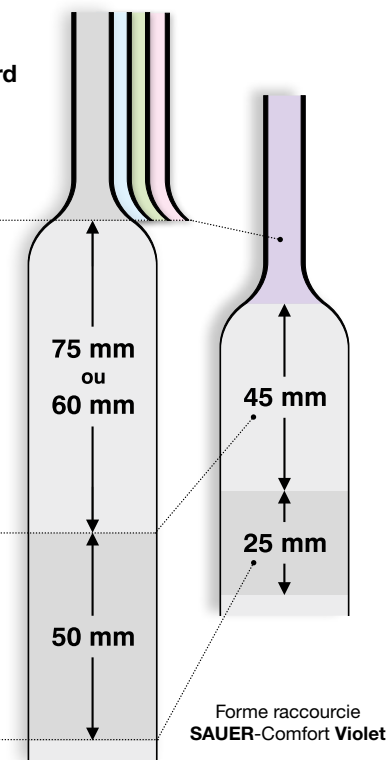

Forme raccourcie
SAUER-Comfort Violet

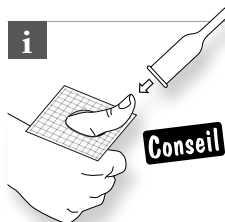

Conseil

Avant du premier usage

Pour vous entraîner à la pose d'un étui pénien autocollant SAUER-Comfort, vous pouvez demander une sorte de « gabarit pour le pouce » (diamètre 24 mm).

Quel étui pénien autocollant est le meilleur pour moi ?

L'outil de décision au verso vous aide pas à pas à faire votre choix.


Languette de mesure

Pour déterminer la taille exacte de l'étui pénien. Gratuite.



Le choix de l'étui pénien urinaire adapté

Pour le soin d'une incontinence moyenne ou grave

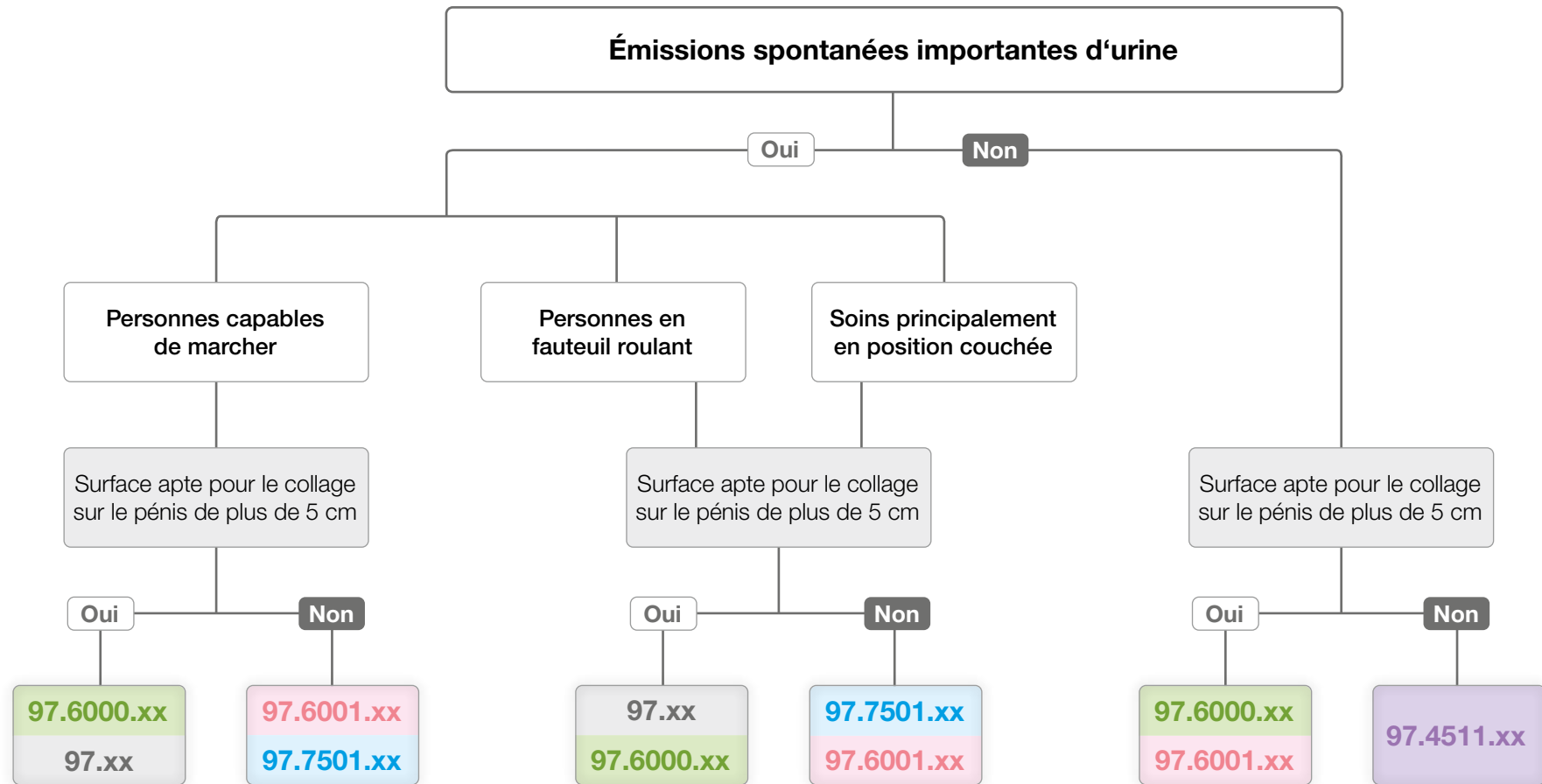

Important!

- Utiliser l'étui de la taille convenante (veuillez déterminer la taille en utilisant la languette de mesure)
- Il est indispensable que dans la zone de collage la peau soit sèche et non grasse
- Choisir la position de l'étui d'une manière que la zone tampon aie la longueur souhaitée
- Raccorder l'étui à la poche urinaire en faisant attention que l'urine puisse s'écouler sans encombre

Conseil téléphonique: +49 6226 960 104

Si les étuis péniens essayés ne donnent pas un résultat satisfaisant, nous vous prions de vous adresser à nos conseillers de clientèle. Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet dans notre Guide éducatif « Le système de drainage vésical basé sur les étuis péniens » que, si besoin est, vous pouvez demander ou télécharger de notre site Internet.

SAUER-Comfort – étui pénien urinaire autocollant

Réf.	Désignation	Zone tampon	Zone avec colle	Colle	Tailles
97.xx	Standard	75 mm	50 mm	standard	11 (18–40 mm)
97.7501.xx	Bleu	75 mm	50 mm	fort	9 (22–40 mm)
97.6000.xx	Vert	60 mm	50 mm	standard	9 (20–40 mm)
97.6001.xx	Rouge	60 mm	50 mm	fort	9 (22–40 mm)
97.4511.xx	Violet	45 mm	25 mm	fort	9 (18–35 mm)

Dans la référence, remplacer «xx» par la taille souhaitée (par exemple 97.7501.26)

