



100.01



100.05



55.38

Menge	Best.-Nr.	PZN
-------	-----------	-----

KIC-Spreizring

Zum Dehnen der Öffnung von KIC-Kondomen.
Aus pflegeleichtem Kunststoff.

1 St.	100.01	08812341
-------	--------	----------

KIC-Kupplung

Zur Verbindung eines KIC-Kondoms mit einem Urin-Bein- oder -Bettbeutel. Aus Kunststoff, mit Kupplungsschlauch aus Latex.

10 St.	100.05	08812364
--------	--------	----------

Kupplungsschlauch

Für KIC-Kupplung 100.05. Aus Latex.

5 St.	55.38	00967162
-------	-------	----------



103.24
...
103.35



103.30.D
103.35.D

Menge	Best.-Nr.	PZN
-------	-----------	-----

KIC-Kondom – Original

Länge 165 mm, Naturlatex, ohne Schlauchansatz,
gestanzte Öffnung.

24 mm	103.24	00591509
26 mm	103.26	00591515
28 mm	103.28	00591521
30 mm	103.30	00591538
32 mm	103.32	00591544
35 mm	103.35	00591550


KIC-Kondom – Extradünn

Länge 200 mm, Naturlatex, ohne Schlauchansatz,
gestanzte Öffnung.

30 mm	103.30.D	01268153
35 mm	103.35.D	01268176

30 KIC-Kondome und 10 KIC-Kupplungen pro Packung,
1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.

MANFRED SAUER

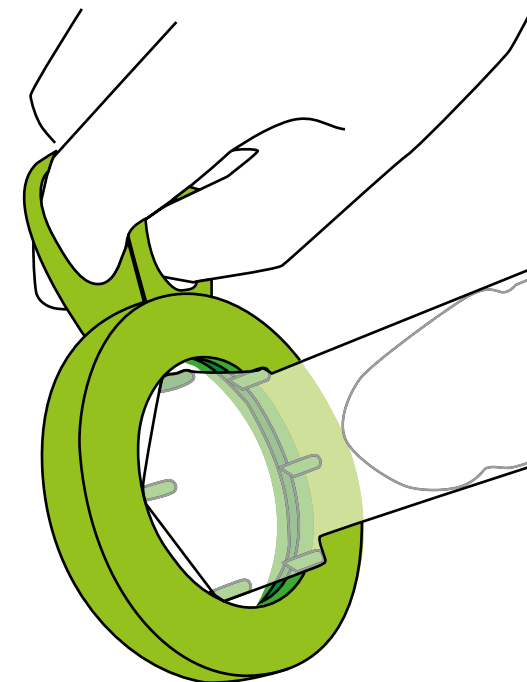

» EINE GUTE VERBINDUNG ...

FRAGEN? WIR HELFEN WEITER ...



+49 6226 960100

Festnetz oder per WhatsApp



info@manfred-sauer.de

Kontakt und Social Media



» MADE IN GERMANY – Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach

KICSYSTEM

... zwischen Kondom-Urinal und dem ISK



MANFRED SAUER

Neurott 7 – 15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960100 · Fax +49 6226 960010

info@manfred-sauer.de · www.manfred-sauer.com



DE 2026-01
REF 99.920



Das **KIC-SYSTEM** haben wir für Personen entwickelt, die mehrfach am Tag die Blase mit einem Katheter entleeren (ISK), zwischendurch aber nicht kontinent sind und deshalb ein Kondom-Urinal tragen.

Das hat zur Folge, nach jedem Katheterisieren ein neues Kondom ankleben zu müssen, was zu einer zusätzlichen Belastung der Haut führen kann. Beim **KIC-SYSTEM** dient anstelle des Kondom-Schlauchansatzes eine abnehmbare

Kupplung als Verbindung zum Urin-Bein- oder -Bettbeutel. Diese Kupplung kann abgenommen und das Kondom – mit dem Spreizring geweitet – über den Penischaft zurückgeführt werden, so dass die Penisspitze zum Desinfizieren und Katheterisieren frei liegt. Danach wird das Kondom wieder in die ursprüngliche Position geführt und an das bestehende Ableitungssystem gekoppelt. Dieser Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen.

Mit dem KIC-SYSTEM muss pro Tag nur ein Kondom angelegt werden – das schont die Haut und ist außerdem kostengünstiger!

Das KIC-SYSTEM besteht aus folgenden Komponenten:

KIC-SPREIZRING

Zum Dehnen der Öffnung von KIC-Kondomen, damit die Penisspitze frei liegt zum Einführen eines Katheters.

KIC-KONDOME

Mit gestanzter Öffnung, die sich sehr weit dehnen lässt und wieder vollständig in die ursprüngliche Form zurückgeht. Diese Latex-Kondome gibt es in den Ausführungen „Original“ in 6 Größen und „Extradünn“ in 2 Größen.

KIC-KUPPLUNG


Ersetzt den sonst üblichen Schlauchansatz des Kondoms. Diese Kupplung kann vom Kondom abgenommen werden. Nur so ist es möglich, das Kondom mit dem Spreizring über die Penisspitze zurückzuführen.

REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG: KIC-Spreizring und KIC-Kupplung können problemlos mit einem geeigneten Desinfektionsmittel behandelt werden.


i FÜR DIE ANWENDUNG DES KIC-SYSTEMS BENÖTIGEN SIE:

- KIC-Spreizring
- KIC-Kondome (Latex)
- Hautkleber oder doppelseitige Klebebander


DIE VERBINDUNG VON KONDOM-URINAL UND ISK

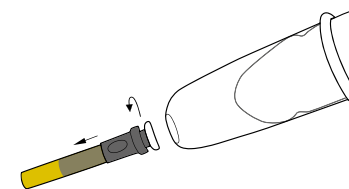


Einlaufschlauch des Urinbeutels mittels KIC-Kupplung vom Kondom trennen.

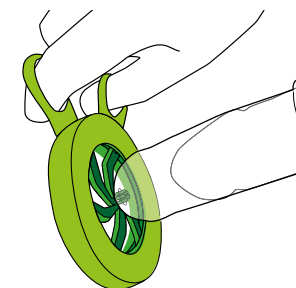

Zähnen des KIC-Spreizrings in die Kondomöffnung einführen.

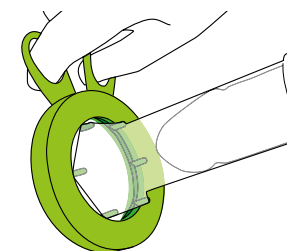

Kondom spreizen ...

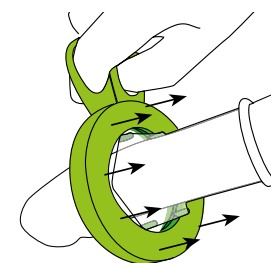

... und nach hinten führen. Die Penisspitze liegt frei, so kann leicht desinfiziert und katheterisiert werden.



KIC-SPREIZRING



KIC-KONDOME



KIC-KUPPLUNG