


SAUER-Comfort – Standard

11 Größen
18–40 mm

Gesamtlänge ca. 180 mm, Pufferzone 75 mm, Klebezone 50 mm, normaler Kleber

Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
18	97.18	00590668	
20	97.20	00590674	
22	97.22	00590680	
24	97.24	00590697	
26	97.26	00590705	
28	97.28	00590711	
30	97.30	00590728	
32	97.32	00590734	
35	97.35	00590740	
37	97.37	00590757	
40	97.40	00590763	

15.25.04.7002

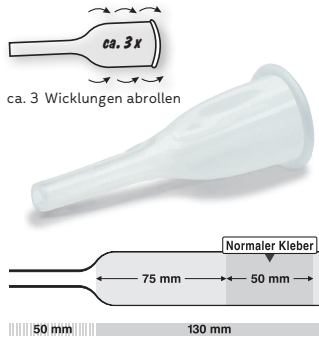


SAUER-Comfort – Blau

9 Größen
22–40 mm

Gesamtlänge ca. 180 mm, Pufferzone 75 mm, Klebezone 50 mm, starker Kleber

Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
22	97.7501.22	00464194	
24	97.7501.24	00464202	
26	97.7501.26	00464219	
28	97.7501.28	00464225	
30	97.7501.30	00464231	
32	97.7501.32	00464248	
35	97.7501.35	00464254	
37	97.7501.37	00464260	
40	97.7501.40	00464277	

15.25.04.7025

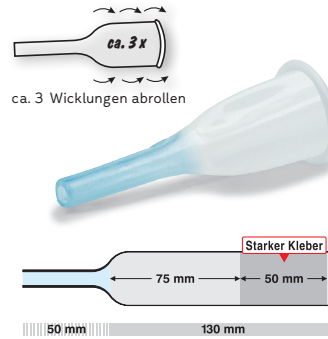


SAUER-Comfort – Grün

9 Größen
20–40 mm

Gesamtlänge ca. 165 mm, Pufferzone 60 mm, Klebezone 50 mm, normaler Kleber

Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
20	97.6000.20	00464308	
24	97.6000.24	00464320	
26	97.6000.26	00464337	
28	97.6000.28	00464343	
30	97.6000.30	00464366	
32	97.6000.32	00464372	
35	97.6000.35	00464389	
37	97.6000.37	00464395	
40	97.6000.40	00464403	

15.25.04.7026

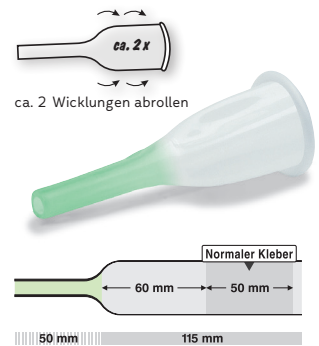


SAUER-Comfort – Rot

9 Größen
22–40 mm

Gesamtlänge ca. 165 mm, Pufferzone 60 mm, Klebezone 50 mm, starker Kleber

Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
22	97.6001.22	00464455	
24	97.6001.24	00464461	
26	97.6001.26	00464478	
28	97.6001.28	00464484	
30	97.6001.30	00464490	
32	97.6001.32	00464509	
35	97.6001.35	00464515	
37	97.6001.37	00464521	
40	97.6001.40	00464538	


15.25.04.7027

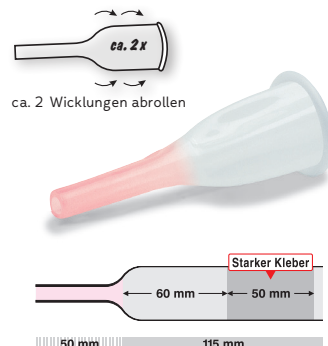

MANFRED SAUER

Sauer
Comfort

» Sicherheit und einfache Handhabung

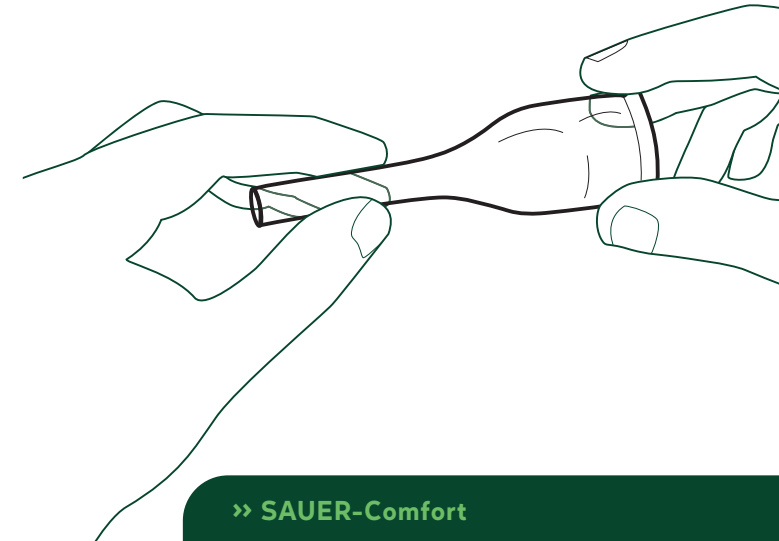

» SAUER-Comfort

SAUER-Comfort

Selbstklebende Urinal-Kondome

Kondom und Kleber bestehen aus synthetischen Materialien. Mit angetauchtem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter.

In bis zu 11 Größen erhältlich.

30 Kondome pro Packung, 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.

Unsere Produkte sind von den Krankenkassen anerkannt und erstattungsfähige Hilfsmittel. Sie werden im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes aufgeführt.



FRAGEN? WIR HELFEN WEITER ...



06226 960 100

Festnetz oder per WhatsApp



info@manfred-sauer.de



» MADE IN GERMANY – Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach

DAS SELBSTKLEBENDE
URINAL-KONDOM
MIT DER EINZIGARTIGEN
PUFFERZONE



MANFRED SAUER

Neurott 7 – 15 · 74931 Lobbach · Germany
Tel. +49 6226 960 100 · Fax +49 6226 960 010
info@manfred-sauer.de · www.manfred-sauer.com




DE 2023-05
REF 99.912



VOR DER ERSTEN ANWENDUNG


Tipp

Um die Handhabung eines selbstklebenden Kondoms SAUER-Comfort kennenzulernen, können Sie einen sog. „Däumling“ anfordern (Durchmesser 22 oder 24 mm). Damit können Sie die einzelnen Schritte zum Anlegen des Kondoms am Daumen ausprobieren und herausfinden, wie Sie etwaige Hemmnisse beim Abrollen überwinden und Faltenbildung vermeiden, und Sie sehen, an welcher Stelle des Kondoms die Klebezone beginnt.

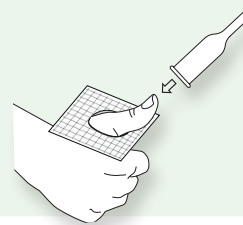


PROBLEME

Bei der Anwendung eines Urinal-Kondoms können unterschiedliche Probleme auftreten, die oft auch mit den Eigenschaften des gewählten Kondoms zusammenhängen. Um den aufgeführten Problemen entgegenzuwirken, muss ein Urinal-Kondom besonders hohe Anforderungen erfüllen.

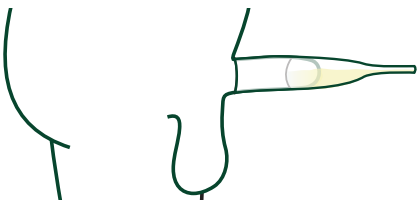


PFÜTZENBILDUNG

Bei Kondomen aus festerem Material bleibt häufig ein Urinrest im Kondom zurück.

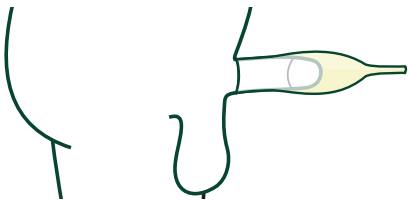

URINSTAU

Bei hohem Spontanurin kann der Urin nicht schnell genug in den Beutel abgeleitet werden.

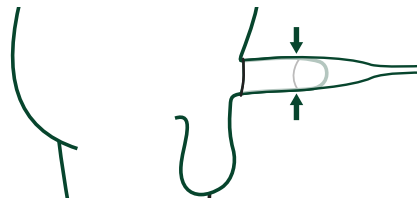

KEINE PASSENDE GRÖSSE?

Schlecht angepasste Kondome ermöglichen meist keine sichere Klebeverbindung.

SAUER-Comfort

Aus eigener Entwicklung und Produktion. Die Kondome werden in unserem Betrieb in Lobbach hergestellt und haben die Merkmale, die für den Anwender entscheidend sind, wenn es um einfache Handhabung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und nicht zuletzt um einen hohen Tragekomfort geht.

» SCHLAUCHANSATZ

Zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter. Je nach Ausführung des Kondoms ist der Schlauchansatz unterschiedlich gefärbt.

Länge: 50 mm

» PUFFERZONE

Bietet einen ausreichenden Puffer bei hohem Spontanurin, um die Klebung nicht zu belasten, was zum Ablösen des Kondoms führen könnte. Die Puderung wirkt dem Zusammenkleben des Kondoms während der Anwendung entgegen, sie gibt der Pufferzone ein leicht milchiges Aussehen.

Länge der Pufferzone: 75 mm oder 60 mm

» KLEBEZONE

Wahlweise mit normalem oder starkem Kleber ausgerüstet. Im Bereich der Klebezone ist das Kondom transparent, das ermöglicht jederzeit eine Beurteilung des Hautbildes, ohne das Kondom ablösen zu müssen.

Länge der Klebezone: 50 mm

» BIS ZU 11 GRÖSSEN

Durch die fein abgestuften Größen (Durchmesser 18–40 mm) ist eine exakte Anpassung möglich. Je höher die Passgenauigkeit des Kondoms, umso sicherer ist die Klebeverbindung.



MASSBAND


Zur Ermittlung der exakten Kondomgröße. Es ist kostenlos erhältlich.

Sauer
Comfort

Hergestellt ohne Zugabe von Latex

SCHLAUCHANSATZ

Je nach Ausführung unterschiedlich gefärbt.

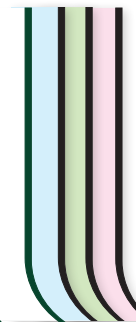

PUFFERZONE

Gepudert, daher leicht milchiges Aussehen.

75 mm
oder
60 mm

Bis zu:
11 Größen
22–40 mm

KLEBEZONE

Mit zwei verschiedenen starken Klebern.

50 mm

i

100%-PRÜFUNG

Um dem Anwender eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten, werden alle Urinal-Kondome einzeln auf Dichtigkeit und Reißfestigkeit geprüft.