

SAUER-Comfort

Selbstklebende Urinal-Kondome

Kondom und Kleber bestehen aus synthetischen Materialien. Mit angetauchtem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter.

In 9 Größen erhältlich.

30 Kondome pro Packung, 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.

SAUER-Comfort – Violett


9 Größen
18–35 mm

Gesamtlänge ca. 125 mm, Pufferzone 45 mm, Klebezone 25 mm, starker Kleber



ca. 1-2x
ca. 1-2 Wicklungen abrollen


Ø	Best.-Nr.	PZN	HMV-Nr.
18	97.4511.18	11054619	15.25.04.7030
20	97.4511.20	11054625	
22	97.4511.22	11054631	
24	97.4511.24	11054648	
26	97.4511.26	11054654	
28	97.4511.28	11054660	
30	97.4511.30	11054677	
32	97.4511.32	11054683	
35	97.4511.35	11054708	

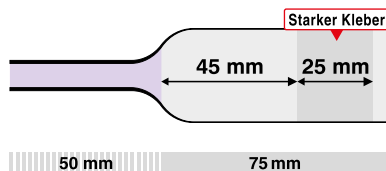

VOR DER ERSTEN ANWENDUNG

Tipp

Um die Handhabung eines selbstklebenden Kondoms SAUER-Comfort violett kennenzulernen, können Sie einen sog. „Däumling“ anfordern (Durchmesser 22 oder 24 mm). Damit können Sie die einzelnen Schritte zum Anlegen des Kondoms am Daumen ausprobieren und herausfinden, wie Sie etwaige Hemmnisse beim Abrollen überwinden und Faltenbildung vermeiden, und Sie sehen, an welcher Stelle des Kondoms die Klebezone beginnt.

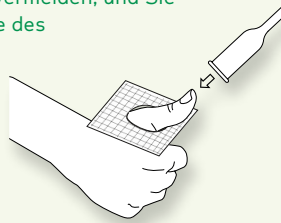

Unsere Produkte sind von den Krankenkassen anerkannt und erstattungsfähige Hilfsmittel. Sie werden im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes aufgeführt.

FRAGEN? WIR HELFEN WEITER ...



+49 6226 960100
Festnetz oder per WhatsApp



info@manfred-sauer.de

Kontakt und Social Media



» MADE IN GERMANY – Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach



MANFRED SAUER

Neurott 7 – 15 · 74931 Lobbach · Germany
Tel. +49 6226 960100 · Fax +49 6226 960010
info@manfred-sauer.de · www.manfred-sauer.com




DE 2026-04
REF 99.914

MANFRED SAUER

Sauer
Comfort Violett

» Sicherheit und einfache Handhabung

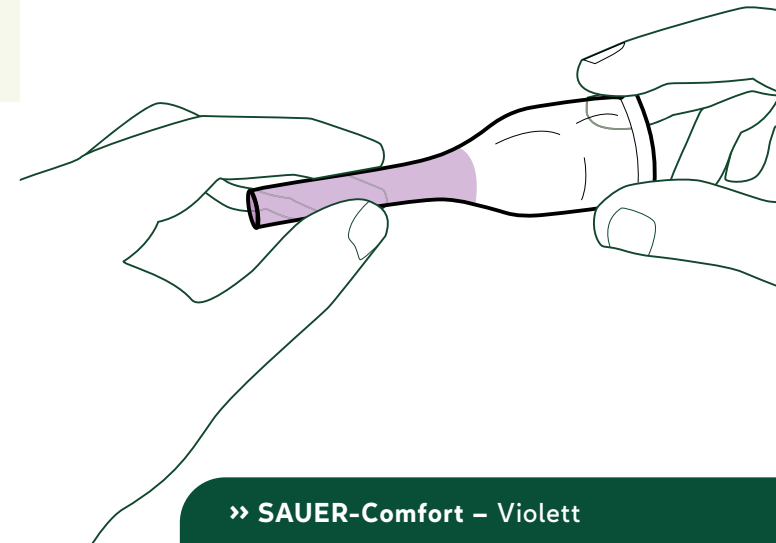

» SAUER-Comfort – Violett

DAS SELBSTKLEBENDE
URINAL-KONDOM
MIT DER KURZEN
PUFFERZONE




PROBLEME

Bei der Anwendung eines Urinal-Kondoms können unterschiedliche Probleme auftreten, die oft auch mit den Eigenschaften des gewählten Kondoms zusammenhängen. Um den aufgeführten Problemen entgegenzuwirken, muss ein Urinal-Kondom besonders hohe Anforderungen erfüllen.



REIBUNG

Kondome ohne flexible Pufferzone können an der Kleidung reiben, was zu einem vorzeitigem Ablösen des Kondoms führen kann.

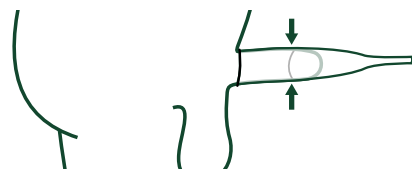


KEINE PASSENDE GRÖSSE?

Schlecht angepasste Kondome ermöglichen meist keine sichere Klebeverbindung.



PFÜTZENBILDUNG

Bei Kondomen aus festerem Material bleibt häufig ein Urinrest im Kondom zurück.

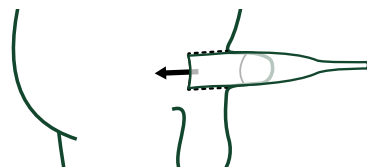

RETRAHIERTER PENIS

Der Penis zieht sich in den Bauchraum zurück, wo durch weniger Klebefläche zur Verfügung steht.

SAUER-Comfort – Violett

Aus eigener Entwicklung und Produktion. Die Kondome werden in unserem Betrieb in Lobbach hergestellt und haben die Merkmale, die für den Anwender entscheidend sind, wenn es um einfache Handhabung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und nicht zuletzt um einen hohen Tragekomfort geht.

Beim Urinal-Kondom SAUER-Comfort – Violett ist die Klebezone deutlich verkürzt, was vor allem Anwendern mit wenig Klebefläche, aber ohne schwallartige Blasenentleerung entgegenkommt. Wegen der kurzen Form ist dieses Kondom in den kleinen Größen auch für Kinder geeignet.

» SCHLAUCHANSATZ

Zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter.

Länge: 50 mm

» PUFFERZONE

Ermöglicht ein enges Anlegen des Kondoms an den Körper. So wird ein Reiben zwischen Unterwäsche und Kondom, das zum Ablösen des Kondoms führen könnte, weitgehend vermieden. Der Schlauch zum Urin-Auffangbeutel kann beliebig nach links oder rechts gelegt werden

Länge der Pufferzone: 45 mm

» KLEBEZONE

Bei einer kleinen Klebefläche ist eine kurze Klebezone vorteilhafter, weil am Ende des Kondoms kein klebriger Ring verbleibt, der sonst mit der Unterwäsche verkleben könnte. Dafür ist der Kleber stärker ausgelegt und sorgt für eine sichere Klebeverbindung. Im Bereich der Klebezone ist das Kondom transparent, um das Hautbild beobachten zu können, ohne das Kondom abzulösen.

Länge der Klebezone: 25 mm

» 9 GRÖSSEN

Durch die fein abgestuften Größen (Durchmesser 18–35 mm) ist eine exakte Anpassung möglich. Je höher die Passgenauigkeit des Kondoms, umso sicherer ist die Klebeverbindung.

Sauer
Comfort

Violett

Hergestellt ohne Zugabe von Latex

PUFFERZONE

Gepudert, daher leicht milchiges Aussehen.

KLEBEZONE

Mit zwei verschiedenen starken Klebern.



MASSBAND

Zur Ermittlung der exakten Kondomgröße. Es ist kostenlos erhältlich.



100%-PRÜFUNG

Um dem Anwender eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten, werden alle Urinal-Kondome einzeln auf Dichtigkeit und Reißfestigkeit geprüft.