

KIC-Spreizring

Zum Dehnen der Öffnung von KIC-Kondomen.
Aus pflegeleichtem Kunststoff.


Menge	Best.-Nr.
1 St.	100.01



100.01



100.05

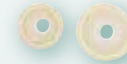

103.24

103.35



103.30.D

103.35.D

KIC-Kondom – Original

Länge 165 mm, Naturlatex, ohne Schlauchansatz,
gestanzte Öffnung.

Größe	Best.-Nr.
24 mm	103.24
26 mm	103.26
28 mm	103.28
30 mm	103.30
32 mm	103.32
35 mm	103.35

30 KIC-Kondome und 10 KIC-Kupplungen pro Packung,
1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.

KIC-Kondom – Extradünn

Länge 200 mm, Naturlatex, ohne Schlauchansatz,
gestanzte Öffnung.

Größe	Best.-Nr.
30 mm	103.30.D
35 mm	103.35.D

Bei Fragen zum KIC-System wenden Sie sich bitte
an unser Beratungsteam:


Tel. +49 6226 960 104
export@manfred-sauer.de



MADE IN GERMANY | Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach.

 **MANFRED SAUER GMBH** Hersteller von Medizinprodukten
Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com

KICSYSTEM
Eine gute Verbindung ...

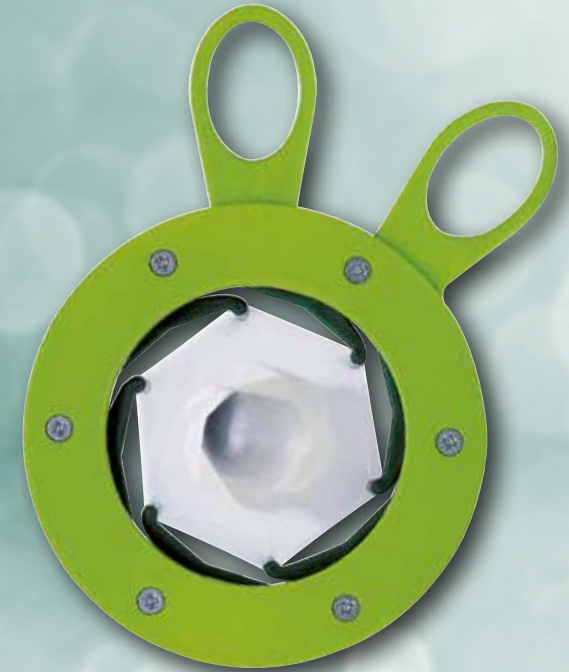

... zwischen Kondom-Urinal
und dem ISK

Das KIC-System haben wir für Personen entwickelt, die mehrfach am Tag die Blase mit einem Katheter entleeren (ISK), zwischendurch aber nicht kontinent sind und deshalb ein Kondom-Urinal tragen.

Das hat zur Folge, nach jedem Katheterisieren ein neues Kondom ankleben zu müssen, was zu einer zusätzlichen Belastung der Haut führen kann.

Beim KIC-System dient anstelle des Kondom-Schlauch-

ansatzes eine abnehmbare Kupplung als Verbindung zum Urin-Bein- oder -Bettbeutel. Diese Kupplung kann abgenommen und das Kondom – mit dem Spreizring geweitet – über den Penischaft zurückgeführt werden, so dass die Penisspitze zum Desinfizieren und Katheterisieren frei liegt. Danach wird das Kondom wieder in die ursprüngliche Position geführt und an das bestehende Ableitungssystem gekoppelt. Dieser Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen.

Mit dem KIC-System muss pro Tag nur ein Kondom angelegt werden – das schont die Haut und ist außerdem kostengünstiger!

Das KIC-System besteht aus folgenden Komponenten:

KIC-Spreizring

Zum Dehnen der Öffnung von KIC-Kondomen, damit die Penisspitze frei liegt zum Einführen eines Katheters.

KIC-Kondome

Mit gestanzter Öffnung, die sich sehr weit dehnen lässt und wieder vollständig in die ursprüngliche Form zurückgeht. Diese Latex-Kondome gibt es in den Ausführungen „Original“ in 6 Größen und „Extradünn“ in 2 Größen.


KIC-Kupplung

Ersetzt den sonst üblichen Schlauchansatz des Kondoms. Diese Kupplung kann vom Kondom abgenommen werden. Nur so ist es möglich, das Kondom mit dem Spreizring über die Penisspitze zurückzuführen.

Reinigung und Desinfizierung: KIC-Spreizring und KIC-Kupplung können problemlos mit einem geeigneten Desinfektionsmittel behandelt werden.

Hinweis: Für die Anwendung des KIC-Systems benötigen Sie:

- KIC-Spreizring
- KIC-Kondome (Latex)
- Hautkleber oder doppelseitige Klebebänder

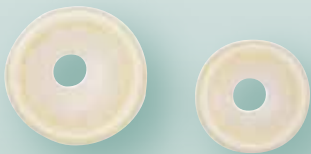

Die Verbindung von Kondom-Urinal und ISK



1

Einlaufschlauch des Urinbeutels mittels KIC-Kupplung vom Kondom trennen.




2

Zähnen des KIC-Spreizringes in die Kondomöffnung einführen.



3

Kondom spreizen ...

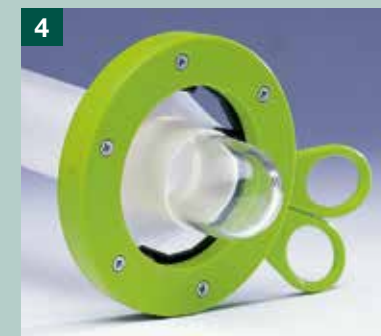

4

... und nach hinten führen. Die Penisspitze liegt frei, so kann leicht desinfiziert und katheterisiert werden.