


Hilfsmittel für den ISK

Die Entwicklung dieser Hilfsmittel fand in enger Zusammenarbeit mit querschnittgelähmten Frauen und Ergotherapeuten statt. Ziel dabei war, die selbstständige Durchführung des ISK (Intermittierender Selbstkatheterismus) zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.

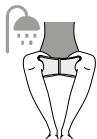

Knie-Spreiz-Kissen

Einfach zu transportierendes, aufblasbares Kissen zum Spreizen und Fixieren der Knie.

Best.-Nr./REF 110.02

Spiegel mit Klettband

Für den ISK kann zusätzlich ein Spiegel (muss separat bestellt werden) mit einem Klettband angebracht werden.

Best.-Nr./REF 110.33




Ableitungsset

Schlauch zur Verlängerung des Katheters für ein sauberes Ableiten des Urins in die Toilette.

Best.-Nr./REF 110.65

MANFRED SAUER

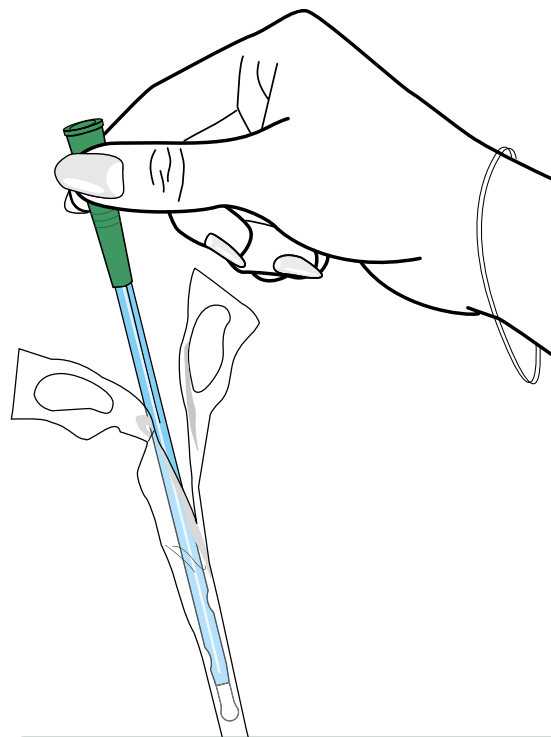

» IQ-CATH – Frauen und Mädchen

FRAGEN? WIR HELFEN WEITER ...



06226 960 100

Festnetz oder per WhatsApp



info@manfred-sauer.de

» MADE IN GERMANY – Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach

DER EINMALKATHETER FÜR SCHONENDES KATHETERISIEREN



MANFRED SAUER

Neurott 7 – 15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 100 · Fax +49 6226 960 010

info@manfred-sauer.de · www.manfred-sauer.com




DE 2022-03
REF 99.913



4 – 6 × am Tag, 150 × im Monat, 1800 × im Jahr. Etwa so häufig führt eine durchschnittliche Anwenderin des intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) den Katheter durch die Harnröhre in die Blase ein, um sie zu entleeren. Deshalb kommt es auf die Qualität und die Anwendungssicherheit des Katheters an, um Verletzungen von Anfang an vorzubeugen!

DER AUFBAU

Um den Katheter IQ-Cath leicht und schonend in die Harnröhre einführen zu können, ist er in zwei funktionelle Bereiche unterteilt:

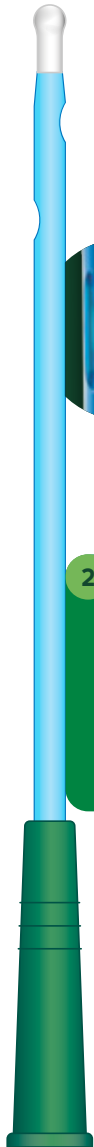

1

KUGELKOPF

Der Kopf des IQ-Cath besteht aus einer weichen Kugel, die auf einem flexiblen Schaft sitzt. Durch diese Kombination kann der Katheter nahezu ungehindert Engstellen, Ausbuchtungen u. ä. passieren.

VERRUNDETE AUGEN

Die Katheteraugen sind verrundet, um Verletzungen der empfindlichen Harnröhrenschleimhaut vorzubeugen.

2

FÜHRUNGSZONE

Dieser Bereich des IQ-Cath, der sich bis zum Konnektor fortsetzt, ist verhältnismäßig starr ausgelegt. Dadurch lässt sich der Katheter gut nachführen.

KONNEKTOR



Der extralange Konnektor (ca. 5 cm) ermöglicht Griffsicherheit und bessere Handhabung.

AUSFÜHRUNG

>> PEELVERPACKUNG

Einfache Handhabung

Greiflöcher ermöglichen ein behutsames, leichtes Aufziehen („peelen“) der Verpackung ohne den Katheter zu berühren.

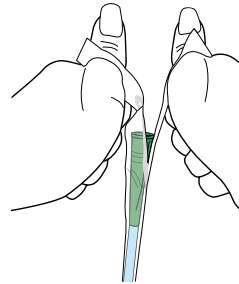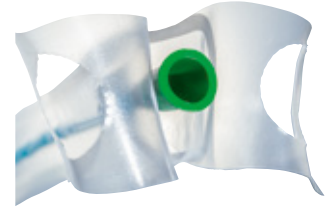

Den Katheter senkrecht nach unten halten und die Peelverpackung am Konnektorende öffnen.

>> Hydrophile Einmalkatheter für Frauen und Mädchen


IQ2902.xx	CH	Best.-Nr.	PZN	HMV-Nr.
-----------	----	-----------	-----	---------

Länge 12 cm, nicht gebrauchsfertig , Peelverpackung, einzeln steril verpackt.	10	IQ2902.10	14137079	15.25.14.6067
	12	IQ2902.12	14137085	15.25.14.6067
	14	IQ2902.14	14137091	15.25.14.6067



IQ2302.xx	CH	Best.-Nr.	PZN	HMV-Nr.
-----------	----	-----------	-----	---------

Länge 12 cm, sofort gebrauchsfertig , Kochsalzlösung 0,9%, aktiviert, Peelverpackung, einzeln steril verpackt	10	IQ2302.10	14136944	15.25.14.7097
	12	IQ2302.12	14136950	15.25.14.7097
	14	IQ2302.14	14136967	15.25.14.7097

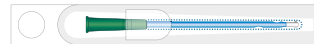

Unsere Produkte sind im Hilfsmittelverzeichnis gelistet und somit von den Krankenkassen anerkannte und erstattungsfähige Hilfsmittel.

Länge des Katheters

Die Angabe bezieht sich auf die (effektive) Länge des Katheters ohne Konnektor.