




Anwendungsbeschreibung – die folgenden Informationen sind kein Ersatz für einen Arztbesuch und das aufmerksame Lesen der Gebrauchsanweisung.

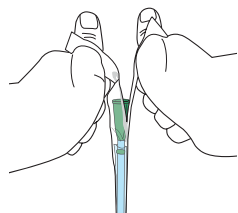

- 1 Den Katheter senkrecht nach unten halten und die Peelverpackung am Konnektorende öffnen.

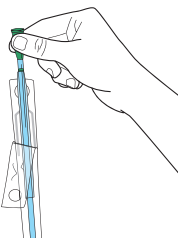


- 2 Den Katheter am Konnektor aus der Peelverpackung nehmen und ggf. mit einem Urin-Auffangbeutel verbinden.

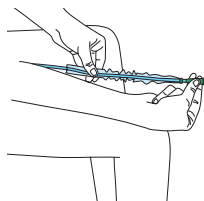

- 3 Den Katheter vorsichtig in die Harnröhre einführen, bis der Urin abläuft. Wenn kein Urin mehr fließt, den Katheter langsam herausziehen.

MANFRED SAUER

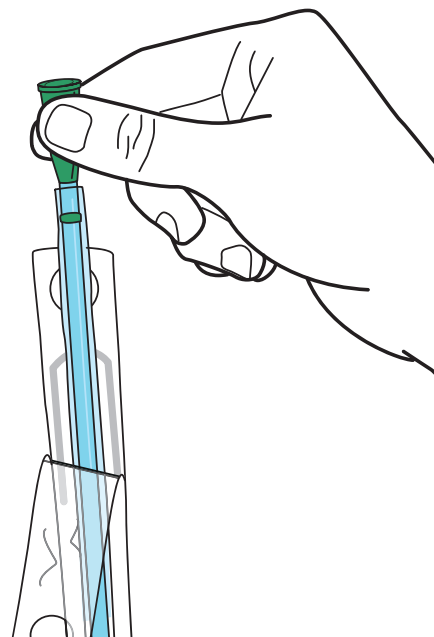

» IQ-CATH – Sleeve

FRAGEN? WIR HELFEN WEITER ...



06226 960 100

Festnetz oder per WhatsApp



info@manfred-sauer.de

» MADE IN GERMANY – Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach

DER
EINMALKATHETER
FÜR
SCHONENDES
KATHETERISIEREN



MANFRED SAUER

Neurott 7 – 15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 100 · Fax +49 6226 960 010

info@manfred-sauer.de · www.manfred-sauer.com



DE 2022-03
REF 99.910



DER AUFBAU

Um den Katheter IQ-Cath leicht und schonend in die Harnröhre einführen zu können, ist er in zwei funktionelle Bereiche unterteilt:



1

KUGELKOPF

Der Kopf des IQ-Cath besteht aus einer weichen Kugel, die auf einem flexiblen Schaft sitzt. Durch diese Kombination kann der Katheter nahezu ungehindert Engstellen, Ausbuchtungen u. ä. passieren.

VERRUNDETE AUGEN

Die Katheteraugen sind verrundet, um Verletzungen der empfindlichen Harnröhrenschleimhaut vorzubeugen.

2

FÜHRUNGSZONE


Dieser Bereich des IQ-Cath, der sich bis zum Konnektor fortsetzt, ist verhältnismäßig starr ausgelegt. Dadurch lässt sich der Katheter gut nachführen.

AUSFÜHRUNG

» PEELVERPACKUNG

Einfache Handhabung

Greiflöcher ermöglichen ein behutsames, leichtes Aufziehen („peelen“) der Verpackung ohne den Katheter zu berühren.

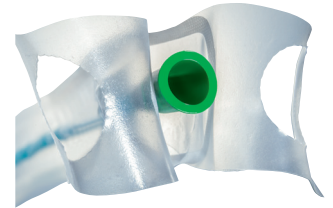

» SLEEVE

Berührungsfreies Einführen

Der Sleeve, eine dünne Folie, umschließt vollkommen den Katheter und gewährleistet ein berührungsfreies Einführen.



» Hydrophile Einmalkatheter mit Sleeve in der Peelverpackung

IQ4304.xx	CH	Best.-Nr.	PZN	HMV-Nr.
Länge 40 cm, sofort gebrauchsfertig , sterile Kochsalzlösung 0,9 % aktiviert, Sleeve (Einführhilfe), Peelverpackung, steril	10	IQ4304.10	14137257	15.25.14.7098
	12	IQ4304.12	14137263	15.25.14.7098
	14	IQ4304.14	14137286	15.25.14.7098
	16	IQ4304.16	14137292	15.25.14.7098
	18	IQ4304.18	14137300	15.25.14.7098

IQ4303.xx	CH	Best.-Nr.	PZN	HMV-Nr.
Länge 30 cm, sofort gebrauchsfertig , sterile Kochsalzlösung 0,9 % aktiviert, Sleeve (Einführhilfe), Peelverpackung, steril	10	IQ4303.10	14137205	15.25.14.7099
	12	IQ4303.12	14137234	15.25.14.7099
	14	IQ4303.14	14137240	15.25.14.7099

Unsere Produkte sind im Hilfsmittelverzeichnis gelistet und somit von den Krankenkassen anerkannte und erstattungsfähige Hilfsmittel.

Länge des Katheters

Die Angabe bezieht sich auf die (effektive) Länge des Katheters ohne Konnektor: 40 cm vorrangig für Männer, 30 cm vorrangig für Jungen,