



MANFRED SAUER

Das Wesentliche – The Essential

» Lösungen bei Inkontinenz | 2026/27


Hauptkatalog



Zeitgemäße Versorgung

bei Blaseninkontinenz ...

- Einmalkatheter
- Urinal-Kondome
- Urin-Beinbeutel
- Funktionsbeutel
- Bettbeutel

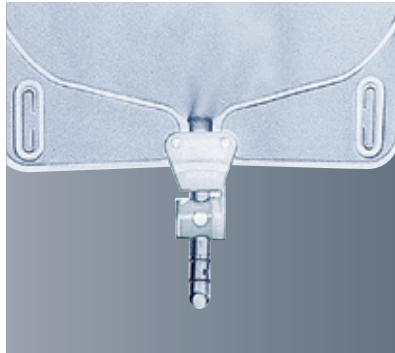

... für Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Bettlägerige

Einmalkatheter für den IK – IQ-Cath	4
Hydrophiler Einmalkatheter	6
- Frauen und Kinder	12
Gel-Einmalkatheter	14
Hilfen für den ISK	18
KIC-System für den ISK	20
Urinal-Kondome	22
Urinal-Kondome – Gebrauchsfertig	24
Selbstklebende Kondome – SAUER-Comfort	24
Selbstklebende Kondome ohne Pufferzone	29
Urinal-Kondome – Nicht gebrauchsfertig	30
Synthetik-Kondome – Anti-Allergen	30
Latex-Kondome	32
Fixierung von Urinal-Kondomen	34
SAUER-Hautkleber	34
Doppelseitige Klebebander	36
Klebeverstärkung	37
Urin-Beinbeutel	38
SAUER-Rollibeutel	42
SAUER-Fußgängerbeutel	50
SAUER-Rechteckbeutel	54
SAUER-Sportbeutel	56
SAUER-Kinderbeutel	58
SAUER-Funktionsbeutel	60
Bettbeutel	62
SAUER-Nephsys	64
Gurtsets Basic & Comfort	65
SAUER-Nephsys Beutel	66
Zubehör für Urin-Beinbeutel	66
Bein- und Haltegurte	68
Befestigung für Urin-Beinbeutel	69
Beinbeutel Taschen	69
Zubehör	70
Faltbare Urinflasche Uribag	72
Informationsmaterial	73
Artikelfinder	74
Latex-Artikel	75
Zertifizierung	75
Stichwortverzeichnis	76
Kundenberatung, Kontakt, Bestellannahme	77
Manfred-Sauer -GmbH und -Stiftung	78

4 – 6 × am Tag, 150 × im Monat, 1800 × im Jahr. Etwa so häufig führt ein durchschnittlicher Anwender des intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) den Katheter durch die Harnröhre in die Blase ein, um sie zu entleeren. Deshalb kommt es auf die Qualität und die Anwendungssicherheit des Katheters an, um Verletzungen von Anfang an vorzubeugen!

IQ-Cath Einmalkatheter

Für den IK (Intermittierender Katheterismus)



Der Katheter IQ-Cath steht, abhängig vom Gleitmedium, in zwei Ausführungen zur Wahl:

- **Hydrophiler Einmalkatheter** – zur Anwendung mit Kochsalzlösung
- **Gel-Einmalkatheter** – zur Anwendung mit Gleitgel

Verpackung

Der Katheter ist einzeln steril verpackt und in drei unterschiedlichen Verpackungsarten erhältlich:

- **Funktionsverpackung** – dient als Einführhilfe und als Verlängerung zum direkten Ablauf des Urins in die Toilette.
- **Peelverpackung** – für einfache Handhabung. Greiflöcher ermöglichen ein behutsames und leichtes Aufziehen („peelen“) der Verpackung.
- **Urin-Auffangbeutel** – praktische Lösung für unterwegs und Unabhängigkeit von einer Toilette.

Katheter in Funktionsverpackung (außer IQ-Cath 30 und 32) oder Urin-Auffangbeutel gibt es speziell für den Klinikbereich mit zusätzlicher Umverpackung.


Gebrauchsart

- Nicht gebrauchsfertig – Der Katheter wird mit einem geeignetem Gleitmittel gebrauchsfertig gemacht.
- Gebrauchsfertig – Das Gleitmittel ist integriert, damit kann der Katheter nach wenigen Handgriffen benutzt werden.
- Sofort gebrauchsfertig – Der Katheter ist mit dem Gleitmittel bereits aktiviert und kann ohne Verzögerung benutzt werden.



Beratung | Haben Sie Fragen zum Einmalkatheter IQ-Cath? Wir beraten Sie gerne ausführlich. Wenden Sie sich bitte an unsere Kundenberatung | Seite 77.

iQ CATH

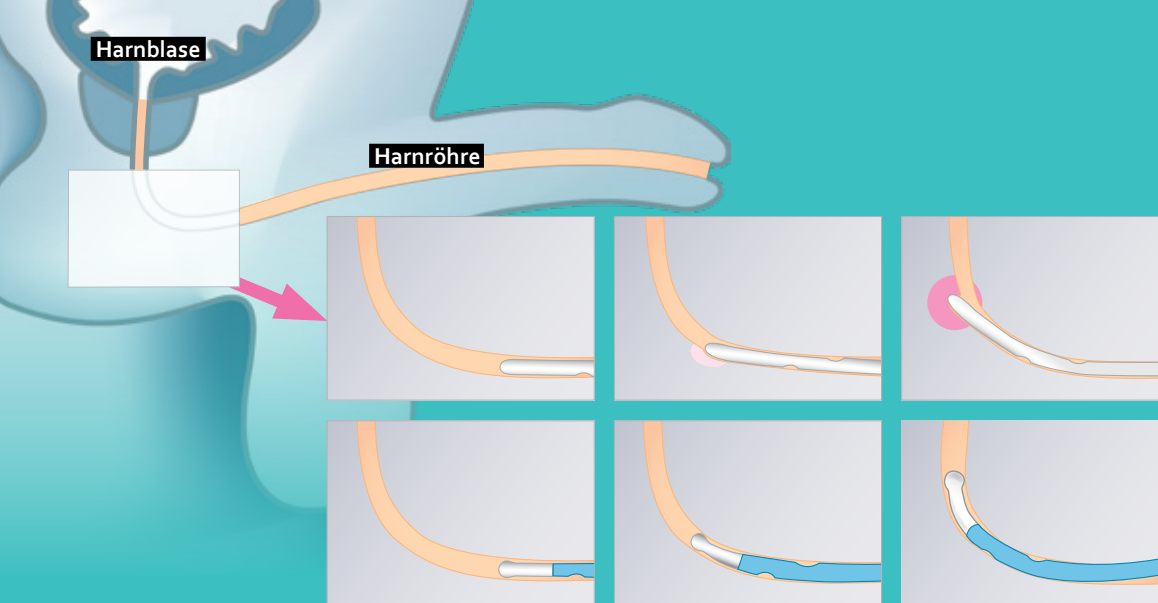

Ein herkömmlicher Katheter kann an Problemstellen in der Harnröhre Verletzungen verursachen (zum Beispiel Ausbuchtungen in der Harnröhre).

Der von der Manfred Sauer GmbH entwickelte Kugelkopf des IQ-Cath sorgt für ein schonendes Katheterisieren.

Die Funktionsverpackung

Berührungsfreie Handhabung des IQ-Cath

Die Funktionsverpackung bietet mehrere Möglichkeiten den Katheter ohne direkten Kontakt in die Harnröhre einzuführen. Sie verfügt über verschiedene Reißmarken, die eine individuelle Nutzung als Einführhilfe ermöglichen, d. h. der Anwender bestimmt selbst die Länge und die Einführmöglichkeit des Katheters.


Dafür gibt es u. a. mehrere Möglichkeiten:

- Funktionsverpackung als „kurze Einführhilfe“
- Funktionsverpackung zur direkten Ableitung in die Toilette
- Funktionsverpackung als „lange Einführhilfe“

Für die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten wurden Filme von Betroffenen für Betroffene erstellt. Die Filme sollen helfen, die für Sie beste Handhabung des IQ-Cath beim intermittierenden Katheterismus zu finden. Die Filme finden Sie auf unserer Homepage unter: www.manfred-sauer.com



Beispiel für die Funktionsverpackung als „kurze Einführhilfe“

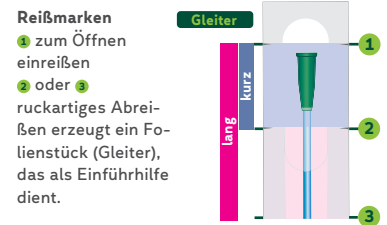

Wichtiger Hinweis:

Die auf den Folgeseiten illustrierten Anwendungsbeschreibungen sind kein Ersatz für einen Arztbesuch und das aufmerksame Lesen der Gebrauchsanweisung.

FRAGEN? WIR HELFEN WEITER ...



+49 6226 960100

Festnetz oder per WhatsApp



100 % Prüfung:

Um dem Anwender eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten, werden alle Katheter einzeln geprüft.




1 SAUER-Kugelkopf

Der Kopf des IQ-Cath besteht aus einer weichen Kugel, die auf einem flexiblen Schaft sitzt. Durch diese Kombination kann der Katheter nahezu ungehindert Engstellen, Ausbuchtungen u. ä. passieren.



2 Führungszone

Dieser Bereich des IQ-Cath, der sich bis zum Konnektor fortsetzt, ist verhältnismäßig starr ausgelegt. Dadurch lässt sich der Katheter gut nachführen.

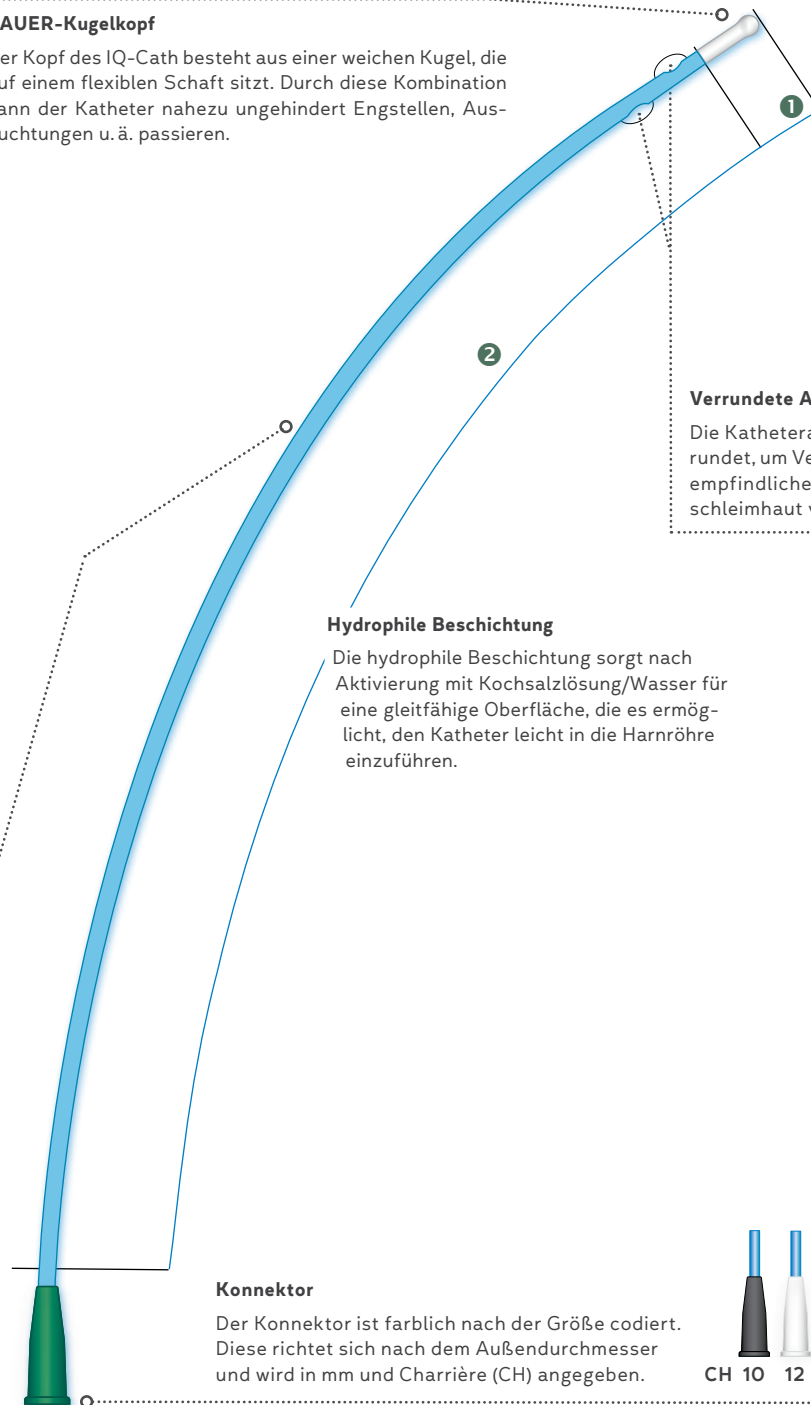

Verrundete Augen

Die Katheteraugen sind verrundet, um Verletzungen der empfindlichen Harnröhrenschleimhaut vorzubeugen.




Hydrophile Beschichtung

Die hydrophile Beschichtung sorgt nach Aktivierung mit Kochsalzlösung/Wasser für eine gleitfähige Oberfläche, die es ermöglicht, den Katheter leicht in die Harnröhre einzuführen.

Konnektor

Der Konnektor ist farblich nach der Größe codiert. Diese richtet sich nach dem Außendurchmesser und wird in mm und Charrière (CH) angegeben.

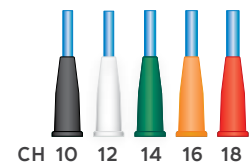

Der Katheter mit 2 funktionellen Zonen


Um den Katheter IQ-Cath leicht und schonend in die Harnröhre einführen zu können, ist er in zwei funktionelle Bereiche unterteilt.

IQ-Cath 2004 | Länge 40 cm***IQ-Cath 2014 | Länge 40 cm***

Hydrophiler Einmalkatheter




CH	mm	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
● 10	3,3	IQ2004.10	06831601	15.25.14.6002	–	–	–
○ 12	4,0	IQ2004.12	06873775	15.25.14.6002	IQ 2014.12	06874415	15.25.14.6002
● 14	4,7	IQ2004.14	06873812	15.25.14.6002	IQ 2014.14	06875099	15.25.14.6002
● 16	5,3	IQ2004.16	06874208	15.25.14.6002	–	–	–
Größe		ohne Umverpackung			mit Umverpackung		

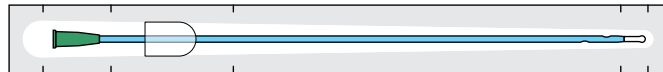


Variable Anwendung
 Funktionsverpackung

Nicht gebrauchsfertig. Funktionsverpackung für variable Anwendung. Einzeln steril verpackt, zum Teil auch mit Umverpackung erhältlich.


Menge: 30 Stück

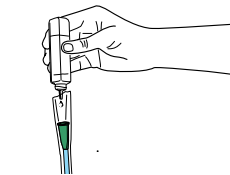


Kochsalzlösung 0,9 %
einfüllen.

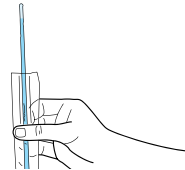

Funktionsverpackung
vorne einreißen.

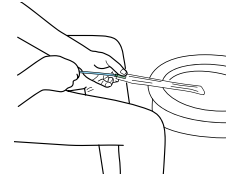

Direkter Ablauf in die Toilette
mit der Funktionsverpackung.

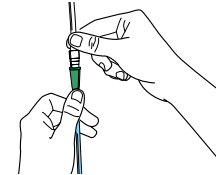


Katheter mit einem Urin-Auffang-
beutel verbinden.

IQ-Cath 2104 | Länge 40 cm***IQ-Cath 2114 | Länge 40 cm***

Hydrophiler Einmalkatheter




CH	mm	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
● 10	3,3	IQ2104.10	06831570	15.25.14.7021	IQ 2114.10	06831564	15.25.14.7016
○ 12	4,0	IQ2104.12	01899014	15.25.14.7021	IQ 2114.12	01054245	15.25.14.7016
● 14	4,7	IQ2104.14	01899020	15.25.14.7021	IQ 2114.14	01054251	15.25.14.7016
● 16	5,3	IQ2104.16	01899066	15.25.14.7021	IQ 2114.16	01054268	15.25.14.7016
● 18	6,0	IQ2104.18	05519043	15.25.14.7021	IQ 2114.18	05519066	15.25.14.7016
Größe		ohne Umverpackung			mit Umverpackung		

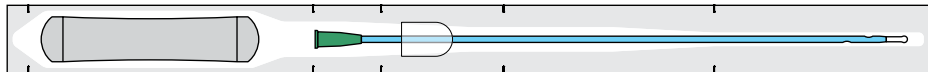


Gebrauchsfertig. Kochsalzlösung 0,9 % integriert. Funktionsverpackung für variable Anwendung. Einzeln steril verpackt, auch mit Umverpackung erhältlich.


Menge: 30 Stück

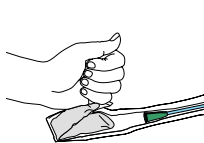

Wasserballon durch Knicken
öffnen und Inhalt in die Funkti-
onsverpackung entleeren.

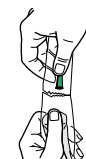

Funktionsverpackung vorne
einreißen und ruckartig ab-
trennen.

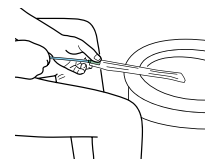

Funktionsverpackung kann als
Verlängerung zum direkten Ablauf
in die Toilette.

Variable Anwendung
 Funktionsverpackung

* Länge ohne Konnektor




1 SAUER-Kugelkopf

Der Kopf des IQ-Cath besteht aus einer weichen Kugel, die auf einem flexiblen Schaft sitzt. Durch diese Kombination kann der Katheter nahezu ungehindert Engstellen, Ausbuchtungen u. ä. passieren.



2 Führungszone

Dieser Bereich des IQ-Cath, der sich bis zum Konnektor fortsetzt, ist verhältnismäßig starr ausgelegt. Dadurch lässt sich der Katheter gut nachführen.

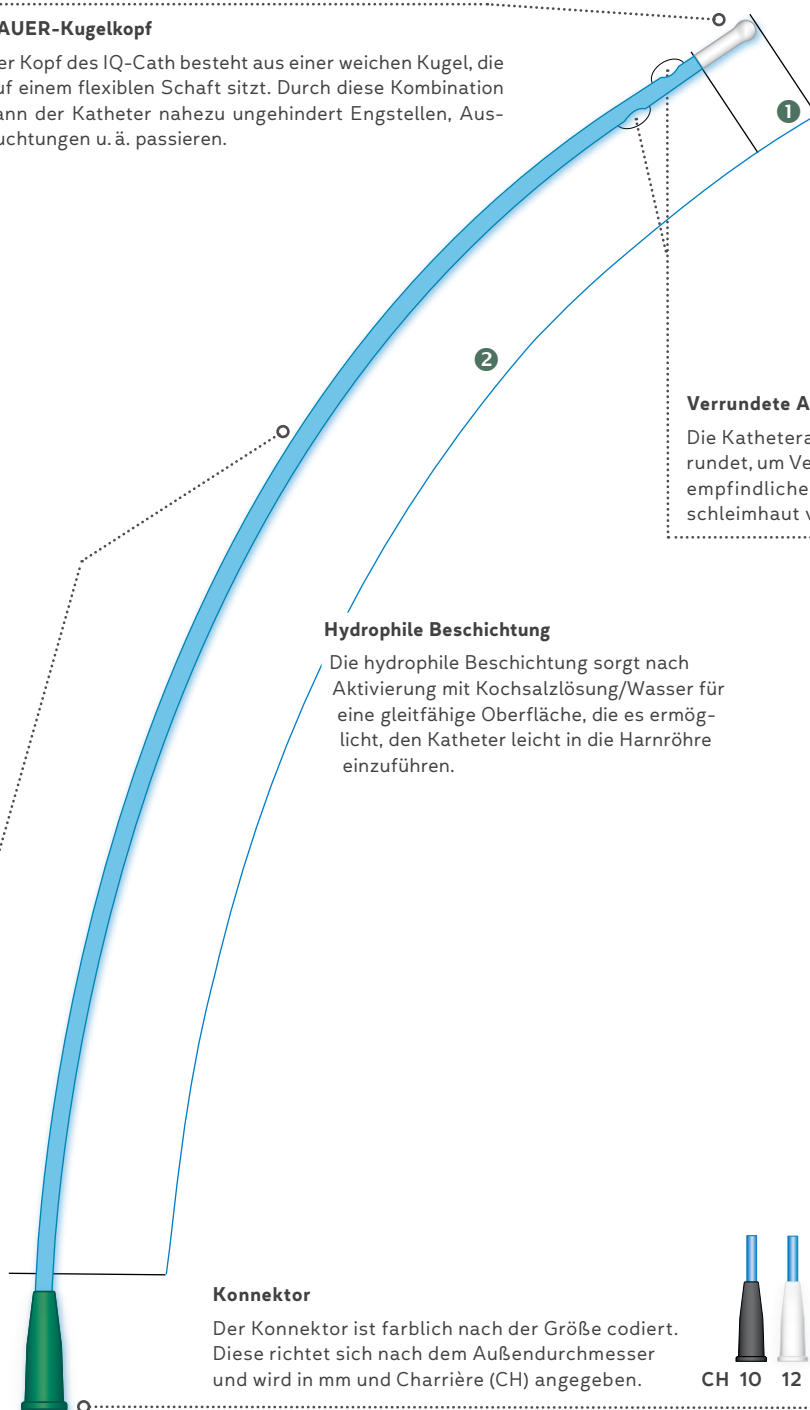

Verrundete Augen

Die Katheteraugen sind verrundet, um Verletzungen der empfindlichen Harnröhrenschleimhaut vorzubeugen.



Hydrophile Beschichtung

Die hydrophile Beschichtung sorgt nach Aktivierung mit Kochsalzlösung/Wasser für eine gleitfähige Oberfläche, die es ermöglicht, den Katheter leicht in die Harnröhre einzuführen.

Konnektor

Der Konnektor ist farblich nach der Größe codiert. Diese richtet sich nach dem Außendurchmesser und wird in mm und Charrière (CH) angegeben.



Der Katheter mit 2 funktionellen Zonen

Um den Katheter IQ-Cath leicht und schonend in die Harnröhre einführen zu können, ist er in zwei funktionelle Bereiche unterteilt.

IQ-Cath 2304 | Länge 40 cm*

Hydrophiler Einmalkatheter

Sofort gebrauchsfertig, mit Kochsalzlösung 0,9% aktiviert. Peelverpackung für einfache Handhabung. Einzeln steril verpackt.

Menge: 30 Stück

CH	mm	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
● 10	3,3	IQ2304.10	14137010	15.25.14.7095	—	—	—
○ 12	4,0	IQ2304.12	14137027	15.25.14.7095	—	—	—
● 14	4,7	IQ2304.14	14137033	15.25.14.7095	—	—	—
● 16	5,3	IQ2304.16	14137056	15.25.14.7095	—	—	—
● 18	6,0	IQ2304.18	14137062	15.25.14.7095	—	—	—
Größe		ohne Umverpackung			mit Umverpackung		



Einfache Anwendung
Peel-Verpackung

IQ-Cath 2904 | Länge 40 cm*

Hydrophiler Einmalkatheter

Nicht gebrauchsfertig.

Peelverpackung für einfache Handhabung. Einzeln steril verpackt.

Menge: 30 Stück

CH	mm	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
● 10	3,3	IQ2904.10	14137145	15.25.14.6065	—	—	—
○ 12	4,0	IQ2904.12	14137151	15.25.14.6065	—	—	—
● 14	4,7	IQ2904.14	14137168	15.25.14.6065	—	—	—
● 16	5,3	IQ2904.16	14137180	15.25.14.6065	—	—	—
● 18	6,0	IQ2904.18	14137197	15.25.14.6065	—	—	—
Größe		ohne Umverpackung			mit Umverpackung		



Einfache Anwendung
Peel-Verpackung


IQ-Cath 2604 | Länge 40 cm***IQ-Cath 2614 | Länge 40 cm***

Hydrophiler Einmalkatheter

Gebrauchsfertig. Kochsalzlösung 0,9% integriert. Urin-Auffangbeutel 1 Liter. Einzeln steril verpackt, zum Teil auch mit Umverpackung erhältlich.

Menge: 30 Stück

CH	mm	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
○ 12	4,0	IQ2604.12	06875366	15.25.14.9021	IQ 2614.12	06875857	15.25.14.9015
● 14	4,7	IQ2604.14	06875490	15.25.14.9021	IQ 2614.14	06876058	15.25.14.9015
● 16	5,3	IQ2604.16	06875797	15.25.14.9021	IQ 2614.16	06876070	15.25.14.9015
● 18	6,0	IQ2604.18	06427745	15.25.14.9021	—	—	—
Größe		ohne Umverpackung			mit Umverpackung		

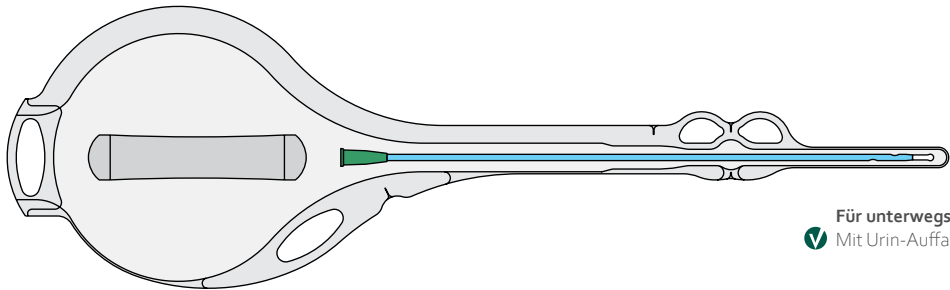


Für unterwegs
Mit Urin-Auffangbeutel




Wasserkissen durch Knicken und Drücken öffnen.



Gesamten Inhalt entleeren.

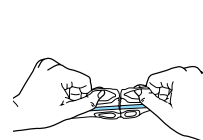

Urinauffangbeutel vorne ruckartig öffnen, Katheterkopf freilegen.

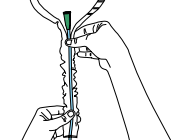

Den Katheter berührungsfrei einführen.

* Länge ohne Konnektor




1 SAUER-Kugelkopf

Der Kopf des IQ-Cath besteht aus einer weichen Kugel, die auf einem flexiblen Schaft sitzt. Durch diese Kombination kann der Katheter nahezu ungehindert Engstellen, Ausbuchtungen u. ä. passieren.



2 Führungszone

Dieser Bereich des IQ-Cath, der sich bis zum Konnektor fortsetzt, ist verhältnismäßig starr ausgelegt. Dadurch lässt sich der Katheter gut nachführen.

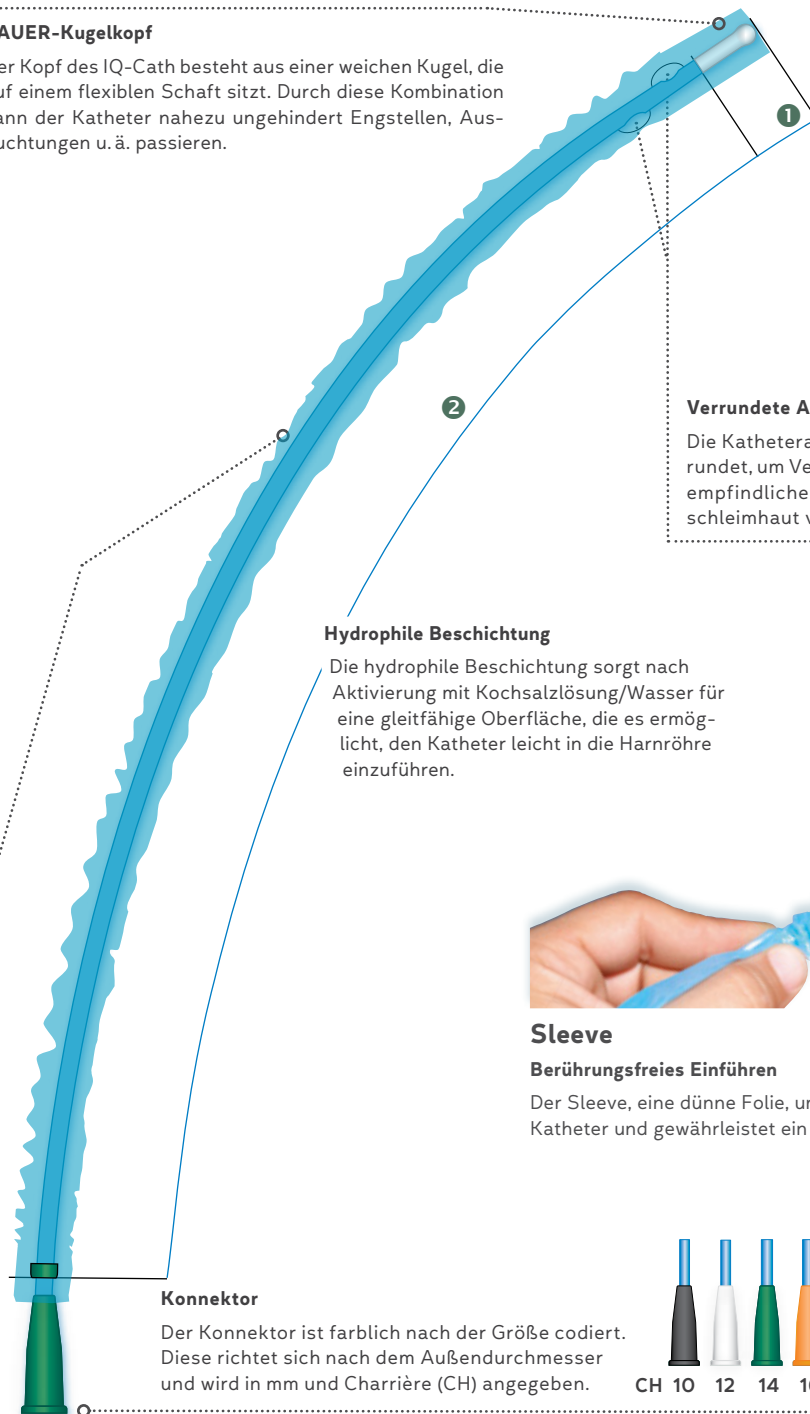

Verrundete Augen

Die Katheteraugen sind verrundet, um Verletzungen der empfindlichen Harnröhrenschleimhaut vorzubeugen.

Hydrophile Beschichtung

Die hydrophile Beschichtung sorgt nach Aktivierung mit Kochsalzlösung/Wasser für eine gleitfähige Oberfläche, die es ermöglicht, den Katheter leicht in die Harnröhre einzuführen.




Sleeve

Berührungsfreies Einführen

Der Sleeve, eine dünne Folie, umschließt vollkommen den Katheter und gewährleistet ein berührungsfreies Einführen.

Konnektor

Der Konnektor ist farblich nach der Größe codiert. Diese richtet sich nach dem Außendurchmesser und wird in mm und Charrière (CH) angegeben.

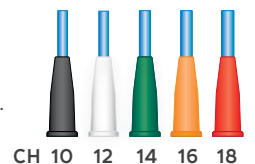

Der Katheter mit 2 funktionellen Zonen

Um den Katheter IQ-Cath leicht und schonend in die Harnröhre einführen zu können, ist er in zwei funktionelle Bereiche unterteilt.

IQ-Cath 4304 | Länge 40 cm*

Hydrophiler Einmalkatheter



Berührungsfreies Einführen

Sofort gebrauchsfertig, mit Kochsalzlösung 0,9% aktiviert. Peelverpackung für einfache Handhabung. Sleeve für berührungsfreies Einführen. Einzeln steril verpackt.

Menge: 30 Stück

CH	mm	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
● 10	3,3	IQ4304.10	14137257	15.25.14.7098	—	—	—
○ 12	4,0	IQ4304.12	14137263	15.25.14.7098	—	—	—
● 14	4,7	IQ4304.14	14137286	15.25.14.7098	—	—	—
● 16	5,3	IQ4304.16	14137292	15.25.14.7098	—	—	—
● 18	6,0	IQ4304.18	14137300	15.25.14.7098	—	—	—

Größe


ohne Umverpackung

mit Umverpackung




Berührungsfreies Einführen mit Sleeve


Einfache Anwendung Peel-Verpackung

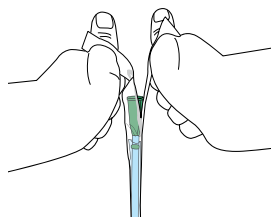

Peelverpackung am Konnektorende öffnen.

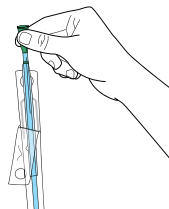

Katheter am Konnektor aus der Peelverpackung nehmen.

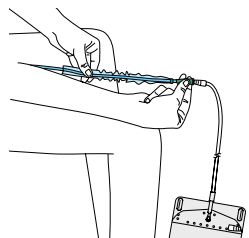

Den Katheter einführen, bis der Urin abläuft.


* Länge ohne Konnektor

Für Frauen und Kinder

SAUER-Kugelpfopf

Beim Katheter für Frauen ist der Schaft des Kugelpfopfes wegen der besseren Führbarkeit kürzer.

Verrundete Augen:


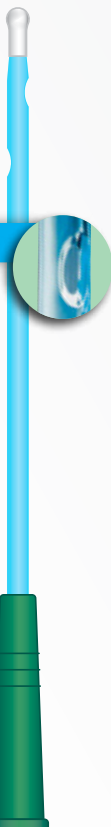


Konnektor

Der extralange Konnektor beim Frauen- und Mädchenkatheter (ca. 5 cm) ermöglicht Griffsicherheit und bessere Handhabung.


Peelverpackung – Anwendungstipp

Den Katheter senkrecht nach unten halten und die Peelverpackung am Konnektorende öffnen.

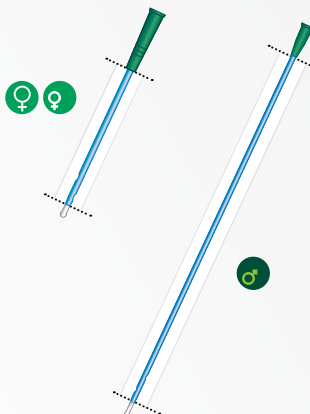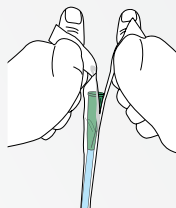

Führungszonen

Die Abbildung zeigt die unterschiedlichen Längen und Lage der Führungszonen (farbig hinterlegt).

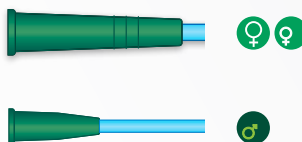

Peelverpackung Einfache Handhabung

Greiflöcher ermöglichen ein behutsames, leichtes Aufziehen („peelen“) der Verpackung ohne den Katheter zu berühren.



Sleeve

Berührungsfreies Einführen

Der Sleeve, eine dünne Folie, umschließt vollkommen den Katheter und gewährleistet ein berührungsfreies Einführen.

IQ-Cath 2302 | Länge 12 cm*

Hydrophiler Einmalkatheter



CH	mm	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
● 10	3,3	IQ2302.10	14136944	15.25.14.7097	—	—	—
○ 12	4,0	IQ2302.12	14136950	15.25.14.7097	—	—	—
● 14	4,7	IQ2302.14	14136967	15.25.14.7097	—	—	—


Größe

ohne Umverpackung

mit Umverpackung

Sofort gebrauchsfertig, mit Kochsalzlösung 0,9% aktiviert. Peelverpackung für einfache Handhabung. Einzeln steril verpackt.

Menge: 30 Stück

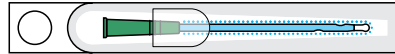

Einfache Anwendung
 Peel-Verpackung

IQ-Cath 2303 | Länge 30 cm*

Hydrophiler Einmalkatheter



CH	mm	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
● 10	3,3	IQ2303.10	14136973	15.25.14.7096	—	—	—
○ 12	4,0	IQ2303.12	14136996	15.25.14.7096	—	—	—
● 14	4,7	IQ2303.14	14137004	15.25.14.7096	—	—	—

Größe

ohne Umverpackung

mit Umverpackung

Sofort gebrauchsfertig, mit Kochsalzlösung 0,9% aktiviert. Peelverpackung für einfache Handhabung. Einzeln steril verpackt.

Menge: 30 Stück



Einfache Anwendung
 Peel-Verpackung

IQ-Cath 2902 | Länge 12 cm*

Hydrophiler Einmalkatheter



CH	mm	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
● 10	3,3	IQ2902.10	14137079	15.25.14.6067	—	—	—
○ 12	4,0	IQ2902.12	14137085	15.25.14.6067	—	—	—
● 14	4,7	IQ2902.14	14137091	15.25.14.6067	—	—	—


Größe

ohne Umverpackung

mit Umverpackung

Nicht gebrauchsfertig. Peelverpackung für einfache Handhabung. Einzeln steril verpackt.

Menge: 30 Stück

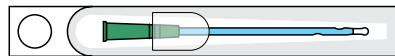

Einfache Anwendung
 Peel-Verpackung

IQ-Cath 4303 | Länge 30 cm*

Hydrophiler Einmalkatheter



CH	mm	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
● 10	3,3	IQ4303.10	14137205	15.25.14.7099	—	—	—
○ 12	4,0	IQ4303.12	14137234	15.25.14.7099	—	—	—
● 14	4,7	IQ4303.14	14137240	15.25.14.7099	—	—	—

Größe

ohne Umverpackung

mit Umverpackung

Sofort gebrauchsfertig, mit Kochsalzlösung 0,9% aktiviert. Peelverpackung für einfache Handhabung. Sleeve für berührungsloses Einführen. Einzeln steril verpackt.

Menge: 30 Stück



Berührungsloses Einführen mit Sleeve

Einfache Anwendung
 Peel-Verpackung

* Länge ohne Konnektor



1 SAUER-Kugelkopf

Der Kopf des IQ-Cath besteht aus einer weichen Kugel, die auf einem flexiblen Schaft sitzt. Durch diese Kombination kann der Katheter nahezu ungehindert Engstellen, Ausbuchtungen u. ä. passieren.



2 Führungszone

Dieser Bereich des IQ-Cath, der sich bis zum Konnektor fortsetzt, ist verhältnismäßig starr ausgelegt. Dadurch lässt sich der Katheter gut nachführen.



Verrundete Augen


Die Katheteraugen sind verrundet, um Verletzungen der empfindlichen Harnröhrenschleimhaut vorzubeugen.

Gel

Eine funktionelle Beschichtung sorgt dafür, dass das Gleitgel besser am Katheter haftet und der komplette Katheter mit Gel bedeckt ist. Das Gleitgel sorgt für eine gleitfähige Oberfläche, die es ermöglicht, den Katheter leicht in die Harnröhre einzuführen.

Konnektor

Der Konnektor ist farblich nach der Größe codiert. Diese richtet sich nach dem Außendurchmesser und wird in mm und Charrière (CH) angegeben.

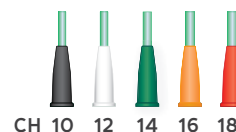

Der Katheter mit 2 funktionellen Zonen

Um den Katheter IQ-Cath leicht und schonend in die Harnröhre einführen zu können, ist er in zwei funktionelle Bereiche unterteilt.

IQ-Cath 3004 | Länge 40 cm*

Gel-Einmalkatheter



CH	mm	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
○ 12	4,0	IQ3004.12	06876242	15.25.14.4002	—	—	—
● 14	4,7	IQ3004.14	06876288	15.25.14.4002	—	—	—
● 16	5,3	IQ3004.16	06876294	15.25.14.4002	—	—	—


Größe

ohne Umverpackung

mit Umverpackung

Nicht gebrauchsfertig. Funktionsverpackung für variable Anwendung. Einzeln steril verpackt.

Menge: 30 Stück

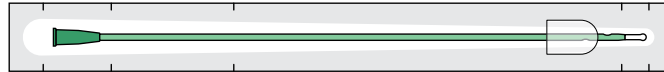

Variable Anwendung
 Funktionsverpackung

IQ-Cath 3104 | Länge 40 cm*

IQ-Cath 3114 | Länge 40 cm*

Gel-Einmalkatheter



CH	mm	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
● 10	3,3	IQ3104.10	18782629	15.25.14.5055	—	—	—
○ 12	4,0	IQ3104.12	01899089	15.25.14.5055	IQ3114.12	01899149	15.25.14.5056
● 14	4,7	IQ3104.14	01899126	15.25.14.5055	IQ3114.14	01899161	15.25.14.5056
● 16	5,3	IQ3104.16	01899132	15.25.14.5055	IQ3114.16	01900384	15.25.14.5056


Größe

ohne Umverpackung


mit Umverpackung

Gebrauchsfertig. Gleitgel integriert. Funktionsverpackung für variable Anwendung. Einzeln steril verpackt, auch mit Umverpackung erhältlich.


Menge: 30 Stück

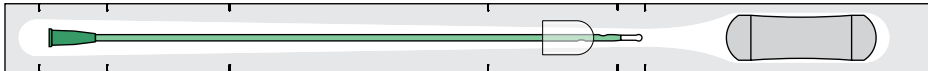


Variable Anwendung
 Funktionsverpackung

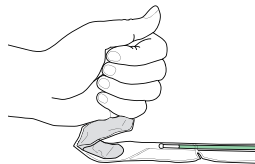


Gelkissen durch Knicken und Drücken öffnen.

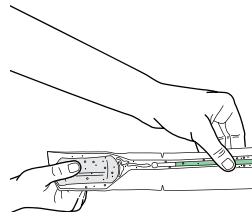

Gleitgel in die Funktionsverpackung füllen und durch Verstreichen auf dem gesamten Katheter verteilen.

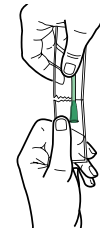

Die Funktionsverpackung am hinteren Ende ruckartig öffnen.

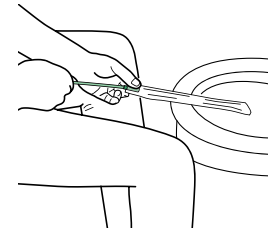

Die Funktionsverpackung kann als Verlängerung zum direkten Ablauf des Urins in die Toilette verwendet werden. Dazu den Katheter so weit nach vorne schieben, bis der Konnektor abdichtet.

* Länge ohne Konnektor



1 SAUER-Kugelkopf

Der Kopf des IQ-Cath besteht aus einer weichen Kugel, die auf einem flexiblen Schaft sitzt. Durch diese Kombination kann der Katheter nahezu ungehindert Engstellen, Ausbuchtungen u. ä. passieren.



2 Führungszone

Dieser Bereich des IQ-Cath, der sich bis zum Konnektor fortsetzt, ist verhältnismäßig starr ausgelegt. Dadurch lässt sich der Katheter gut nachführen.



Verrundete Augen


Die Katheteraugen sind verrundet, um Verletzungen der empfindlichen Harnröhrenschleimhaut vorzubeugen.

Gel

Eine funktionelle Beschichtung sorgt dafür, dass das Gleitgel besser am Katheter haftet und der komplette Katheter mit Gel bedeckt ist. Das Gleitgel sorgt für eine gleitfähige Oberfläche, die es ermöglicht, den Katheter leicht in die Harnröhre einzuführen.

Konnektor

Der Konnektor ist farblich nach der Größe codiert. Diese richtet sich nach dem Außendurchmesser und wird in mm und Charrière (CH) angegeben.

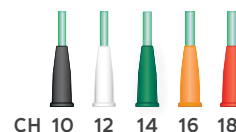

Der Katheter mit 2 funktionellen Zonen

Um den Katheter IQ-Cath leicht und schonend in die Harnröhre einführen zu können, ist er in zwei funktionelle Bereiche unterteilt.

IQ-Cath 3204 | Länge 40 cm*

Gel-Einmalkatheter


Sofort gebrauchsfertig, vorgegellt.
Funktionsverpackung für variable
Anwendung. Einzeln steril verpackt.

Menge: 30 Stück


CH	mm	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
● 10	3,3	IQ3204.10	09943654	15.25.14.5072	–	–	–
○ 12	4,0	IQ3204.12	09943660	15.25.14.5072	–	–	–
● 14	4,7	IQ3204.14	09943677	15.25.14.5072	–	–	–
● 16	5,3	IQ3204.16	09943708	15.25.14.5072	–	–	–
● 18	6,0	IQ3204.18	09943720	15.25.14.5072	–	–	–
Größe		ohne Umverpackung			mit Umverpackung		




Variable Anwendung
Funktionsverpackung

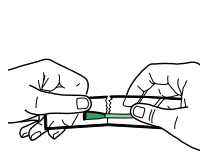


Funktionsverpackung an der
Reißmarke am Konnektor ruck-
artig abreißen.

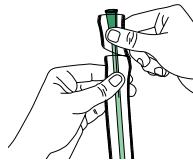

An der folgenden Reißmarke die Funk-
tionsverpackung ruckartig abreißen,
sodass ein 5 cm langes Folienstück
(Gleiter) als Einführhilfe übrig bleibt.

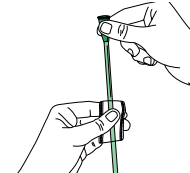

Den Gleiter zum Kugelkopf
schieben ...

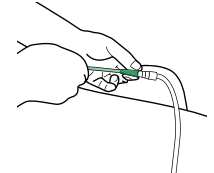

... und so den Katheter sicher
und berührungsfrei einführen.


IQ-Cath 3604 | Länge 40 cm***IQ-Cath 3614 | Länge 40 cm***

Gel-Einmalkatheter


Gebrauchsfertig. Gleitgel integriert.
Urin-Auffangbeutel 1 Liter. Einzeln
steril verpackt, zum Teil auch mit Um-
verpackung erhältlich.

Menge: 30 Stück


CH	mm	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
○ 12	4,0	IQ3604.12	06877810	15.25.14.8028	IQ3614.12	06878264	15.25.14.8029
● 14	4,7	IQ3604.14	06877879	15.25.14.8028	IQ3614.14	06878330	15.25.14.8029
● 16	5,3	IQ3604.16	06877885	15.25.14.8028	–	–	–
Größe		ohne Umverpackung			mit Umverpackung		

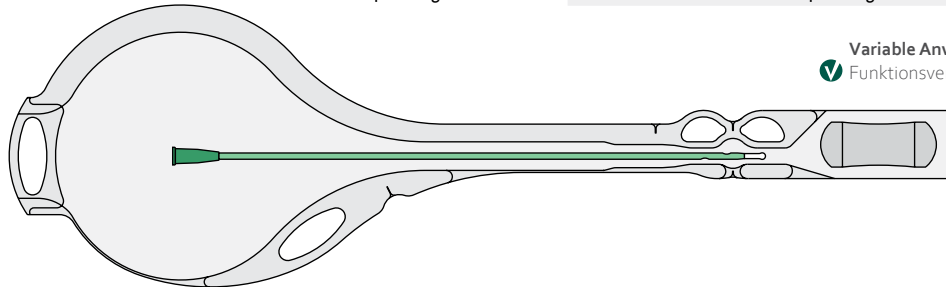


Variable Anwendung
Funktionsverpackung

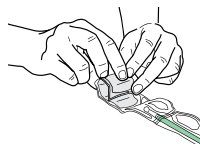


Das Gelkissen durch Knicken und
Drücken öffnen. Den gesamten
Inhalt entleeren.

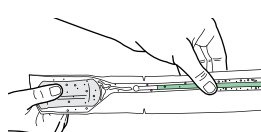

Das Gleitgel durch Verstreichen auf dem
gesamten Katheter (außer Konnektor)
verteilen.

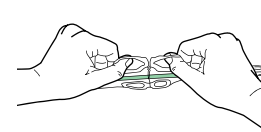

Urinauffangbeutel vorne ruckartig
öffnen, Katheterkopf freilegen.

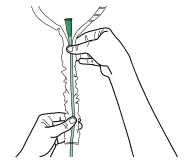

Den Katheter berührungsfrei
einführen.

* Länge ohne Konnektor



Hilfen für den ISK

Die Entwicklung dieser Hilfsmittel fand in enger Zusammenarbeit mit Betroffenen (Tetraplegikern und Paraplegikern) und Ergotherapeuten statt. Ziel dabei war, die selbstständige Durchführung des ISK (Intermittierender Selbstkatheterismus) zu ermöglichen bzw. zu erleichtern, besonders für Anwender mit eingeschränkter Handfunktion (Tetra C 7, C 5/6). Gleichzeitig sollten die hygienischen Bedingungen verbessert und damit das Infektrisiko beim Katheterisieren verringert werden.



Beratung | Haben Sie Fragen zum Einmalkatheter IQ-Cath? Wir beraten Sie gerne ausführlich. Wenden Sie sich bitte an unsere Kundenberatung | **Seite 77.**

Die Hilfsmittel sind entsprechend ihrer Eignung gekennzeichnet: ♀ = für Frauen, ♂ = für Männer.

Knie-Spreiz-Kissen ♀

Einfach zu transportierendes, aufblasbares Kissen zum Spreizen und Fixieren der Knie. An den Ecken befinden sich Ösen zur Befestigung am Oberschenkel. Aus transparenter Folie, auch zum Duschen geeignet. Für den ISK kann zusätzlich ein Spiegel (muss separat bestellt werden) mit einem Klettband angebracht werden.

Reinigung: Wasser bzw. Seifenlauge, geeignetes Desinfektionsmittel, keine Dampfsterilisation.

Knie-Spreiz-Kissen – 30 cm breit


Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
1 St.	110.02	–	15.99.99.0011

Spiegel (Durchmesser 12 cm) mit Klettband

1 St.	110.33	–	15.99.99.0004
-------	--------	---	---------------



110.02 Knie-Spreiz-Kissen
110.33 Spiegel mit Klettband

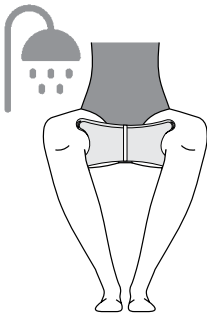

Ableitungsset ♀ ♂

Schlauch zur Verlängerung des Katheters für ein sauberes Ableiten des Urins in die Toilette. Mit gestuftem Adapter zur Verbindung mit dem Konnektor des Katheters und Saugnapf zur Befestigung des Schlauches auf der Toilettenbrille. Schlauchlänge 70 cm.

Reinigung: klares Wasser, geeignetes Desinfektionsmittel.

Schlauch mit gestuftem Adapter und Saugnapf

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
1 St.	110.65	–	15.99.99.0003

Ersatzschlauch mit gestuftem Adapter (o. Abb.)

5 St.	110.66	–	15.99.99.0003
-------	--------	---	---------------

110.65



Das KIC-System haben wir für Personen entwickelt, die mehrfach am Tag die Blase mit einem Katheter entleeren (ISK), zwischendurch aber nicht kontinent sind und deshalb ein Kondom-Urinal tragen. Das hat zur Folge, nach jedem Katheterisieren ein neues Kondom ankleben zu müssen, was zu einer zusätzlichen Belastung der Haut führen kann.

KIC-System

Die Kombination von Kondom-Urinal und ISK



Beim KIC-System dient anstelle des Kondom-Schlauchansatzes eine abnehmbare Kupplung als Verbindung zu einem Urin-Bein- oder -Bettbeutel. Diese Kupplung kann abgenommen und das Kondom – mit dem Spreizring geweitet – über den Penischaft zurückgeführt werden, so dass die Penisspitze zum Desinfizieren und Katheterisieren frei liegt. Danach wird das Kondom wieder in die ursprüngliche Position geführt und an das bestehende Ableitungssystem gekoppelt. Dieser Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen.

Mit dem KIC-System muss pro Tag nur ein Kondom angelegt werden – das schont die Haut und ist außerdem kostengünstiger!

KIC-Spreizring: Zum Dehnen der Öffnung von KIC-Kondomen, damit die Penisspitze frei liegt zum Einführen eines Katheters.

KIC-Kondome: Mit gestanzter Öffnung, die sich sehr weit dehnen lässt und wieder vollständig in die ursprüngliche Form zurückgeht. Diese Latex-Kondome gibt es in den Ausführungen „Original“ in 6 Größen und „Extradünn“ in 2 Größen.

KIC-Kupplung: Ersetzt den sonst üblichen Schlauchansatz des Kondoms. Diese Kupplung kann vom Kondom abgenommen werden. Nur so ist es möglich, das Kondom mit dem Spreizring über die Penisspitze zurückzuführen.

Reinigung und Desinfizierung: KIC-Spreizring und KIC-Kupplung können problemlos mit einem geeignetem Desinfektionsmittel behandelt werden. Dabei ist die Anweisung des Desinfektionsmittel-Herstellers zu beachten.

Für die Anwendung des KIC-Systems benötigen Sie:

- KIC-Spreizring
- KIC-Kondome mit KIC-Kupplungen
- Hautkleber oder doppelseitige Klebebänder




1 Einlaufschlauch des Urinbeutels mittels KIC-Kupplung vom Kondom trennen.



2 Zähnchen des KIC-Spreizringes in die Kondomöffnung einführen.



3 Kondom spreizen ...

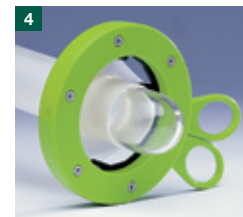

4 ... und nach hinten führen. Die Penisspitze liegt frei, so kann leicht desinfiziert und katheterisiert werden.



100.01

103.24
⋮
103.35103.30.D
⋮
103.35.D

100.05



55.38

KIC-Spreizring

Zum Dehnen der Öffnung von KIC-Kondomen. Aus pflegeleichtem Kunststoff.

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
1 St.	100.01	08812341	15.99.99.0001

KIC-Kondome – Original

Ohne Schlauchansatz, mit gestanzter Öffnung zum Einsetzen der KIC-Kupplung, sonst identisch mit den Latex-Kondomen „Original“ | Seite 33. Fixierung mit Hautkleber oder doppelseitigem Klebeband | Seite 35, 36. 10 KIC-Kupplungen 100.05 und 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegen bei.

Länge 165 mm, 6 Größen (Ø mm).

Größe	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
24 mm	30 St.	103.24	00591509	15.25.04.8001
26 mm	30 St.	103.26	00591515	15.25.04.8001
28 mm	30 St.	103.28	00591521	15.25.04.8001
30 mm	30 St.	103.30	00591538	15.25.04.8001
32 mm	30 St.	103.32	00591544	15.25.04.8001
35 mm	30 St.	103.35	00591550	15.25.04.8001

KIC-Kondome – Extradünn

Ohne Schlauchansatz, mit gestanzter Öffnung zum Einsetzen der KIC-Kupplung, verstärkte Spitze, sonst identisch mit den Latex-Kondomen „Extradünn“ | Seite 33. Fixierung mit Hautkleber oder doppelseitigem Klebeband | Seite 35, 36. 10 KIC-Kupplungen 100.05 und 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegen bei.

Länge 200 mm, 2 Größen (Ø mm).

Größe	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
30 mm	30 St.	103.30.D	01268153	15.25.04.8003
35 mm	30 St.	103.35.D	01268176	15.25.04.8003

KIC-Kupplung

Zur Verbindung eines KIC-Kondoms mit einem Urin-Bein- oder -Bettbeutel. Aus Kunststoff, mit Kupplungsschlauch aus Latex.

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
10 St.	100.05	08812364	15.99.99.0002

Kupplungsschlauch

Für KIC-Kupplung 100.05. Aus Latex.

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
5 St.	55.38	00967162	15.99.99.0003

Die Urinal-Kondome stammen aus eigener Entwicklung und Produktion. Sie werden in unserem Betrieb in Lobbach hergestellt und verfügen über die Merkmale, die für den Anwender entscheidend sind, wenn es um einfache Handhabung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und nicht zuletzt um einen hohen Tragekomfort geht.

Urinal-Kondome

Selbstklebend oder separate Fixierung

Unsere Urinal-Kondome zeichnen sich, je nach Ausführung, durch folgende Merkmale aus:

Bis zu 11 Größen: Durch die fein abgestuften Größen (Durchmesser 18–40 mm) ist eine exakte Anpassung möglich. Je höher die Passgenauigkeit, umso sicherer ist die Klebeverbindung.

Synthetische Materialien: Kondom und Kleber (bei selbstklebender Ausführung) sind hergestellt ohne Zugabe von Latex. Damit sind Reizungen bzw. Allergien, wie sie gelegentlich von Latex hervorgerufen werden, ausgeschlossen.


Hochelastische Materialien: Die extreme Elastizität – besonders bei Latex – bietet einen ausreichenden Puffer bei hohem Spontanurin und sichert gleichzeitig einen rückstandsfreien Abfluss des Urins. Damit wird die bei weniger elastischen Materialien bekannte „Pfützenbildung“ verhindert.

Materialstärke: Das Kondom wird nach hinten stetig dünner. So kann es sich im Klebebereich besser an die Hautoberfläche anpassen, wodurch die Klebewirkung zusätzlich unterstützt wird.

Verstärkte Kondomspitze: Sie verhindert ein Abreißen des Kondoms bei mechanischer Belastung.

Schlauchansatz: Er ist direkt am Kondom angetaucht bzw. angestöpselt und passt auf alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter.

Fixierung: Urinal-Kondome sind selbstklebend oder werden mit separatem Hautkleber bzw. einem doppelseitigen Klebeband fixiert. Beide Möglichkeiten haben unterschiedliche Vorteile, die je nach individuellen Verhältnissen bevorzugt werden.

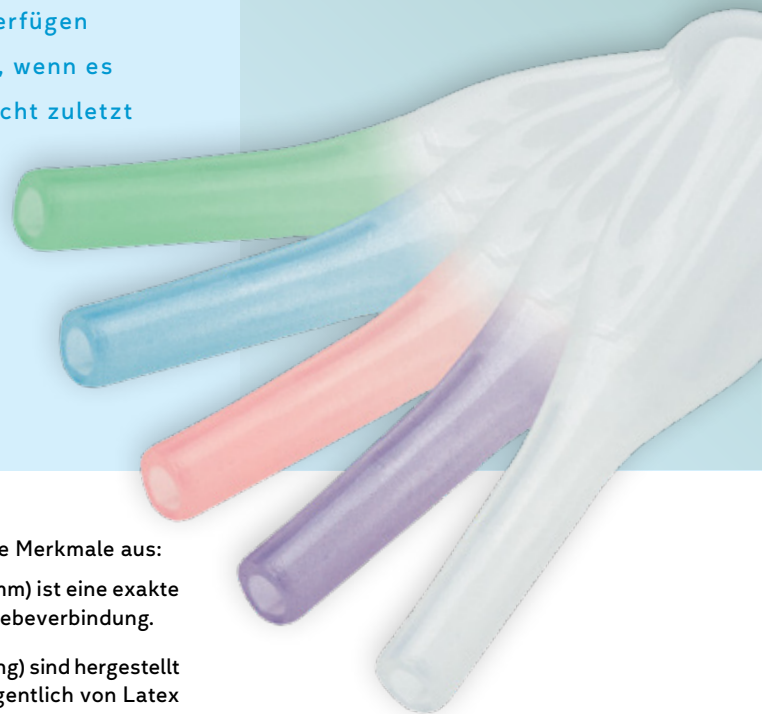

Auswahl des geeigneten Urinal-Kondoms

Bestimmen Sie mit Hilfe des Maßbandes | siehe Seite 73 zunächst die erforderliche Kondomgröße. Nehmen Sie wegen der einfacheren Handhabung zuerst die selbstklebenden Kondome „SAUER-Comfort“.

Ein Maßband zum Ausdrucken finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.manfred-sauer.com/hersteller/nuetzliche-information/downloads

FRAGEN? WIR HELFEN WEITER ...



+49 6226 960100

Festnetz oder per WhatsApp



Hygiene und Tragedauer:

Im Umgang mit Kontinenzprodukten sind die hygienischen Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu beachten. Es wird empfohlen das Kondom nach 24 Stunden zu wechseln. Die Tragedauer kann je nach Hauttyp auch weniger als 24 Stunden betragen.


100 %-Prüfung

Um dem Anwender eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten, werden alle Urinal-Kondome einzeln auf Dichtigkeit und Reißfestigkeit geprüft.

Vor der ersten Anwendung

Tipp

Um die Handhabung eines selbstklebenden Kondoms SAUER-Comfort kennenzulernen, können Sie einen sog. „Däumling“ anfordern (Durchmesser 22 oder 24 mm). Damit können Sie die einzelnen Schritte zum Anlegen des Kondoms am Daumen ausprobieren und herausfinden, wie Sie etwaige Hemmnisse beim Abrollen überwinden und Faltenbildung vermeiden, und Sie sehen, an welcher Stelle des Kondoms die Klebezone beginnt.

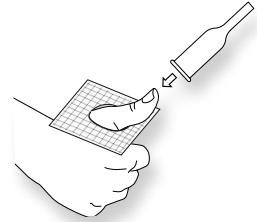

Selbstklebende Urinal-Kondome SAUER-Comfort

Schlauchansatz

Zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter. Je nach Ausführung des Kondoms ist der Schlauchansatz unterschiedlich gefärbt.

Länge: 50 mm

Pufferzone

Bietet einen ausreichenden Puffer bei hohem Spontanurin, um die Klebung nicht zu belasten, was zum Ablösen des Kondoms führen könnte. Die Puderung wirkt dem Zusammenkleben des Kondoms während der Anwendung entgegen, sie gibt der Pufferzone ein leicht milchiges Aussehen.

Länge: 75 mm oder 60 mm

Klebezone


Wahlweise mit normalem oder starkem Kleber ausgerüstet. Im Bereich der Klebezone ist das Kondom transparent, das ermöglicht jederzeit eine Beurteilung des Hautbildes, ohne das Kondom ablösen zu müssen.

Länge: 50 mm

Verkürzte Form

Bei der Variante „SAUER-Comfort – Violett“ ist die Klebezone deutlich verkürzt, was vor allem Anwendern mit wenig Klebefläche, aber ohne schwallartige Blasenentleerung entgegenkommt. Wegen der kurzen Form ist dieses Kondom in den kleinen Größen auch für Kinder geeignet.

Länge der Pufferzone: 45 mm | Länge der Klebezone: 25 mm

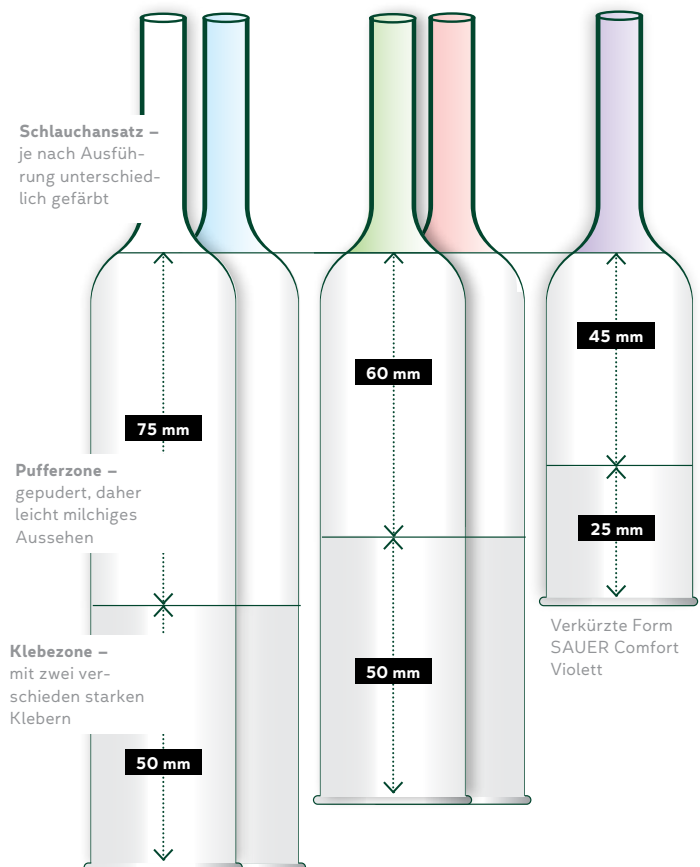

Selbstklebende Urinal-Kondome – SAUER-Comfort


Die Klebebeschichtung auf der Innenseite des Kondoms ermöglicht ein einfaches und schnelles Anlegen und gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen Kondom und Haut. Um den individuellen Wünschen der Anwender weitgehend nachzukommen, gibt es die selbstklebenden Kondome SAUER-Comfort in 5 Ausführungen. Diese unterscheiden sich in der Länge der Puffer- und Klebezone sowie in der Klebekraft.

SAUER-Comfort – **Standard** und SAUER-Comfort – **Blau**

Schlauchansatz

Pufferzone mit Puderung

Klebezone

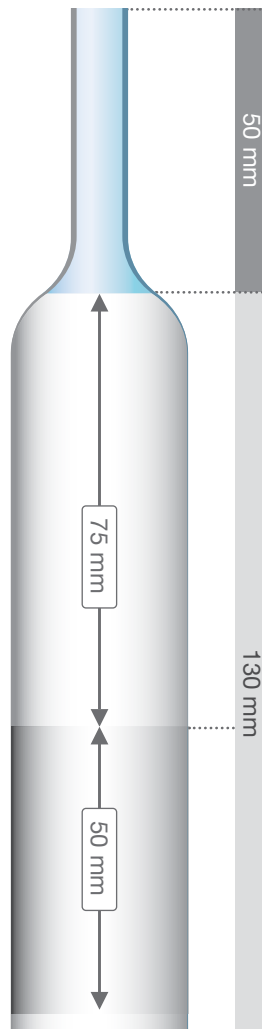

Standard

Standardkleber, für die meisten Fälle geeignet, ideal für Einsteiger.

Blau

Stärkerer Kleber, geeignet bei fettiger Haut, sowie in allen Fällen, in denen die Klebekraft eines Standardklebers nicht ausreicht.

Pufferzone


Bietet einen ausreichenden Puffer bei hohem Spontanurin, um die Klebung nicht zu belasten, was zum Ablösen des Kondoms führen könnte. Die Puderung wirkt dem Zusammenkleben des Kondoms während der Anwendung entgegen, sie gibt der Pufferzone ein leicht milchiges Aussehen.

Klebezone


Transparent, ermöglicht jederzeit eine Beurteilung des Hautbildes, ohne das Kondom ablösen zu müssen.

Klebezone in 2 Ausführungen:


- Standard und stärkerer Kleber
- farblich nach Schlauchansatz kodiert

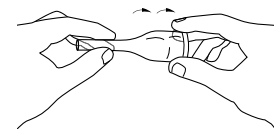


Kondom abrollen (Pufferzone)

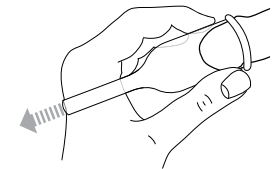

Kondom über die Eichel rollen, ggf. Penis durch leichtes Ziehen der Vorhaut straffen

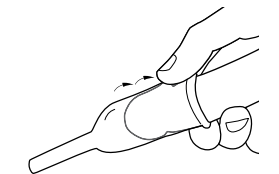

Kondom weiter gleichmäßig abrollen

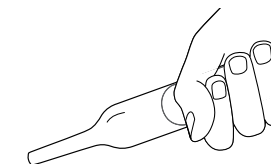

Kondom rundum andrücken



Hergestellt ohne Zugabe von Latex

Urinal-Kondome – SAUER-Comfort – Standard

Kondom und Kleber bestehen aus synthetischen Materialien. Mit angetauchtem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter. 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.

Länge 130 mm | Pufferzone 75 mm | Klebezone 50 mm | normaler Kleber | 11 Größen (Ø mm).

Größe	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
18 mm	30 St.	97.18	00590668	15.25.04.7002
20 mm	30 St.	97.20	00590674	15.25.04.7002
22 mm	30 St.	97.22	00590680	15.25.04.7002
24 mm	30 St.	97.24	00590697	15.25.04.7002
26 mm	30 St.	97.26	00590705	15.25.04.7002
28 mm	30 St.	97.28	00590711	15.25.04.7002
30 mm	30 St.	97.30	00590728	15.25.04.7002
32 mm	30 St.	97.32	00590734	15.25.04.7002
35 mm	30 St.	97.35	00590740	15.25.04.7002
37 mm	30 St.	97.37	00590757	15.25.04.7002
40 mm	30 St.	97.40	00590763	15.25.04.7002



97.18
⋮
97.40

Ø 11 Größen
18–40 mm



Urinal-Kondome – SAUER-Comfort – Blau

Kondom und Kleber bestehen aus synthetischen Materialien. Mit angetauchtem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter. 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.

Länge 130 mm | Pufferzone 75 mm | Klebezone 50 mm | starker Kleber | 9 Größen (Ø mm).

Größe	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
22 mm	30 St.	97.7501.22	00464194	15.25.04.7025
24 mm	30 St.	97.7501.24	00464202	15.25.04.7025
26 mm	30 St.	97.7501.26	00464219	15.25.04.7025
28 mm	30 St.	97.7501.28	00464225	15.25.04.7025
30 mm	30 St.	97.7501.30	00464231	15.25.04.7025
32 mm	30 St.	97.7501.32	00464248	15.25.04.7025
35 mm	30 St.	97.7501.35	00464254	15.25.04.7025
37 mm	30 St.	97.7501.37	00464260	15.25.04.7025
40 mm	30 St.	97.7501.40	00464277	15.25.04.7025



97.7501.22
⋮
97.7501.40

Ø 9 Größen
22–40 mm


Die Klebebeschichtung auf der Innenseite des Kondoms ermöglicht ein einfaches und schnelles Anlegen und gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen Kondom und Haut. Um den individuellen Wünschen der Anwender weitgehend nachzukommen, gibt es die selbstklebenden Kondome SAUER-Comfort in 5 Ausführungen. Diese unterscheiden sich in der Länge der Puffer- und Klebezone sowie in der Klebekraft.

SAUER-Comfort – Grün und SAUER-Comfort –Rot

Schlauchansatz

Pufferzone mit Puderung

Klebezone

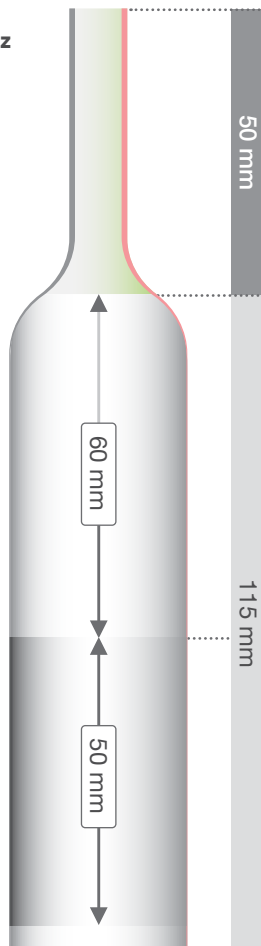

Grün

Standardkleber, für die meisten Fälle geeignet, ideal für Einsteiger. Verkürzte Pufferzone.

Rot

Stärkerer Kleber, geeignet bei fettiger Haut. Verkürzte Pufferzone.

Pufferzone


Bietet einen ausreichenden Puffer bei hohem Spontanurin, um die Klebung nicht zu belasten, was zum Ablösen des Kondoms führen könnte. Die Puderung wirkt dem Zusammenkleben des Kondoms während der Anwendung entgegen, sie gibt der Pufferzone ein leicht milchiges Aussehen.

Klebezone


Transparent, ermöglicht jederzeit eine Beurteilung des Hautbildes, ohne das Kondom ablösen zu müssen.

Klebezone in 2 Ausführungen:


- Standard und stärkerer Kleber
- farblich nach Schlauchansatz kodiert

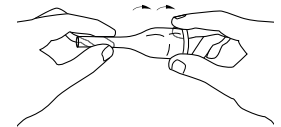


Kondom abrollen (Pufferzone)

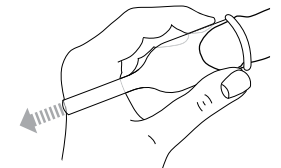

Kondom über die Eichel rollen, ggf. Penis durch leichtes Ziehen der Vorhaut straffen

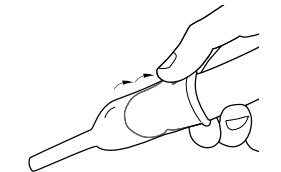

Kondom weiter gleichmäßig abrollen

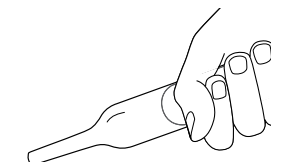

Kondom rundum andrücken

Sauer
Comfort

Hergestellt ohne Zugabe von Latex



97.6000.20

97.6000.40

9 Größen
20–40 mm



ca. 2 Wicklungen abrollen



97.6001.22

97.6001.40

9 Größen
22–40 mm

Urinal-Kondome – SAUER-Comfort – Grün

Kondom und Kleber bestehen aus synthetischen Materialien. Mit angetauchtem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter. 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.

Länge 115 mm | Pufferzone 60 mm | Klebezone 50 mm | normaler Kleber | 9 Größen (Ø mm).

Größe	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
20 mm	30 St.	97.6000.20	00464308	15.25.04.7026
24 mm	30 St.	97.6000.24	00464320	15.25.04.7026
26 mm	30 St.	97.6000.26	00464337	15.25.04.7026
28 mm	30 St.	97.6000.28	00464343	15.25.04.7026
30 mm	30 St.	97.6000.30	00464366	15.25.04.7026
32 mm	30 St.	97.6000.32	00464372	15.25.04.7026
35 mm	30 St.	97.6000.35	00464389	15.25.04.7026
37 mm	30 St.	97.6000.37	00464395	15.25.04.7026
40 mm	30 St.	97.6000.40	00464403	15.25.04.7026

Urinal-Kondome – SAUER-Comfort – Rot

Kondom und Kleber bestehen aus synthetischen Materialien. Mit angetauchtem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter. 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.

Länge 115 mm | Pufferzone 60 mm | Klebezone 50 mm | starker Kleber | 9 Größen (Ø mm).

Größe	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
22 mm	30 St.	97.6001.22	00464455	15.25.04.7027
24 mm	30 St.	97.6001.24	00464461	15.25.04.7027
26 mm	30 St.	97.6001.26	00464478	15.25.04.7027
28 mm	30 St.	97.6001.28	00464484	15.25.04.7027
30 mm	30 St.	97.6001.30	00464490	15.25.04.7027
32 mm	30 St.	97.6001.32	00464509	15.25.04.7027
35 mm	30 St.	97.6001.35	00464515	15.25.04.7027
37 mm	30 St.	97.6001.37	00464521	15.25.04.7027
40 mm	30 St.	97.6001.40	00464538	15.25.04.7027



Um die Handhabung der selbstklebenden Kondome SAUER-Comfort kennenzulernen, beachten Sie bitte den Tipp „Vor der ersten Anwendung“ auf | Seite 23.



97.4511.18
 ...
 97.4511.35

Urinal-Kondome – SAUER-Comfort – Violett

Kondom und Kleber bestehen aus synthetischen Materialien. Mit angetauchtem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter. 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei. Wegen der kurzen Form ist dieses Kondom auch für Kinder geeignet.


Länge 75 mm | Pufferzone 45 mm | Klebezone 25 mm | **starker Kleber** | 9 Größen (Ø mm).

Größe	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
18 mm	30 St.	97.4511.18	11054619	15.25.04.7030
20 mm	30 St.	97.4511.20	11054625	15.25.04.7030
22 mm	30 St.	97.4511.22	11054631	15.25.04.7030
24 mm	30 St.	97.4511.24	11054648	15.25.04.7030
26 mm	30 St.	97.4511.26	11054654	15.25.04.7030
28 mm	30 St.	97.4511.28	11054660	15.25.04.7030
30 mm	30 St.	97.4511.30	11054677	15.25.04.7030
32 mm	30 St.	97.4511.32	11054683	15.25.04.7030
35 mm	30 St.	97.4511.35	11054708	15.25.04.7030

Schlauchansatz

Pufferzone mit Puderung

Klebezone

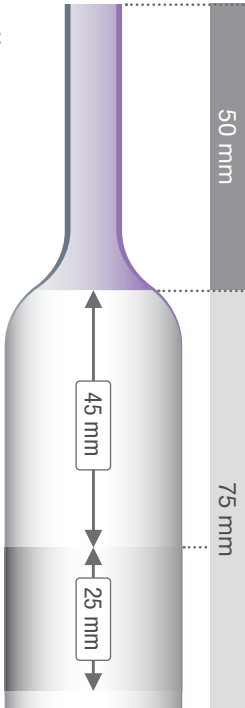

Violett


Stärkerer Kleber, geeignet bei fettiger Haut.
 Verkürzte Pufferzone.

Pufferzone

Bietet einen ausreichenden Puffer bei hohem Spontanurin, um die Klebung nicht zu belasten, was zum Ablösen des Kondoms führen könnte. Die Puderung wirkt dem Zusammenkleben des Kondoms während der Anwendung entgegen, sie gibt der Pufferzone ein leicht milchiges Aussehen.

Klebezone

Transparent, ermöglicht jederzeit eine Beurteilung des Hautbildes, ohne das Kondom ablösen zu müssen.

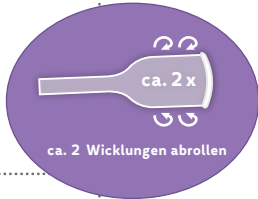


Selbstklebende Urinal-Kondome ohne Pufferzone

Neben den Kondomen SAUER-Comfort bieten wir weitere selbstklebende Kondome an. Der stärkere Materialfilm und der festere Trichter werden von manchen Anwendern beim Anlegen des Kondomes als vorteilhaft empfunden.

Bei den Kondomen UltraFlex, Wide-Band und Pop-On beginnt die Klebezone kurz nach dem Schlauchansatz, d.h. an der Stelle, wo das Kondom auf der Penisspitze aufgesetzt wird.

Diese Kondome haben keine (elastische) Pufferzone. Diese ist notwendig, um bei hohem Spontanurin kurzzeitig größere Mengen Urin aufzunehmen und damit besonders im Sitzen der Urin restlos abfließen kann (keine „Pfützenbildung“).

Urinal-Kondome – UltraFlex

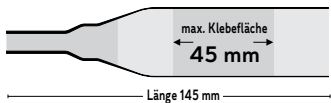


93.25
⋮
93.41



Gebrauchsfertige Urinalkondome aus reinem Silikon mit in der Innenschicht integrierter Acryl-Haftbeschichtung für eine verbesserte Haftkraft. Mit angetauchtem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit Adapter. Die Klebezone beginnt kurz nach dem Schlauchansatz.

	Größe	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
25 mm	Small	30 St.	93.25	07234617	15.25.04.7006
29 mm	Medium	30 St.	93.29	07234646	15.25.04.7006
32 mm	Intermediate	30 St.	93.32	07234652	15.25.04.7006
36 mm	Large	30 St.	93.36	07234669	15.25.04.7006
41 mm	X-Large	30 St.	93.41	07234735	15.25.04.7006

Urinal-Kondome – Wide-Band

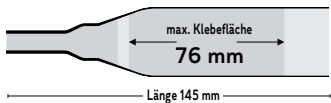


94.25
⋮
94.36



Gebrauchsfertige Urinalkondome aus reinem Silikon mit in der Innenschicht integrierter Acryl-Haftbeschichtung für eine verbesserte Haftkraft. Extralange Haftbeschichtung, die weit vorne ansetzt, um ungewolltes Ablösen zu verhindern. Mit angetauchtem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit Adapter.

	Größe	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
25 mm	Small	30 St.	94.25	07234758	15.25.04.7008
29 mm	Medium	30 St.	94.29	07235137	15.25.04.7008
32 mm	Intermediate	30 St.	94.32	07235261	15.25.04.7008
36 mm	Large	30 St.	94.36	07235858	15.25.04.7008

Urinal-Kondome – Pop-On

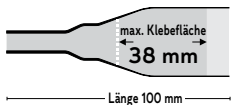

95.25
⋮
95.41



Gebrauchsfertige Urinalkondome aus reinem Silikon mit in der Innenschicht integrierter Acryl-Haftbeschichtung für eine verbesserte Haftkraft. Mit weit vorne angesetzter Haftbeschichtung, um ungewolltes Ablösen zu verhindern. Mit angetauchtem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit Adapter.


	Größe	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
25 mm	Small	30 St.	95.25	07235893	15.25.04.7007
29 mm	Medium	30 St.	95.29	07235982	15.25.04.7007
32 mm	Intermediate	30 St.	95.32	07236059	15.25.04.7007
36 mm	Large	30 St.	95.36	07237314	15.25.04.7007
41 mm	X-Large	30 St.	95.41	07237320	15.25.04.7007

Urinal-Kondome für **separate Fixierung**

Urinal-Kondome für separate Fixierung werden aus synthetischem Material oder Latex hergestellt. Sie ermöglichen beim Ankleben eine individuelle Handhabung: Die Menge des aufzutragenden Klebers, die Länge der Klebezone und die Größe der Pufferzone können vom Anwender selbst festgelegt werden.

Schlauchansatz

Pufferzone mit Puderung

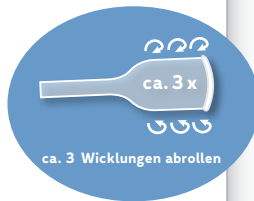

50 mm

Standard


Angetaucht, zum Anschluss an alle Urin-Auffangbeutel mit und ohne Adapter.

Pufferzone


Beugt bei schwallartigem Urinfluss einem Ablösen des Kondoms vor. Eine individuelle Handhabung ist möglich, d.h. die Menge des aufzutragenden Klebers, die Länge der Klebezone und die Größe der Pufferzone können vom Anwender selbst festgelegt werden.

Die Puderung wirkt dem Zusammenkleben des Kondoms während der Anwendung entgegen


150 mm

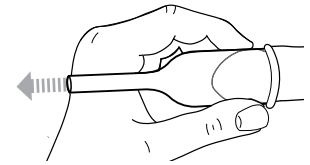


Kondom aufsetzen

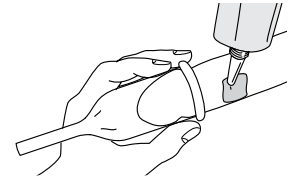

Kleber/Spray auftragen

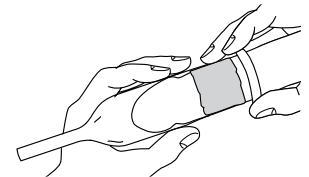

Kondom über Klebefläche rollen

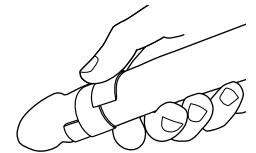

Klebeband spiralförmig und überlappend anlegen



Hergestellt ohne Zugabe von Latex

Synthetik-Kondome – Anti-Allergen

Aus synthetischem Material. Mit angetauchtem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter. Fixierung mit Synthetik-Hautkleber oder doppelseitigem Klebeband | **Seite 36.**
1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.

Länge 150 mm | 7 Größen (Ø mm).

Größe	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
24 mm	30 St.	56.24	00590421	15.25.04.6001
26 mm	30 St.	56.26	00590438	15.25.04.6001
28 mm	30 St.	56.28	00590444	15.25.04.6001
30 mm	30 St.	56.30	00590450	15.25.04.6001
32 mm	30 St.	56.32	00590467	15.25.04.6001
35 mm	30 St.	56.35	00590496	15.25.04.6001
40 mm	30 St.	56.40	00590527	15.25.04.6001



FRAGEN? **WIR HELFEN WEITER ...**



+49 6226 960 100

Festnetz oder per WhatsApp



100 %-Prüfung

Um dem Anwender eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten, werden alle Urinal-Kondome einzeln auf Dichtigkeit und Reißfestigkeit geprüft.

Latex-Kondom
Original

Latex-Kondom
Extradünn

Original

Seit Jahrzehnten bewährt!

Schlauchansatz

50 mm

50 mm

Pufferzone
mit Puderung

165 mm

200 mm

Materialstärke

Gelb

Angestöpselt, zum Anschluss an alle Urin-Auffangbeutel mit und ohne Adapter.

Pufferzone

Beugt bei schwallartigem Urinfluss einem Ablösen des Kondoms vor.

Eine individuelle Handhabung ist möglich, d.h. die Menge des aufzutragenden Klebers, die Länge der Klebezone und die Größe der Pufferzone können vom Anwender selbst festgelegt werden.

Die Puderung verhindert ein Zusammenkleben der Pufferzone während der Anwendung.

Dünn

Standardversorgung

Extradünn


Unterstützung der Klebewirkung oder bei retrahiertem Penis

Latex-Kondome – Original


Aus Naturlatex, durch Zentrifugieren weitgehend frei von chemischen Reststoffen. Mit angestöpseltem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter. Fixierung mit Hautkleber oder doppelseitigem Klebeband | Seite 35, 36. 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.

Länge 165 mm, 8 Größen (Ø mm).


Größe	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
24 mm	30 St.	53.24	00586394	15.25.04.4001
26 mm	30 St.	53.26	00586402	15.25.04.4001
28 mm	30 St.	53.28	00586419	15.25.04.4001
30 mm	30 St.	53.30	00586425	15.25.04.4001
32 mm	30 St.	53.32	00586431	15.25.04.4001
35 mm	30 St.	53.35	00586448	15.25.04.4001
37 mm	30 St.	53.37	00586454	15.25.04.4001
40 mm	30 St.	53.40	00586460	15.25.04.4001

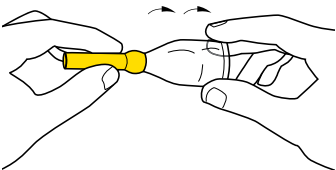

Kondom 2 – 3 x abrollen (Pufferzone).

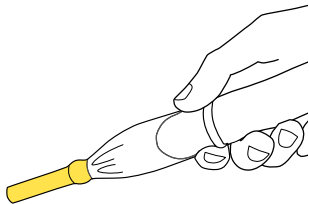

Kondom über die Eichel rollen, ggf. Penis durch leichtes Ziehen der Vorhaut straffen.

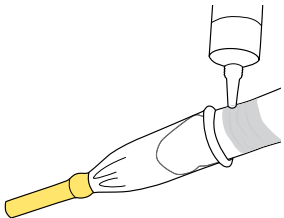

Hautkleber ringförmig 2 – 3 cm breit auftragen.




Latex-Kondome – Extradünn

Aus Naturlatex, extradünnner Latexfilm. Kann auch unter schwierigen Gegebenheiten (z. B. reduzierte Penisanatomie) in Verbindung mit Hautkleber eine sichere Versorgung bieten. Mit angestöpseltem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter. Fixierung mit Hautkleber oder doppelseitigem Klebeband | Seite 35, 36. 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.

Länge 200 mm, 3 Größen (Ø mm).

Größe	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
26 mm	30 St.	53.26.D	00590088	15.25.04.4002
30 mm	30 St.	53.30.D	00590094	15.25.04.4002
35 mm	30 St.	53.35.D	00590102	15.25.04.4002

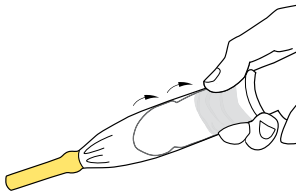

Kondom über die Klebestelle rollen und rundum andrücken.

Latex-Artikel

Bitte beachten Sie dazu den Hinweis | Seite 75.

SAUER-Hautkleber werden seit über 40 Jahren bei der Anwendung von Kondom-Urinalen erfolgreich eingesetzt. Flüssige Hautkleber gewährleisten die sicherste Verbindung zwischen Haut und Kondom und ermöglichen dem Anwender – gegenüber selbstklebenden Kondomen – eine individuelle Handhabung beim Anlegen des Kondoms.

Fixierung von Urinal-Kondomen

Hautkleber und doppelseitige Klebebänder

SAUER-Hautkleber

Handhabung: Die Menge des aufzutragenden Klebers, die Länge der Klebezone und die Größe der Pufferzone können vom Anwender selbst festgelegt werden.

Zusammensetzung: Sie entspricht dermatologischen Erkenntnissen. Der Hautkleber wird in verschiedenen, den persönlichen Hautverhältnissen angepassten Zusammensetzungen angeboten. Die Bestandteile der SAUER-Hautkleber sind Latex (Naturkautschuk) als Klebstoff, Heptan als Lösemittel zur Einstellung der Viskosität, Lanolin (gereinigtes Wollfett) zur Rückfettung der Haut, Zinkoxid zum Hautschutz und Harz zur Klebeverstärkung.

Klebewirkung: Sie unterscheidet sich bei den verschiedenen Kleberarten abhängig von der Zusammensetzung:

- Die Kleber 50.01, 50.03 haben eine Klebekraft, die meist für ein 24-stündiges Tragen eines Kondom-Urinals ausreicht.
- Durch die Reduzierung von hautpflegenden Substanzen wird die Klebekraft erhöht (50.05 und 50.00).
- Durch die Zugabe von Harz wird ebenfalls eine höhere Klebekraft erreicht (50.20, 50.22 und 50.23).

Wasserbeständigkeit: Die Hautkleber ermöglichen das Tragen des Urinals beim Baden und Schwimmen, ohne dass die Klebung beeinträchtigt wird.

Hautfreundlichkeit: Durch zusätzliche hautpflegende Substanzen ist eine Anwendung des Urinals „rund um die Uhr“ möglich.

Tube mit Pipettenöffnung: Für ein einfaches und sauberes Auftragen des Klebers.

Entfernen des Kondoms: In der Regel hinterlässt der Kleber keine Rückstände auf der Haut, weil Kondom und Kleber aufeinander abgestimmt sind.



Alternativen: Je nach individuellen Verhältnissen kann zur Kondom-Fixierung auch ein Synthetik-Hautkleber oder ein doppelseitiges Klebeband | Seite 36 verwendet werden.

Latex-Artikel

Bitte beachten Sie dazu den Hinweis auf | Seite 75.

FRAGEN?
WIR HELFEN WEITER ...



+49 6226 960 100

Festnetz oder per WhatsApp



Latex-Hautkleber

SAUER-Hautkleber – Original

Latexkleber mit hautpflegenden und antiseptischen Zusätzen, Lösemittel Heptan. Gewährleistet eine ausgezeichnete Klebeverbindung und kann in den meisten Fällen ohne Probleme angewendet werden.

50.01



	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
Tube mit Pipettenöffnung	2×28 g	50.01	00586299	15.99.99.1001

SAUER-Hautkleber – Lanolinfrei

Latexkleber, entspricht dem Hautkleber 50.01, jedoch ohne Lanolin, das in seltenen Fällen zu Hautreaktionen führen kann. Dadurch keine zusätzliche Rückfettung!

50.03



	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
Tube mit Pipettenöffnung	2×28 g	50.03	00586307	15.99.99.1001

SAUER-Hautkleber – 50 %

Latexkleber, entspricht dem Hautkleber 50.01, jedoch ist der hautpflegende Zusatz Lanolin um 50 % reduziert, dadurch höhere Klebekraft.

50.05



	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
Tube mit Pipettenöffnung	2×28 g	50.05	00586313	15.99.99.1001

SAUER-Hautkleber – Pur

Latexkleber, entspricht dem Hautkleber 50.01, jedoch ohne jegliche hautpflegende Zusätze. Klebt besonders stark, deshalb sollten die Hautverhältnisse sorgfältig beobachtet werden.

50.00



	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
Tube mit Pipettenöffnung	2×28 g	50.00	00586282	15.99.99.1001

SAUER-Hautkleber – 2 % Harz

Latexkleber, entspricht dem Hautkleber 50.01, jedoch mit 2 % Harzzusatz. Dadurch höhere Klebekraft, deshalb sollten die Hautverhältnisse sorgfältig beobachtet werden.

50.20



	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
Tube mit Pipettenöffnung	2×28 g	50.20	00586336	15.99.99.1001

SAUER-Hautkleber – 12 % Harz

Latexkleber, entspricht dem Hautkleber 50.01, jedoch mit 12 % Harzzusatz. Dadurch sehr hohe Klebekraft, deshalb sollten die Hautverhältnisse sorgfältig beobachtet werden.

50.22



	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
Tube mit Pipettenöffnung	2×28 g	50.22	00586342	15.99.99.1001

SAUER-Hautkleber – 10 % Harz

Latexkleber, entspricht dem Hautkleber 50.22, jedoch mit höherem Lösemittelanteil. Dadurch ist der Kleber dünnflüssiger und kann mit dem Pinsel aufgetragen werden. Nach dem Ablüften erreicht der Kleber eine sehr hohe Klebekraft, deshalb sollten die Hautverhältnisse sorgfältig beobachtet werden.

	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
Glasflasche mit Auftragpinsel	45 ml	50.23	10520367	15.99.99.1001



50.23


Doppelseitige Klebebänder

Doppelseitiges Klebeband – Extradünn
Hydrokolloidband.

Maße	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
150×15 mm	30 St.	50.14	08816161	15.99.99.1001

Doppelseitiges Klebeband – Geschäumt
PE-Schaum.

Maße	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
150×20 mm	30 St.	50.09	15405518	15.99.99.1001

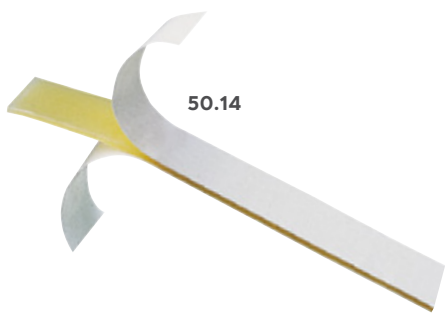

50.14



50.09

Synthetik-Hautkleber

Bei besonderen Hautverhältnissen oder Klebeproblemen können Synthetik-Hautkleber eine geeignete Alternative sein.

Bitte sprechen Sie uns an:
06226 960100

Doppelseitige Klebebänder

Den eigentlichen Anwendungsbe-
reich von doppelseitigen Klebebän-
dern sehen wir in der Versorgung
bei Altersinkontinenz, bei Bettlä-
gerigkeit und bei vorübergehendem
Bedarf auf Intensivstationen. Auch
bei Kindern und in allen anderen
Fällen, bei denen eine ausreichen-
de Klebefläche fehlt, kann ein Kle-
beband hilfreich sein.
Die Klebekraft der Klebebänder
hängt stark von den individuellen
Hautverhältnissen des Anwen-
ders ab. Deshalb ist eine pauscha-
le Empfehlung, welches Band am
besten geeignet ist, nicht möglich.
Bei Bedarf schicken wir Ihnen ger-
ne Muster zu, damit Sie im Test die
für Sie beste Lösung herausfinden
können.

Hygiene und Tragedauer:

Im Umgang mit Kontinenzproduk-
ten sind die hygienischen Richtlini-
en des Robert-Koch-Instituts (RKI)
zu beachten. Es wird empfohlen
Kondom und Klebeband nach 24
Stunden zu wechseln. Die Trage-
dauer kann je nach Hauttyp auch
weniger als 24 Stunden betragen.



50.50



50.58



50.52



Preventox Klebeverstärkung und Hautschutz

Preventox – Einmaltücher

Einfache Handhabung und besonders hygienisch.

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
50 St.	50.50	07138463	15.99.99.1001

Preventox – Flasche

Mit Spatel zum Auftragen.

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
50 ml	50.52	07138492	15.99.99.1001

Preventox – Roller

Zum Auftragen wie mit einem Deo-Roller. Auch bei eingeschränkter Handfunktion möglich.

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
50 ml	50.58	07138552	15.99.99.1001

Preventox

Preventox ist ein Klebeverstärkungsmittel, das auf der Haut einen transparenten, elastischen und atmungsaktiven Film bildet. Dadurch erhöht sich die Klebewirkung bei der Anwendung von Urinal-Kondomen (selbstklebend, Hautkleber, Klebeband) und die Haut wird vor Austrocknung durch im Kleber enthaltene Lösemittel geschützt.

Zubehör für Urinal-Kondome

SAUER-Abdecktücher

Verhindern ein Verkleben der Schamhaare beim Anlegen eines Urinal-Kondoms. Um ein enges Anliegen zu gewährleisten, ist die Öffnung des Tuches 1 mm kleiner als die zugehörige Kondomgröße (& mm). Aus Kunstfaser.



52.70-24
:
52.70-35

Größe	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
24 mm	30 St.	52.70-24	16020281	15.99.99.0003
28 mm	30 St.	52.70-28	16020312	15.99.99.0003
30 mm	30 St.	52.70-30	16020329	15.99.99.0003
32 mm	30 St.	52.70-32	16020335	15.99.99.0003
35 mm	30 St.	52.70-35	16020341	15.99.99.0003

Schere

Mit abgerundeter Spitze. Damit kann der hinter der Klebefläche verbleibende Ring eines Kondoms gefahrlos aufgeschnitten werden, um Druckstellen und Einschnürungen zu vermeiden.

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
1 St.	53.50	07138351	15.99.99.0003

Kleber-Entfernungstücher (o. Abb.)

Zum Entfernen von Kleberresten, speziell für Silikonkleber.

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
50 St.	50.38	–	–



53.50

Die Urin-Beinbeutel stammen aus eigener Entwicklung und Produktion. Sie werden in unserem Betrieb in Lobbach auf Hochfrequenz-Schweißmaschinen gefertigt. Durch unterschiedliche Formen, Größen und vielfältige Ausstattungsmerkmale wird den Bedürfnissen und Wünschen des Anwenders weitestgehend entsprochen.

Urin-Beinbeutel

Für Fußgänger und Rollstuhlfahrer



SAUER-Rollibeutel

Diese Beutel in angewinkelter Form zur Befestigung am Bein wurden eigens für Rollstuhlfahrer entwickelt. Sie sind der sitzenden Haltung angepasst und bieten ein hohes Maß an Tragekomfort, Flexibilität und Sicherheit. Aufgrund der vielfältigen Ausstattungsmerkmale ist eine genaue Anpassung an die persönlichen Bedürfnisse möglich.

Hohes Fassungsvermögen: 1,3 Liter geben Unabhängigkeit von unzugänglichen Toiletten und damit Sicherheit für unterwegs und im Beruf. Die kleineren Beutel mit 0,7 Liter eignen sich eher für Kinder und Heranwachsende.

Angewinkelte Form: Der schräge Einlaufschlauch und die spezielle Form sind Voraussetzung für das zuverlässige Funktionieren dieser Beutel in der Rollstuhlsituation – bequemes Tragen am Bein, äußerlich nicht erkennbar, sicheres Abfließen des Urins und leichtes Entleeren.

SAUER-Fußgängerbeutel

Sie sind durch ihre Gestaltung vor allem für Fußgänger, aber auch für Rollstuhlfahrer und Kinder geeignet und können am linken oder rechten Bein getragen werden.


Fassungsvermögen: Es ist mit 0,6 bzw. 1,0 Liter auf Fußgänger abgestimmt, denn sie haben in der Regel keine Probleme mit der Entleerung des Beutels. Außerdem trägt ein kleinerer Beutel weniger auf.

Einlauf: Der Schlauch ist genügend lang und kann beliebig, entsprechend den körperlichen Gegebenheiten, gekürzt werden. So ist es möglich, den Beutel am Ober- oder Unterschenkel zu befestigen. Der lose beiliegende Adapter, glatt oder gestuft, wird auf den (gekürzten) Einlaufschlauch des Beutels aufgesteckt. Damit kann eine zuverlässige Verbindung zu allen gängigen Kondomen und Kathetern hergestellt werden.

Beschichtung: Mit angenehm weichem Viskose-Flock, für erhöhten Tragekomfort. Der Beutel ist einseitig beschichtet, auf der anderen Seite ist er transparent. Eine Alternative dazu ist ein unbeschichteter Beutel (0,6 Liter) in einer Beinbeuteltasche | Seite 50.

Qualitäts-Prüfung

Um dem Anwender eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten, unterliegen die Beutel und die dazugehörigen Bestandteile einem kontrollierten Qualitätszyklus.

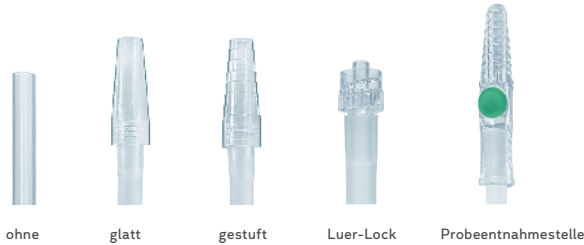

SAUER-Urinbeutel zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

1 | Der Anschluss

mit oder ohne Adapter für die einfache und sichere Verbindung mit allen Urinal-Kondomen und Dauerkathetern:

- ohne Adapter zum direkten Anschluss an SAUER-Urinal-Kondome
- glatter Adapter vorrangig zum Anschluss an Urinal-Kondome
- gestufter Adapter zum Anschluss an Urinal-Kondome und Dauerkatheter

2 | Der Einlaufschlauch

in harter oder weicher Ausführung und in verschiedenen Längen, auch kürzbar zur Anpassung an die Körpergröße.

3 | Der Ventilkörper

gewährleistet das ungehinderte Einlaufen des Urins auch bei nicht glatt anliegendem Beutel.

4 | Das Rücklaufventil

verhindert das Zurückfließen des Urins z. B. bei krankengymnastischer Behandlung.

5 | Die Gurtösen

bieten zusammen mit verstellbaren Beingurten individuelle Befestigungsarten und sicheren Sitz.

6 | Die Folie

ist sehr robust und hat eine geprägte Oberfläche, um Schweißbildung und das Anhaften auf der Haut zu verhindern.


7 | Der Auslaufhahn

für ein sauberes Entleeren des Beutels:

- Schwenkhahn: leicht bedienbar, auch bei eingeschränkter Handfunktion
- Drehhahn: kompakt und diskret, besonders für kleine Beutel, ermöglicht den problemlosen Anschluss eines Bettbeutels
- Schiebehahn: zur Einhandbedienung, der Beutel kann links oder rechts getragen werden

8 | Die Schweißung

Ventilkörper, Rücklaufventil und Auslaufhahn sind fest mit der Folie verschweißt. Die doppelten Schweißnähte halten auch hohen Belastungen stand.

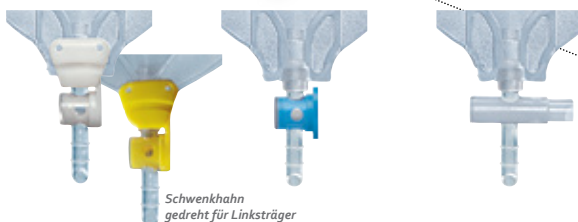

Schwenkhahn
gedreht für Linksträger


Spezialanfertigungen von Urin-Beinbeuteln

Unsere Produktpalette zur Versorgung von Blaseninkontinenz haben wir so gestaltet, dass sie für nahezu alle Bedürfnisse nicht nur eine geeignete Lösung bietet, sondern bereits standardmäßig Alternativen vorsieht. Darüber hinaus sind wir ständig bemüht, für individuelle Anforderungen weitere Lösungen (sog. Spezialanfertigungen) anzubieten, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Bei Urin-Beinbeuteln kann das die Gestaltung des Einlaufs und des Auslaufs betreffen, die zusätzliche Beschichtung mit Viskose-Flock oder sterile Ausführung.

Wir bitten Sie, bei Problemen, aber auch bei Fragen zum Standardprogramm, mit uns Kontakt aufzunehmen.

Bestellhinweise

Spezialanfertigungen haben eine Lieferzeit von etwa 14 Tagen, sterile Beutel, sofern nicht vorrätig, eine Lieferzeit von 6–8 Wochen. Spezialanfertigungen sind nur gegen Aufpreis erhältlich und können nicht umgetauscht bzw. zurückgenommen werden.

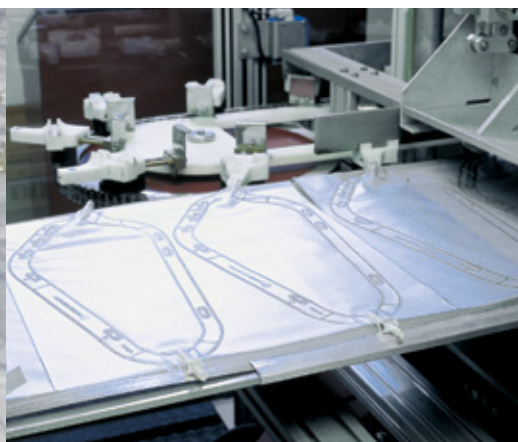

FRAGEN? **WIR HELFEN WEITER ...**



+49 6226 960 100

Festnetz oder per WhatsApp



Dauerkatheter


An einen Dauerkatheter dürfen nur sterile Urin-Auffangbeutel mit Rücklaufventil angeschlossen werden.

Rollibeutel mit gedrehtem Schwenkhahn

Rollibeutel werden normalerweise am rechten Bein getragen, der Flügel des Schwenkhahnes liegt so am Bein an, um ein versehentliches Öffnen des Hahnes, z. B. beim Ausziehen, zu verhindern. Soll der Beutel am linken Bein getragen werden, ist es sinnvoll, dass der Hahn um 180° gedreht montiert ist, damit auch in dieser Position der Flügel am Bein anliegt. Zur Unterscheidung hat der Schwenkhahn dieser Beutelvariante einen gelben Flügel.

SAUER-Rollibeutel mit Schwenkhahn gedreht (gelb):

701.5020-xx | Seite 43.

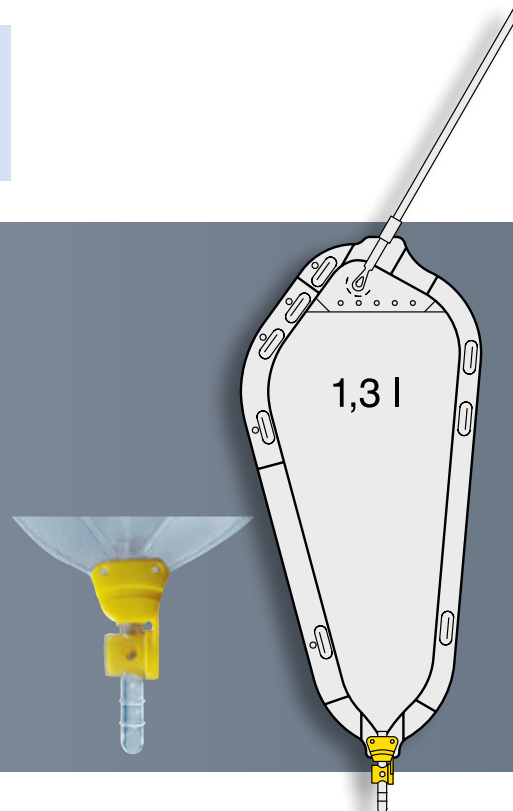


Bettbeutel an Beinbeutel anschließen

Soll ein Beinbeutel über Nacht nicht abgenommen werden, z. B. bei Verwendung eines Dauerkatheters, kann an den Beinbeutel (vorrangig mit Drehhahn) ein Bettbeutel angeschlossen werden, um insgesamt größere Urinmengen aufnehmen zu können.

Drehhahn

Kuplungsschlauch

Einlaufschlauch eines Bettbeutels mit Adapter

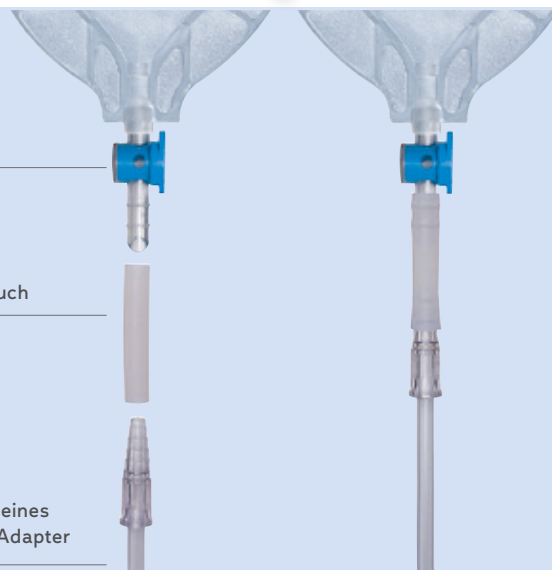

SAUER-Rollibeutel

Urin-Auffangbeutel für Rollstuhlfahrer | kürzbarer Einlaufschlauch – (hart) ohne Adapter, (weich) aufsteckbare Adapter | 1,3 Liter | Rücklaufventil

**1,3
Liter**

**701.1020-xx –
701.3435-xx**

Anschluss

Schlauch

20 cm (hart) oder
35 cm (weich), kürzbar

Rücklaufventil

verhindert das Zurück-
fließen des Urins

Fassungsvermögen

1,3 Liter

Strukturierte Folie

verhindert beim Schwit-
zen das Anhaften auf
der Haut

HF-Schweißnähte

halten auch hohen
Belastungen stand

Auslauf

Ohne Adapter (harter Schlauch)

zum direkten Anschluss
an alle SAUER-Urinal-
Kondome

Aufsteckbarer glatter oder gestufter Adapter

universell verwendbar,
zum Anschluss an alle
Urinal-Kondome und
Dauerkatheter (bei
steriler Ausführung)

Schwenkhahn

bei eingeschränk-
ter Handfunktion
(gelb: links
Schwenkhahn
gedreht)

Schiebehahn

zur Einhand-
bedienung

Drehhahn

dezent unter der
Kleidung und ideal
für den Anschluss
eines Bettbeutels mit
einem Kupplungs-
schlauch (z.B. 55.38)

Angewinkelte Form mit
schrägem Einlauf und
Rücklaufventil.
Der Einlaufschlauch kann
entsprechend der Kör-
pergröße gekürzt werden
(siehe Abb. rechts).



**1,3
Liter**



20 cm
35 cm


- › Die Beutel sind in Packungen mit 10 und 30 Stück erhältlich. Bei der Best.-Nr. „xx“ durch die gewünschte Verpackungseinheit ersetzen (z. B. 701.1020-30).
- › Beutelbefestigung: Beigurte | S. 68 Beinbeutel taschen | S. 69

Auslauf	Anschluss	Schlauch	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	▼
Schwenkhahn	ohne Adapter	20 cm hart kürzbar	10 St.	701.1020-10	00559204	15.25.05.5001	1
			30 St.	701.1020-30	00571116	15.25.05.5001	2
			10 St.	701.5020-10	10346521	15.25.05.5041	3
			30 St.	701.5020-30	10346515	15.25.05.5041	4
	glatter Adapter aufsteckbar		10 St.	701.1335-10	00987555	15.25.05.5021	5
			30 St.	701.1335-30	00991189	15.25.05.5021	6
	gestufter Adapter aufsteckbar (bei steril mit Schutzkappe)	35 cm weich kürzbar	10 St.	701.1435-10	06094752	15.25.05.5022	7
			30 St.	701.1435-30	06094769	15.25.05.5022	8
			10 St.	701.1435-10.S	06122454	15.25.05.6019	9
			30 St.	701.1435-30.S	06122419	15.25.05.6019	10
Schiebehahn	ohne Adapter	20 cm hart kürzbar	10 St.	701.2020-10	00634302	15.25.05.5004	11
			30 St.	701.2020-30	00634319	15.25.05.5004	12
	glatter Adapter aufsteckbar		10 St.	701.2335-10	01140051	15.25.05.5023	13
			30 St.	701.2335-30	01140068	15.25.05.5023	14
	gestufter Adapter aufsteckbar (bei steril mit Schutzkappe)	35 cm weich kürzbar	10 St.	701.2435-10	06094841	15.25.05.5024	15
			30 St.	701.2435-30	06094858	15.25.05.5024	16
			10 St.	701.2435-10.S	06094870	15.25.05.6025	17
			30 St.	701.2435-30.S	06094887	15.25.05.6025	18
Drehhahn	ohne Adapter	20 cm hart kürzbar	10 St.	701.3020-10	00571139	15.25.05.5019	19
			30 St.	701.3020-30	00573612	15.25.05.5019	20
	gestufter Adapter aufsteckbar	35 cm weich kürzbar	10 St.	701.3435-10	06094781	15.25.05.5026	21
			30 St.	701.3435-30	06094798	15.25.05.5026	22


PZN = Pharmazentralnummer HMV-Nr. = Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

STERIL Sterile Beutel mit Schiebe- und Drehhahn werden mit einem sterilen Kupplungsschlauch geliefert


Mit gedrehtem Schwenkhahn (für Linksträger)

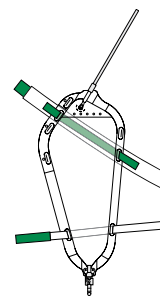


Die Beingurte oben und unten in die Schlaufen des Beutels einziehen.

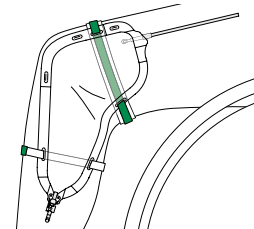

Den Beutel mit Hilfe der Gurte am Bein befestigen.

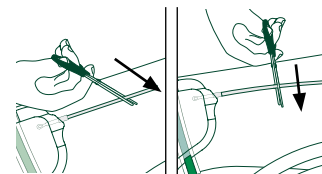

Den Schlauch mit einer Schere auf gewünschte Länge kürzen (links: schräger Schnitt beim harten Schlauch, rechts: gerader Schnitt beim weichen Schlauch).

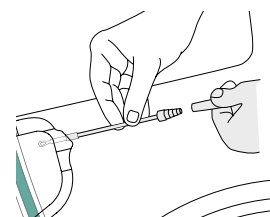

Den Adapter aufstecken und Beutel mit dem Kondom verbinden.

SAUER-Rollibeutel

Urin-Auffangbeutel für Rollstuhlfahrer | fest montierter Adapter |
Einlaufschlauch nicht kürzbar | 1,3 Liter

**1,3
Liter**

**701.1112-xx –
701.2222-xx**

Anschluss

Schlauch

12 cm oder
22 cm (weich)

Rücklaufventil

verhindert das Zurück-
fließen des Urins

Fassungsvermögen
1,3 Liter

Strukturierte Folie

verhindert beim Schwitzen
das Anhaften auf der Haut

HF-Schweißnähte

halten auch hohen
Belastungen stand

Auslauf

Fest montierter glatter oder gestufter Adapter

universell verwendbar,
zum Anschluss an alle
Urinal-Kondome und
Dauerkatheter (bei
steriler Ausführung)

Gestufter Adapter,
mit nadelfreier
Probeentnahme-
stelle, steril

Schwenkhahn

bei eingeschränk-
ter Handfunktion

Schiebehahn

zur Einhandbedienung

Angewinkelte Form mit
schrägem Einlauf und
Rücklaufventil.
Der Einlaufschlauch nicht
kürzbar.




**1,3
Liter**




**12 cm
22 cm**

- › Die Beutel sind in Packungen mit 10 und 30 Stück erhältlich. Bei der Best.-Nr. „xx“ durch die gewünschte Packungseinheit ersetzen (z. B. 701.1112-30).
- › Beutelbefestigung: Beingurte | S. 68 Beinbeutel taschen | S. 69


Auslauf	Anschluss	Schlauch	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	▼
Schwenkhahn	glatter Adapter fest montiert	12 cm weich	10 St.	701.1112-10	00650991	15.25.05.5006	1
			30 St.	701.1112-30	00669370	15.25.05.5006	2
			10 St.	701.1112-10.S	00679440	15.25.05.6006	3
			30 St.	701.1112-30.S	00718401	15.25.05.6006	4
		22 cm weich	10 St.	701.1122-10	00828408	15.25.05.5009	5
			30 St.	701.1122-30	00856617	15.25.05.5009	6
	gestufter Adapter fest montiert	12 cm weich	10 St.	701.1212-10	01180659	15.25.05.5033	7
			30 St.	701.1212-30	01180702	15.25.05.5033	8
			10 St.	701.1212-10.S	01224339	15.25.05.6018	9
			30 St.	701.1212-30.S	01225729	15.25.05.6018	10
		22 cm weich	10 St.	701.1222-10	01463067	15.25.05.5009	11
			30 St.	701.1222-30	06094568	15.25.05.5009	12
			10 St.	701.1222-10.S	06094580	15.25.05.6031	13
			30 St.	701.1222-30.S	06094597	15.25.05.6031	14
Schiebehahn	glatter Adapter fest montiert	12 cm weich	10 St.	701.2112-10	00731146	15.25.05.5008	15
			30 St.	701.2112-30	00731152	15.25.05.5008	16
		22 cm weich	10 St.	701.2122-10	00947797	15.25.05.5008	17
			30 St.	701.2122-30	00959642	15.25.05.5008	18
	gestufter Adapter fest montiert	12 cm weich	10 St.	701.2212-10	01380849	15.25.05.5034	19
			30 St.	701.2212-30	01385203	15.25.05.5034	20
			10 St.	701.2212-10.S	01389164	15.25.05.6028	21
			30 St.	701.2212-30.S	01405236	15.25.05.6028	22
	gestufter Adapter fest montiert, mit nadelfreier Probe- entnahmestelle		10 St.	701.2912-10.S	–	15.25.05.3091	23
			30 St.	701.2912-30.S	–	15.25.05.3091	24
	gestufter Adapter fest montiert	22 cm weich	10 St.	701.2222-10	06094686	15.25.05.5008	25
			30 St.	701.2222-30	06094692	15.25.05.5008	26
			10 St.	701.2222-10.S	06094717	15.25.05.6033	27
			30 St.	701.2222-30.S	06094723	15.25.05.6033	28

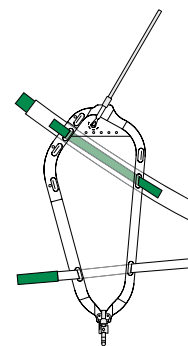

Die Beingurte oben und unten in die Schlaufen des Beutels einziehen.

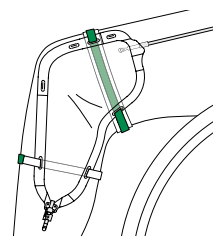

Den Beutel mit Hilfe der Gurte am Bein befestigen.

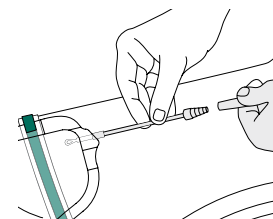

Beutel mit dem Kondom verbinden.

PZN = Pharmazentralnummer HMV-Nr. = Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

STERIL Sterile Beutel mit Schiebe- und Drehhahn werden mit einem sterilen Kupplungsschlauch geliefert

SAUER-Rollibeutel

Urin-Auffangbeutel für Rollstuhlfahrer | kürzbarer Einlaufschlauch – (hart) ohne Adapter, (weich) aufsteckbare Adapter | 0,7 Liter | Rücklaufventil

**0,7
Liter**

**702.1020-xx –
702.3435-xx**

Anschluss

Schlauch

20 cm oder
35 cm (weich), kürzbar

Rücklaufventil

verhindert das Zurück-
fließen des Urins

Fassungsvermögen

0,7 Liter

Strukturierte Folie

verhindert beim Schwitzen
das Anhaften auf der Haut

HF-Schweißnähte

halten auch hohen
Belastungen stand

Auslauf

Ohne Adapter (harter Schlauch)

zum direkten Anschluss
an alle SAUER-Urinal-
Kondome

Aufsteckbarer glatter oder gestufter Adapter

universell verwendbar,
zum Anschluss an alle
Urinal-Kondome

Schwenkhahn

bei eingeschränk-
ter Handfunktion

Schiebehahn

zur Einhand-
bedienung

Drehhahn

dezent unter der
Kleidung und ideal
für den Anschluss
eines Bettbeutels mit
einem Kupplungs-
schlauch (z.B. 55.38)

Angewinkelte Form mit
schrägem Einlauf und
Rücklaufventil.
Der Einlaufschlauch kann
entsprechend der Kör-
pergröße gekürzt werden
(siehe Abb. rechts).



**0,7
Liter**




**20 cm
35 cm**


- › Die Beutel sind in Packungen mit 10 und 30 Stück erhältlich. Bei der Best.-Nr. „xx“ durch die gewünschte Packungseinheit ersetzen (z. B. 702.1020-30).
- › Beutelbefestigung: Beingurte | S. 68 Beinbeutel taschen | S. 69

Auslauf	Anschluss	Schlauch	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	▼
Schwenkhahn	ohne Adapter	20 cm hart kürzbar	10 St.	702.1020-10	06094901	15.25.05.5002	1
			30 St.	702.1020-30	06094918	15.25.05.5002	2
	glatter Adapter aufsteckbar	35 cm weich kürzbar	10 St.	702.1335-10	06095208	15.25.05.5027	3
			30 St.	702.1335-30	06095214	15.25.05.5027	4
	gestufter Adapter aufsteckbar	35 cm weich kürzbar	10 St.	702.1435-10	06095533	15.25.05.5028	5
			30 St.	702.1435-30	06095556	15.25.05.5028	6
Schiebehahn	ohne Adapter	20 cm hart kürzbar	10 St.	702.2020-10	06094976	15.25.05.5003	7
			30 St.	702.2020-30	06094982	15.25.05.5003	8
	glatter Adapter aufsteckbar	35 cm weich kürzbar	10 St.	702.2335-10	06095272	15.25.05.5029	9
			30 St.	702.2335-30	06095289	15.25.05.5029	10
	gestufter Adapter aufsteckbar	35 cm weich kürzbar	10 St.	702.2435-10	06095645	15.25.05.5030	11
			30 St.	702.2435-30	06095651	15.25.05.5030	12
Drehhahn	gestufter Adapter aufsteckbar	35 cm weich kürzbar	10 St.	702.3435-10	06095579	15.25.05.5032	13
			30 St.	702.3435-30	06095585	15.25.05.5032	14


PZN=Pharmazentralnummer HMV-Nr.=Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

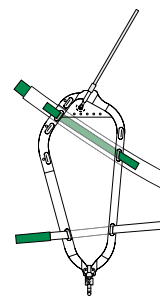


Die Beingurte oben und unten in die Schlaufen des Beutels einziehen.

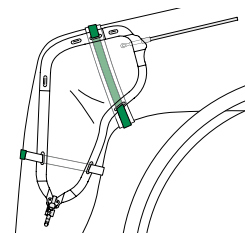

Den Beutel mit Hilfe der Gurte am Bein befestigen.

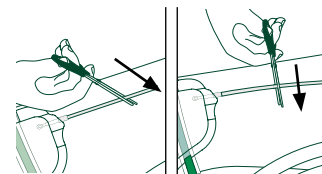

Den Schlauch mit einer Schere auf gewünschte Länge kürzen (links: schräger Schnitt beim harten Schlauch, rechts: gerader Schnitt beim weichen Schlauch).

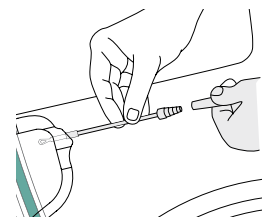

Den Adapter aufstecken und Beutel mit dem Kondom verbinden.

SAUER-Rollibeutel

Urin-Auffangbeutel für Rollstuhlfahrer | fest montierter Adapter | Einlaufschlauch nicht kürzbar | 0,7 Liter

**0,7
Liter**

**702.1112-xx –
702.2212-xx**

Anschluss

Schlauch

12 cm, nicht kürzbar

Rücklaufventil

verhindert das Zurückfließen des Urins

Fassungsvermögen

0,7 Liter

Strukturierte Folie

verhindert beim Schwitzen das Anhaften auf der Haut

HF-Schweißnähte

halten auch hohen Belastungen stand

Auslauf

Fest montierter glatter oder gestufter Adapter

universell verwendbar, zum Anschluss an alle Urinal-Kondome.

Schwenkhahn

bei eingeschränkter Handfunktion

Schiebehahn

zur Einhandbedienung

Angewinkelte Form mit schrägem Einlauf und Rücklaufventil.



**0,7
Liter**




**12 cm
22 cm**


- › Die Beutel sind in Packungen mit 10 und 30 Stück erhältlich. Bei der Best.-Nr. „xx“ durch die gewünschte Packungseinheit ersetzen (z. B. 702.1112-30).
- › Beutelbefestigung: Beigurte | S. 68 Beinbeutel taschen | S. 69

Auslauf	Anschluss	Schlauch	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	▼
Schwenkhahn	glatter Adapter fest montiert	12 cm weich	10 St.	702.1112-10	06095007	15.25.05.5005	1
			30 St.	702.1112-30	06095013	15.25.05.5005	2
	gestufter Adapter fest montiert	12 cm weich	10 St.	702.1212-10	06095303	15.25.05.5037	3
			30 St.	702.1212-30	06095326	15.25.05.5037	4
Schiebehahn	glatter Adapter fest montiert	12 cm weich	10 St.	702.2112-10	06095071	15.25.05.5007	5
			30 St.	702.2112-30	06095088	15.25.05.5007	6
	gestufter Adapter fest montiert	12 cm weich	10 St.	702.2212-10	06095378	15.25.05.5038	7
			30 St.	702.2212-30	06095384	15.25.05.5038	8


PZN = Pharmazentralnummer HMV-Nr. = Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

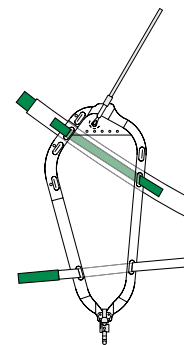

Die Beingurte oben und unten in die Schlaufen des Beutels einziehen.

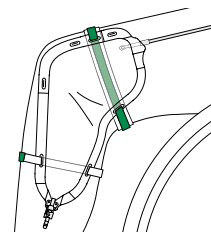

Den Beutel mit Hilfe der Gurte am Bein befestigen.

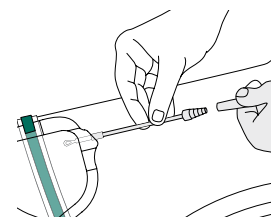

Beutel mit dem Kondom verbinden.

FRAGEN? **WIR HELFEN WEITER ...**



+49 6226 960100
Festnetz oder per WhatsApp



SAUER-Fußgängerbeutel (mit Beschichtung)

Urin-Auffangbeutel für Rollstuhlfahrer, Fußgänger und Kinder | kürzbarer Einlaufschlauch
0,6 oder 1,0 Liter

0,6/1,0
Liter

710.1345-xx –
711.3445-xx

Anschluss

Schlauch
45 cm (weich)
kürzbar

Einseitige Beschichtung
aus Viskose-Flock für
hohen Tragekomfort

Rücklaufventil
verhindert das Zurückfließen
des Urins

Transparente Vorderseite
zur visuellen Kontrolle

Fassungsvermögen
0,6 oder 1,0 Liter

HF-Schweißnähte
halten auch hohen
Belastungen stand

Auslauf

Aufsteckbarer glatter oder gestufter Adapter

universell verwendbar,
zum Anschluss an alle
Urinal-Kondome und
Dauerkatheter (bei
steriler Ausführung)

Schwenkhahn

bei eingeschränk-
ter Handfunktion

Schiebehahn

zur Einhand-
bedienung

Drehhahn

dezent unter der
Kleidung und ideal
für den Anschluss
eines Bettbeutels mit
einem Kupplungs-
schlauch (z.B. 55.38)

Gerader Einlauf und Rück-
laufventil. Universell ein-
setzbar für Fußgänger und
Rollstuhlfahrer. Kann durch
den kürzbaren Schlauch
sowohl am Ober- als auch
am Unterschenkel (Schlauch
45 cm) getragen werden.
Mit einseitiger Beschichtung
(Viskose-Flock), zum Teil
auch in steriler Ausführung
erhältlich.




- › Die Beutel sind in Packungen mit 10 und 30 Stück erhältlich. Bei der Best.-Nr. „xx“ durch die gewünschte Packungseinheit ersetzen (z.B. 710.1345-30).
- › Beutelbefestigung: Beingurte | S. 68 Beinbeutel taschen | S. 69


	Auslauf	Anschluss	Schlauch	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	▼
0,6 Liter	Schwenkhahn	glatter Adapter aufsteckbar	45 cm weich kürzbar	10 St.	710.1345-10	06095705	15.25.05.1061	1
				30 St.	710.1345-30	06095711	15.25.05.1061	2
		gestufter Adapter aufsteckbar	45 cm weich kürzbar	10 St.	710.1445-10	06095935	15.25.05.1061	3
				30 St.	710.1445-30	06095941	15.25.05.1061	4
	Schiebehahn	glatter Adapter aufsteckbar	45 cm weich kürzbar	10 St.	710.2345-10	06095846	15.25.05.1061	5
				30 St.	710.2345-30	06095852	15.25.05.1061	6
		gestufter Adapter aufsteckbar (bei steril mit Schutzkappe)	45 cm weich kürzbar	10 St.	710.2445-10	06096136	15.25.05.1061	7
				30 St.	710.2445-30	06096142	15.25.05.1061	8
			45 cm weich kürzbar	10 St.	710.2445-10.S	06122307	15.25.05.3083	9
				30 St.	710.2445-30.S	06122299	15.25.05.3083	10
1,0 Liter	Schwenkhahn	glatter Adapter aufsteckbar	45 cm weich kürzbar	10 St.	711.1345-10	06096550	15.25.05.1068	11
				30 St.	711.1345-30	06096567	15.25.05.1068	12
		gestufter Adapter aufsteckbar	45 cm weich kürzbar	10 St.	711.1445-10	06096662	15.25.05.1068	13
				30 St.	711.1445-30	06096679	15.25.05.1068	14
	Schiebehahn	glatter Adapter aufsteckbar	45 cm weich kürzbar	10 St.	711.2345-10	06096627	15.25.05.1068	15
				30 St.	711.2345-30	06096633	15.25.05.1068	16
		gestufter Adapter aufsteckbar	45 cm weich kürzbar	10 St.	711.2445-10	06096768	15.25.05.1068	17
				30 St.	711.2445-30	06096774	15.25.05.1068	18
	Drehhahn	gestufter Adapter aufsteckbar (bei steril mit Schutzkappe)	45 cm weich kürzbar	10 St.	711.3445-10	06096691	15.25.05.1068	19
				30 St.	711.3445-30	06096716	15.25.05.1068	20
				10 St.	711.3445-10.S	06096739	15.25.05.3085	21
				30 St.	711.3445-30.S	06096745	15.25.05.3085	22

PZN = Pharmazentralnummer HMV-Nr. = Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis


STERIL Sterile Beutel mit Schiebe- und Drehhahn werden mit einem sterilen Kupplungsschlauch geliefert

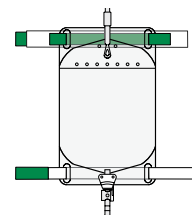


Die Beingurte oben und unten in die Schlaufen des Beutels einziehen.

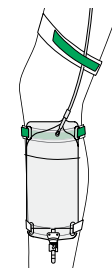

Den Beutel mit Hilfe der Gurte am Bein befestigen.

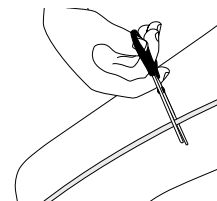

Den Schlauch mit einer Schere auf die gewünschte Länge kürzen.

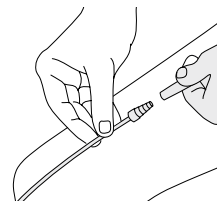

Den Adapter aufstecken und den Beutel mit dem Kondom verbinden.

STERIL

STERIL

SAUER-Fußgängerbeutel (ohne Beschichtung)

Urin-Auffangbeutel für Rollstuhlfahrer und Fußgänger | kürzbarer Einlaufschlauch | 1,0 Liter

**1,0
Liter**

**731.1345-xx –
731.2445-xx**

Anschluss

Schlauch
45 cm (weich)
kürzbar

Rücklaufventil
verhindert das Zurückfließen
des Urins

Strukturierte Folie
verhindert beim Schwitzen
das Anhaften auf der Haut

Fassungsvermögen
1,0 Liter

HF-Schweißnähte
halten auch hohen
Belastungen stand

Auslauf

Aufsteckbarer glatter oder gestufter Adapter

universell verwendbar,
zum Anschluss an alle
Urinal-Kondome

Schwenkhahn

bei eingeschränk-
ter Handfunktion

Schiebehahn

zur Einhandbedienung


Gerader Einlauf und
Rücklaufventil.
Universell einsetzbar für
Fußgänger und Rollstuhlfah-
rer. Kann durch den kürzbaren
Schlauch sowohl am Ober-
als auch am Unterschenkel
(Schlauch 45 cm) getragen
werden.




- › Die Beutel sind in Packungen mit 10 und 30 Stück erhältlich. Bei der Best.-Nr. „xx“ durch die gewünschte Packungseinheit ersetzen (z. B. 731.1345-30).
- › Beutelbefestigung: Beigurte | S. 68 Beinbeutelstaschen | S. 69

Auslauf	Anschluss	Schlauch	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	▼
Schwenkhahn	glatter Adapter aufsteckbar	45 cm weich kürzbar	10 St.	731.1345-10	06096797	15.25.05.1080	1
			30 St.	731.1345-30	06096805	15.25.05.1080	2
	gestufter Adapter aufsteckbar	45 cm weich kürzbar	10 St.	731.1445-10	06096892	15.25.05.1080	3
			30 St.	731.1445-30	06096900	15.25.05.1080	4
Schiebehahn	glatter Adapter aufsteckbar	45 cm weich kürzbar	10 St.	731.2345-10	06096857	15.25.05.1080	5
			30 St.	731.2345-30	06096863	15.25.05.1080	6
	gestufter Adapter aufsteckbar	45 cm weich kürzbar	10 St.	731.2445-10	06096969	15.25.05.1080	7
			30 St.	731.2445-30	06096975	15.25.05.1080	8


PZN = Pharmazentralnummer HMV-Nr. = Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

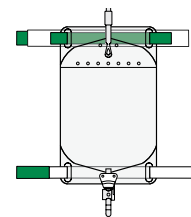


Die Beingurte oben und unten in die Schlaufen des Beutels einziehen.

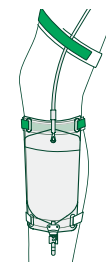

Den Beutel mit Hilfe der Gurte am Bein befestigen.

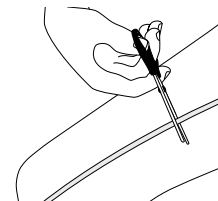

Den Schlauch mit einer Schere auf die gewünschte Länge kürzen.

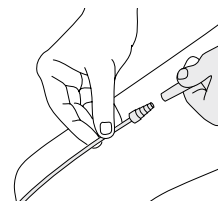

Den Adapter aufstecken und den Beutel mit dem Kondom verbinden.

SAUER-Rechteckbeutel

Urin-Auffangbeutel für Rollstuhlfahrer und Fußgänger | fest montierter Adapter | Einlaufschlauch nicht kürzbar | 0,6 Liter

**0,6
Liter**

**732.2208-xx –
732.2232-xx**

Anschluss

Schlauch
8 cm oder 32 cm,
nicht kürzbar

Fassungsvermögen
0,6 Liter

Rücklaufventil
verhindert das Zurückfließen
des Urins

HF-Schweißnähte
halten auch hohen
Belastungen stand

**Gestuerter Adapter,
fest montiert**
universell verwendbar

Auslauf

Schiebehahn
zur Einhandbedienung


Beinbeutel, universell einsetzbar für Fußgänger und Rollstuhlfahrer. Zur Anwendung mit allen Urinal-Kondomen. Kann am Oberschenkel oder am Unterschenkel getragen werden.




- › Die Beutel sind in Packungen mit 10 und 30 Stück erhältlich. Bei der Best.-Nr. „xx“ durch die gewünschte Packungseinheit ersetzen (z. B. 732.2232-30).
- › Beutelbefestigung: Beingurte | S. 68 Beinbeutel taschen | S. 69

Auslauf	Anschluss	Schlauch	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	▼
Schiebehahn	gestufter Adapter fest montiert	8 cm, weich, nicht kürzbar	10 St.	732.2208-10	07590068	15.25.05.1101	1
			30 St.	732.2208-30	07590074	15.25.05.1101	2
		32 cm, weich, nicht kürzbar	10 St.	732.2232-10	07590097	15.25.05.1101	3
			30 St.	732.2232-30	07590105	15.25.05.1101	4


PZN = Pharmazentralnummer HMV-Nr. = Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

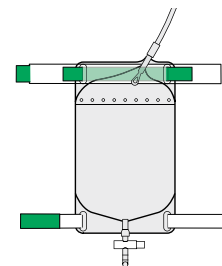

Die Beingurte oben und unten in die Schlaufen des Beutels einziehen.

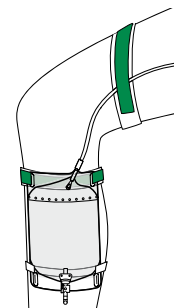

Den Beutel mit Hilfe der Gurte am Bein befestigen.

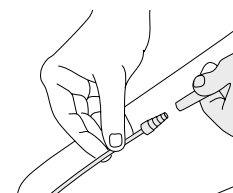

Beutel mit dem Kondom verbinden.

FRAGEN? **WIR HELFEN WEITER ...**



+49 6226 960100

Festnetz oder per WhatsApp



SAUER-Sportbeutel

Urin-Auffangbeutel für Rollstuhlfahrer und Fußgänger | ohne oder mit fest montiertem Adapter | 0,5 Liter

**0,5
Liter**

**720.1000-xx –
721.3200-xx**

Anschluss

Gerader Einlauf
auch für kürzere Hosen
geeignet

Fassungsvermögen
0,5 Liter

Rücklaufventil
verhindert das Zurück-
fließen des Urins

Strukturierte Folie
verhindert beim Schwitzen
das Anhaften auf der Haut

HF-Schweißnähte
halten auch hohen
Belastungen stand

Diagonaler Einlauf
leichte Entleerung durch
vielseitige Handhabung

Ohne Adapter
zum Anschluss an
alle SAUER-Urinal-
Kondome

**Glatter Adapter,
fest montiert**
universell
verwendbar

**Gestuft Adapter,
fest montiert**
universell
verwendbar

Schwenkhahn
bei eingeschränk-
ter Handfunktion

Schiebehahn
zur Einhand-
bedienung

Drehhahn
dezent unter der
Kleidung und ideal
für den Anschluss
eines Bettbeutels mit
einem Kupplungs-
schlauch (z.B. 55.38)

Beinbeutel für Fußgänger,
Rollstuhlfahrer und Kinder.




Auslauf


- › Die Beutel sind in Packungen mit 10 und 30 Stück erhältlich. Bei der Best.-Nr. „xx“ durch die gewünschte Packungseinheit ersetzen (z.B. 720.1000-30).
- › Beutelbefestigung: Beigurte | S. 68 Beinbeuteltaschen | S. 69

	Auslauf	Anschluss	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	▼
Einlauf gerade	Schwenkhahn	ohne Adapter	10 St.	720.1000-10	06097118	15.25.05.1028	1
			30 St.	720.1000-30	06097124	15.25.05.1028	2
		glatter Adapter fest montiert	10 St.	720.1100-10	06097259	15.25.05.1029	3
			30 St.	720.1100-30	06097265	15.25.05.1029	4
	Schiebehahn	ohne Adapter	10 St.	720.2000-10	05358172	15.25.05.1122	5
			30 St.	720.2000-30	05358166	15.25.05.1122	6
		gestufter Adapter fest montiert	10 St.	720.2200-10	05358060	15.25.05.1128	7
			30 St.	720.2200-30	05358054	15.25.05.1128	8
Einlauf diagonal	Schwenkhahn	ohne Adapter	10 St.	721.1000-10	06097147	15.25.05.1030	9
			30 St.	721.1000-30	06097153	15.25.05.1030	10
		glatter Adapter fest montiert	10 St.	721.1100-10	06097288	15.25.05.1031	11
			30 St.	721.1100-30	06097294	15.25.05.1031	12
		gestufter Adapter fest montiert	10 St.	721.1200-10	06097414	15.25.05.1131	13
			30 St.	721.1200-30	06097420	15.25.05.1131	14
	Schiebehahn	ohne Adapter	10 St.	721.2000-10	05358137	15.25.05.1124	15
			30 St.	721.2000-30	05358120	15.25.05.1124	16
		glatter Adapter fest montiert	10 St.	721.2100-10	05358031	15.25.05.1132	17
			30 St.	721.2100-30	05358025	15.25.05.1132	18
		gestufter Adapter fest montiert	10 St.	721.2200-10	05358002	15.25.05.1133	19
			30 St.	721.2200-30	05357994	15.25.05.1133	20
	Drehhahn	gestufter Adapter fest montiert	10 St.	721.3200-10	06097526	15.25.05.1135	21
			30 St.	721.3200-30	06097532	15.25.05.1135	22


PZN = Pharmazentralnummer HMV-Nr. = Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

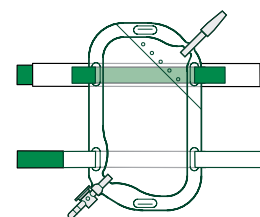

Die Beingurte oben und unten in die Schlaufen des Beutels einziehen.

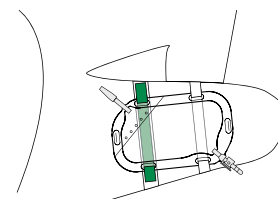

Den Beutel mit Hilfe der Gurte am Bein befestigen.

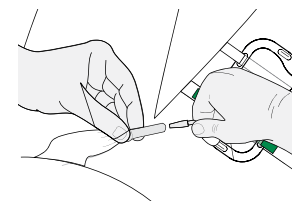

Den Adapter aufstecken und den Beutel mit dem Kondom verbinden.

SAUER-Diskret-/Kinderbeutel (steril)

Beinbeutel für Fußgänger und Rollstuhlfahrer (Kinder und Erwachsene) | mit fest montiertem Adapter | Kupplungsschlauch | steril | 210 ml

**210
ml**

723.3200-xx.S

Anschluss

Rücklaufventil

verhindert das Zurückfließen des Urins

Strukturierte Folie

verhindert beim Schwitzen das Anhaften auf der Haut

Fassungsvermögen


210 ml

HF-Schweißnähte

halten auch hohen Belastungen stand

Auslauf

mit
Kupplungsschlauch

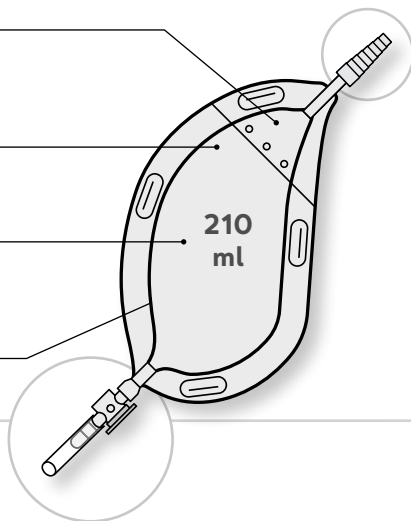

Gestuft Adapter, fest montiert

universell verwendbar



Drehhahn

dezent unter der Kleidung und für den Anschluss eines Bettbeutels mit Kupplungsschlauch 55.39 | S. 68

Beinbeutel für Fußgänger und Rollstuhlfahrer (Kinder und Erwachsene). Zur Anwendung mit allen Urinal-Kondomen und Dauerkathetern (bei steriler Ausführung). Mit Drehhahn, zum Anschluss eines Urin-Bettbeutels ist auf den Hahn ein Kupplungsschlauch aufgesteckt




- › Die Beutel sind in Packungen mit 10 und 30 Stück erhältlich. Bei der Best.-Nr. „xx“ durch die gewünschte Packungseinheit ersetzen (z. B. 723.3200-30.S).
- › Beutelbefestigung: Beigurte | S. 68 Beinbeutel taschen | S. 69

Auslauf	Anschluss	Einlauf	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	▼
Drehhahn	gestufter Adapter	diagonal	10 St.	723.3200-10	18782641	beantragt	1
			30 St.	723.3200-30	18782658	beantragt	2
Drehhahn	gestufter Adapter	diagonal	10 St.	723.3200-10.S	10231752	15.25.05.4004	3
			30 St.	723.3200-30.S	10231769	15.25.05.4004	4


STERIL

PZN = Pharmazentralnummer HMV-Nr. = Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis


STERIL Sterile Beutel mit Schiebe- und Drehhahn werden mit einem sterilen Kupplungsschlauch geliefert

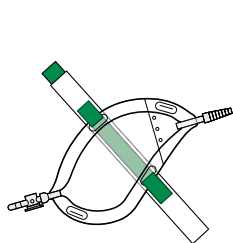

Den Beingurt oben und unten in die Schlaufen des Beutels einziehen.

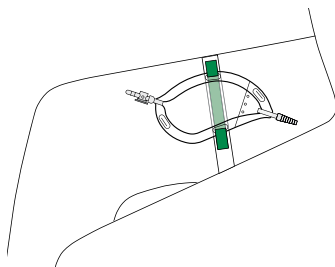

Den Beutel mit Hilfe der Gurte am Bein befestigen.

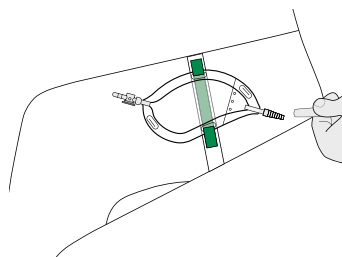

Den Beutel mit Kondom verbinden.

Tipp

Die Befestigung des Kinderbeutels kann ebenfalls mit Beinbeuteltaschen vorgenommen werden | Seite 69

FRAGEN? **WIR HELFEN WEITER ...**



+49 6226 960100

Festnetz oder per WhatsApp




SAUER-Funktionsbeutel

Urin-Auffangbeutel für Bettlägerige und Fußgänger | fest montierter Adapter
Einlaufschlauch nicht kürzbar | 2,0 Liter

**2,0
Liter**

**771.11120-xx –
771.32120-xx.S**

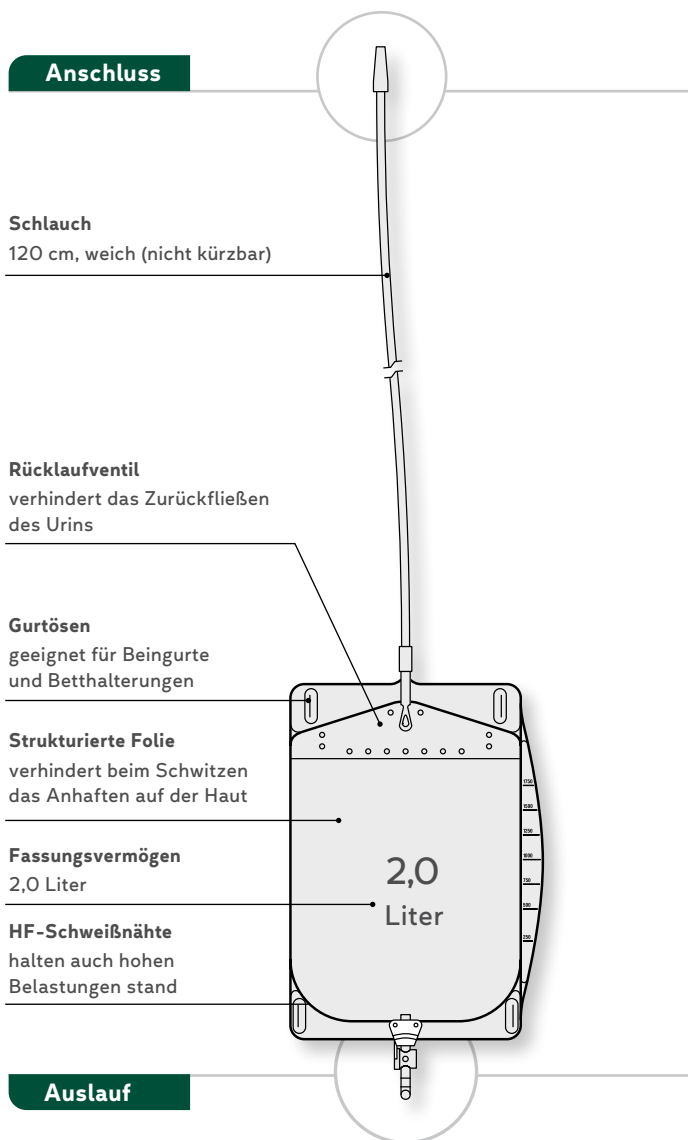

Fest montierter glatter oder gestufter Adapter

universell verwendbar, zum Anschluss an alle Urinal-Kondome und Dauerkatheter (bei steriler Ausführung)



Schwenkhahn bei eingeschränkter Handfunktion



Schiebehahn zur Einhandbedienung



Drehhahn dezent unter der Kleidung und ideal für den Anschluss eines Bettbeutels mit einem Kupplungsschlauch (z.B. 55.38)

Gerader Einlauf und Rücklaufventil. Rechteckige Form. Zum Anschluss an alle Urinal-Kondome und Dauerkatheter (bei steriler Ausführung).



- › Die Beutel sind in Packungen mit 10 und 30 Stück erhältlich. Bei der Best.-Nr. „xx“ durch die gewünschte Packungseinheit ersetzen (z.B. 771.11120-30).
- › Beutelbefestigung: Beingurte | S. 68 Beinbeutel taschen | S. 69

SAUER-Funktionsbeutel

Diese Beutel in der bewährten „SAUER-Qualität“ haben die gleichen Ausstattungsmerkmale wie die SAUER-Beinbeutel. Mit dem Funktionsbeutel kommen wir dem Wunsch nach Bettbeuteln mit einem hohen Fassungsvermögen und gleichzeitiger Beinanbringung für kurzzeitiges Aufstehen entgegen und ermöglichen zusätzlich Personen mit eingeschränkter Handfunktion durch die verschiedenen Entleerungsarten mehr Selbstständigkeit. Sie vereinen zwei unterschiedliche Funktionen: Sie können nachts als Bettbeutel und tagsüber als Beinbeutel verwendet werden.

Funktionsbeutel verfügen über ein Rücklaufventil und sind zum Teil in steriler Ausführung erhältlich. Nur in steriler Ausführung sind sie für die Anwendung mit Dauerkathetern geeignet.

Auslauf	Anschluss	Schlauch	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	▼
Schwenkhahn	glatter Adapter	120 cm weich	10 St.	771.11120-10	06097851	15.25.06.1033	1
			30 St.	771.11120-30	06097868	15.25.06.1033	2
	gestufter Adapter	120 cm weich	10 St.	771.12120-10	06098081	15.25.06.1033	3
			30 St.	771.12120-30	06098098	15.25.06.1033	4
Schiebehahn	glatter Adapter	120 cm weich	10 St.	771.21120-10	06097911	15.25.06.1033	5
			30 St.	771.21120-30	06097928	15.25.06.1033	6
	gestufter Adapter	120 cm weich	10 St.	771.22120-10	06098170	15.25.06.1033	7
			30 St.	771.22120-30	06098187	15.25.06.1033	8
Drehhahn	gestufter Adapter	120 cm weich	10 St.	771.32120-10.S	06098141	15.25.06.3032	9
			30 St.	771.32120-30.S	06098158	15.25.06.3032	10

STERIL

PZN = Pharmazentralnummer HMV-Nr. = Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

STERIL Sterile Beutel mit Schiebe- und Drehhahn werden mit einem sterilen Kupplungsschlauch geliefert

Funktionsbeutel und Kostenträger

Zur Abrechnung mit Kostenträgern (Kassen, BG) wird der Funktionsbeutel aufgrund seines Fassungsvermögens als Bettbeutel eingestuft. Er kann aber nicht innerhalb des Festbetrages abgerechnet werden. Die Differenz zum Festbetrag ist in der Regel als wirtschaftliche Aufzahlung vom Kunden zu tragen.

Sofern man den Funktionsbeutel sowohl tagsüber als auch nachts einsetzt, ist das für den Kostenträger günstiger als einen Bettbeutel und Beinbeutel abzurechnen. Dies ist vorab mit den Kostenträgern zu klären.

Bettbeutel

Urin-Auffangbeutel für Bettlägerige und Fußgänger | fest montierter Adapter
Einlaufschlauch nicht kürzbar | 3,0 Liter

**3,0
Liter**

793.28130-10

Anschluss

Schlauch

130 cm, weich (nicht kürzbar)

Gurtösen

geeignet für
Betthalterungen

Rücklaufventil

verhindert das
Zurückfließen des Urins

Fassungsvermögen

3,0 Liter

Auslauf

**Gestuft Adapter,
fest montiert**

universell verwendbar

Schiebehahn

zur Einhand-
bedienung

Rechteckige Form, gerade
eingesetzter Schlauch, mit
einem Fassungsvermögen
von 3,0 l.



› Die Beutel sind in
Packungen mit 10 Stück
erhältlich.

Bettbeutel mit fest montiertem Adapter

Für die Nacht, bei Bettlägerigkeit und beim Katheterisieren. Zur Anwendung mit allen Urinal-Kondomen, Beinbeuteln I **Seite 38** und Einmalkathetern.

- Fassungsvermögen: 3,0 Liter, Skala
- Einlauf: gerade eingesetzter Schlauch, Länge 130 cm, nicht kürzbar, Rücklaufventil
- Adapter: fest montiert, gestuft, für den Anschluss an Urinal-Kondome, Beinbeutel und Einmalkatheter
- Auslauf: Schiebehahn

Auslauf	Anschluss	Schlauch	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	▼
Schiebehahn	gestufter Adapter fest montiert	130 cm weich, nicht kürzbar	10 St.	793.28130-10	18002672	15.25.06.1043	1

PZN = Pharmazentralnummer HMV-Nr. = Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

FRAGEN? **WIR HELFEN WEITER ...**




+49 6226 960100
Festnetz oder per WhatsApp



SAUER-NephSys – Nephrostomie-Drainagesystem

SAUER-NephSys-Beutel (steril) und SAUER-NephSys-Gurtsets Basic & Comfort

Das SAUER-NephSys System ist sowohl für die ein- als auch für die beidseitige Anwendung geeignet.

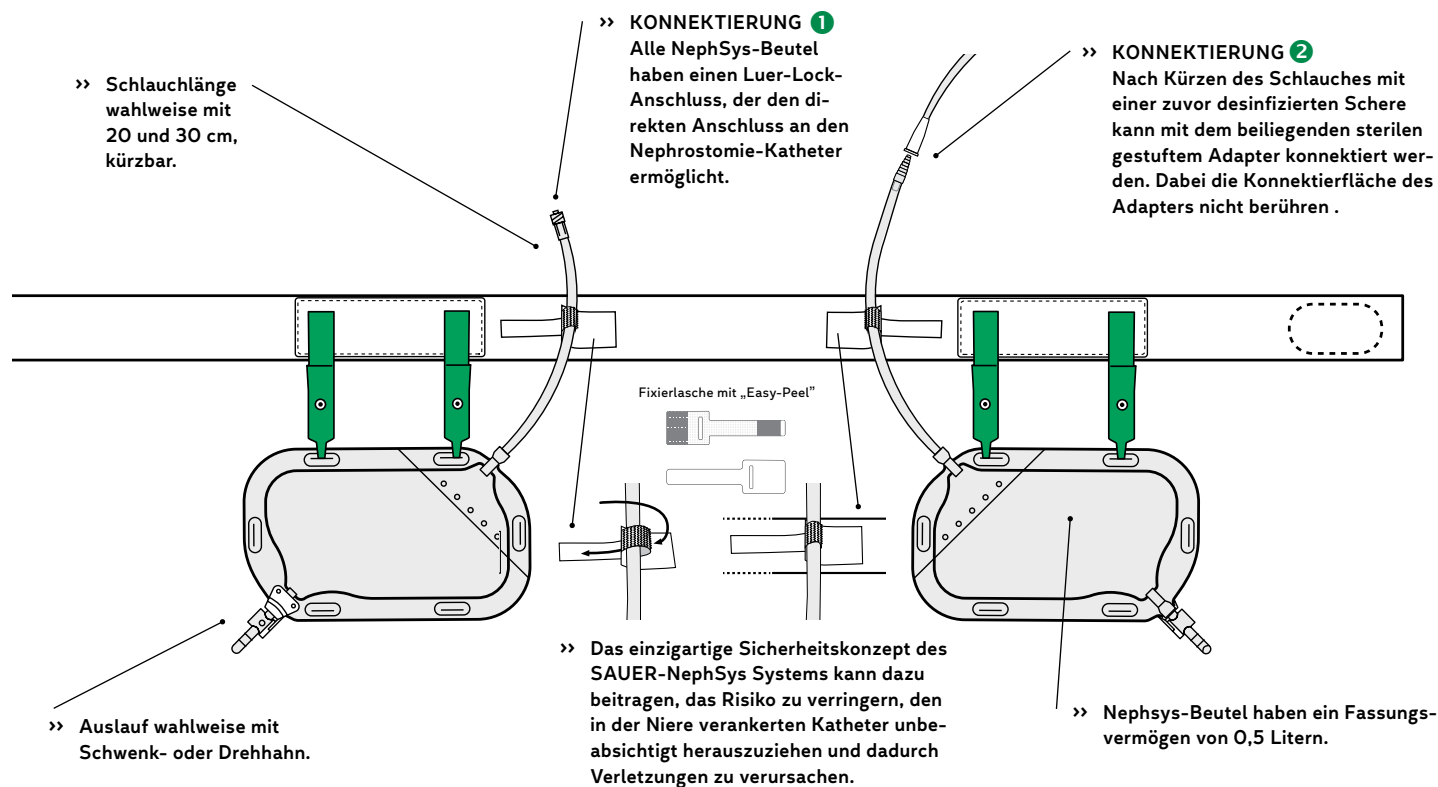


Das SAUER-NephSys System kann diskret und unauffällig unter der Kleidung getragen werden.



1. Leibgurt anlegen und kürzen


Dazu die Gurt-Seite mit den Silikonlinien auf der Haut positionieren, den Gurt unter leichtem Zug nach Belieben zwischen Taille und Hüfte anlegen.

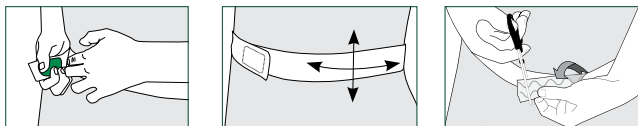

2. Klettpad positionieren und fixieren

Das Klettpad an der Körperseite befestigen, an der sich das ableitende System, z. B. der Nierenfistelkatheter, befindet. *Tipp: Bei der Comfort-Variante empfiehlt es sich, zuerst den Beutel am Klettpad zu befestigen*

Basic

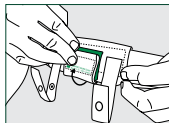

Comfort




3. Beutel am Klettpad befestigen

Die beiden Haltelaschen des Klett pads durch die Gurtösen des Beutels fädeln und die Druckknöpfe schließen.


Basic




Comfort

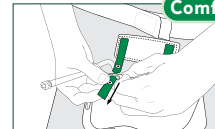

4. Beutel an Katheter konnektieren

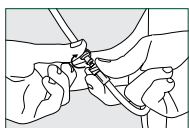


1 Verbinden Sie den männlichen Luer-Lock-Anschluss am Beutel mit dem weiblichen Luer-Lock-Anschluss am Nephrostomiekatheter durch Drehen im Uhrzeigersinn.

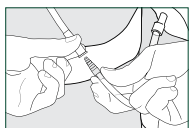

2 Schutzkappe vom Adapter entfernen. Adapter auf den Schlauch aufstecken, ohne die Konnektierfläche des Adapters zu berühren. Den Adapter des Beutels zugfrei mit dem Konnektor des Katheters verbinden.



5. Einlaufschlauch mit der Zugentlastung sichern

Basic

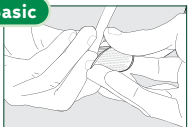


Um das Risiko des Verdrehens des Einlaufschlauches oder Zuges am Katheter zu vermindern, wird der Schlauch mit Hilfe der Zugentlastung am Leibgurt in einer geeigneten Position fixiert.


Comfort

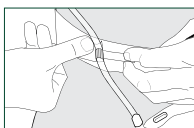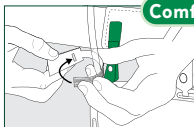

Gurtset Basic

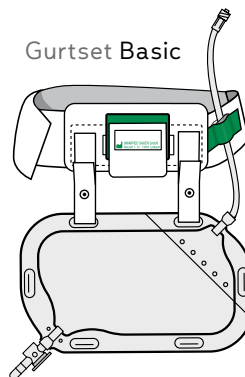

Gurtset Comfort

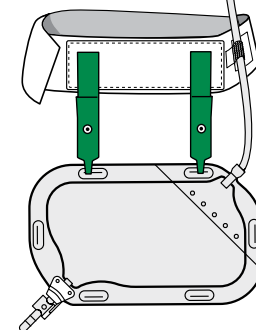

SAUER-NephSys-Gurtset Basic

Menge Best.-Nr./REF

Zugentlastung, 1 Fixier-Hakenband,
10 Fixier-Klebepunkte


1 Set 57.40

Zubehör  10 Fixier-Klebepunkte
1 Fixier-Hakenband


SAUER-NephSys-Gurtset Basic, 1 Leibgurt, 1500
mm x 38 mm, 2 Klett pads, 2 Fixier-Hakenbänder,
4 Fixier-Klebepunkte

1 Set 57.42

2 Klett pads

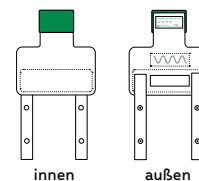

1 Leibgurt 150 cm

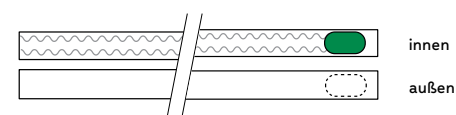

 4 Fixier-Klebepunkte
2 Fixier-Hakenbänder


SAUER-NephSys-Gurtset Comfort

Menge Best.-Nr./REF


SAUER-NephSys-Gurtset Comfort, 1 Leibgurt,
1700 mm x 38 mm, 2 Klett pads, 2 Fixierlaschen

1 Set 57.43

2 Klett pads

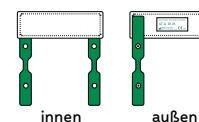

1 Leibgurt 170 cm

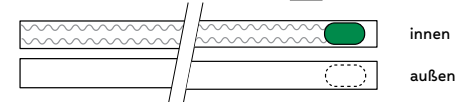

2 Fixierlaschen

SAUER-NephSys-Beutel (steril)

**0,5
Liter**

**721.17x0.SE–
721.37x0.SE**

Anschluss

HF-Schweißnähte
halten auch hohen
Belastungen stand

Rücklaufventil
verhindert das Zurück-
fließen des Urins

Fassungsvermögen
0,5 Liter

Strukturierte Folie
verhindert beim Schwitzen
das Anhaften auf der Haut


Luer-Anschluss,
fest montiert

Gestuft Adapter,
aufsteckbar

Auslauf

Schwenkhahn
bei eingeschränkter
Handfunktion

Drehhahn
dezent unter der Kleidung
und ideal für den An-
schluss eines Bettbeutels
mit einem Kupplungs-
schlauch (z. B. 55.38)

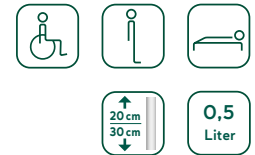

- › Die Beutel sind in Packungen mit 10 Stück erhältlich.
- › Beutelbefestigung: SAUER-NephSys-Gurts: **Basic** und **Comfort** | S. 65

SAUER-NephSys-Beutel |

Kupplungsschlauch | diagonaler Einlauf | Rücklaufventil | Kupplungsschlauch |
gestufter Adapter, aufsteckbar | steril | 0,5 Liter

Auslauf	Anschluss	Schlauch	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.	▼
Schwenkhahn	Luer-Anschluss, fest montiert	20 cm, weich	10 St.	721.1720.SE	18154850	–	1 STERIL
	Luer-Anschluss, fest montiert	30 cm, weich	10 St.	721.1730.SE	18154867	–	2 STERIL
Drehhahn	Luer-Anschluss, fest montiert	20 cm, weich	10 St.	721.3720.SE	18154873	–	3 STERIL
	Luer-Anschluss, fest montiert	30 cm, weich	10 St.	721.3730.SE	18154896	–	4 STERIL

PZN = Pharmazentralnummer HMV-Nr. = Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

STERIL Sterile Beutel mit Schiebe- und Drehhahn werden mit einem sterilen Kupplungsschlauch geliefert

FRAGEN? **WIR HELFEN WEITER ...**



+49 6226 960 100
Festnetz oder per WhatsApp



Bein- und Haltegurte

P.Grip Haltegurt – Elastik

1 Gurt, 600 mm x 38 mm, mit Klettverschluss und rutschfester Silikonbeschichtung, 1 Hakenband, grün, 130 mm x 20 mm, 2 Fixier-Klebeunkte, weiß, selbstklebend, 43 mm x 25 mm

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
1 St.	57.38	18806844	15.99.99.0008

P.Grip Haltegurt – Elastik

1 Gurt, 900 mm x 38 mm, mit Klettverschluss und rutschfester Silikonbeschichtung, 1 Hakenband, grün, 130 mm x 20 mm, 2 Fixier-Klebeunkte, weiß, selbstklebend, 43 mm x 25 mm

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
1 St.	57.39	18806850	15.99.99.0008

Breiter Beingurt – Elastik

60 cm lang, ca. 38 mm breit, mit Klettverschluss, eingenähtem Gummizug und aufgesetzter Klettflasche, 2 cm breit. Zum Befestigen eines Rolli- oder Fußgängerbeutels, mit rutschfester Silikonbeschichtung auf der Unterseite. Der Tränergurt ist insgesamt elastisch, deshalb ohne Gummizug. Mit Schlaufe zum leichteren Öffnen des Gurtes.

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
1 St.	57.44	08635979	15.99.99.0008

Schmaler Beingurt

55 cm lang, 2 cm breit, mit Klettverschluss und eingenähtem Gummizug. Zum Befestigen eines Rolli- oder Fußgängerbeutels. 2 Clips.

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
1 St.	57.48	07138730	15.99.99.0008

Schmaler Beingurt – Elastik


55 cm lang, 2 cm breit, mit Klettverschluss und rutschfester Silikonbeschichtung auf der Unterseite. Der Gurt ist insgesamt elastisch, deshalb ohne Gummizug. Ohne Clips. Als Greifhilfe zum leichteren Öffnen dient der kurze Überstand des Gummibandes. Zum Befestigen eines Rolli- oder Fußgängerbeutels.

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
1 St.	57.49	08913533	15.99.99.0008

Clip

Zum Befestigen eines Rollibeutels am schmalen Beingurt 57.48.

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
1 St.	57.53	07138693	15.99.99.0001

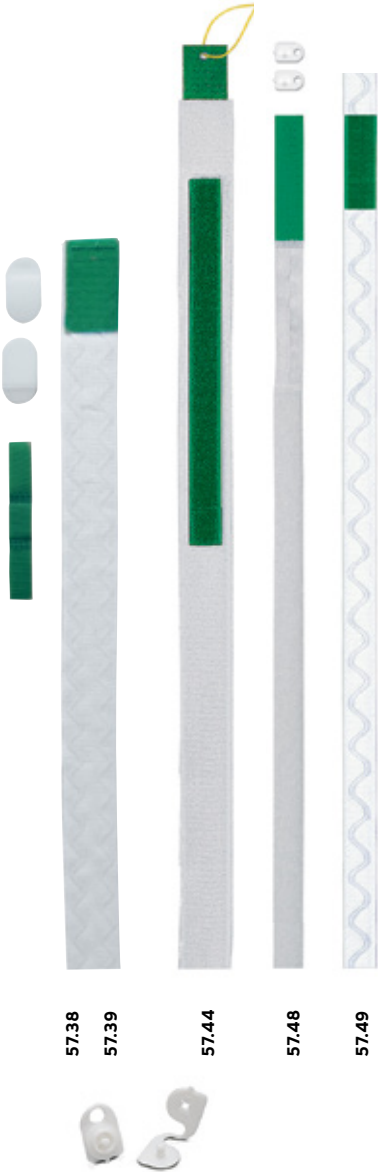

Beinbeuteltaschen

Speziell für Fußgänger kann eine Beinbeuteltasche, auch Holster genannt, eine alternative Befestigungsart für Fußgängerbeutel bis 0,6 l (rechteckige Form) sein. Um den Beutel entleeren zu können, haben alle Beinbeuteltaschen am unteren Rand eine Öffnung, durch die der Auslaufhahn geführt werden kann. Beinbeuteltaschen sind in bis zu vier Größen erhältlich. Sie werden aus hautfreundlichem, elastischem Material gefertigt, sind waschbar und trocknergeeignet.



Beinbeuteltaschen (Holster)

Beinbeuteltasche – Carebag

Geschnitten wie eine Stulpe, mit aufgenähter Tasche. Zur Fixierung dient ein elastischer Bund am oberen und unteren Rand. Kann am linken oder am rechten Bein, auch am Unterschenkel, getragen werden. Für Fußgängerbeutel und Rechteckbeutel mit 0,6 l Fassungsvermögen | **Seite 50 und 54**, die Ausführung „Klein (Small)“ auch für Kinderbeutel | **Seite 59**.

Material: 80 % Polyester, 20 % Elasthan
 Pflege: waschbar 60°C, trocknergeeignet (niedrige Temperatur)

Beinumfang*	Größe	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
24–39 cm	Klein (Small)	1 St.	Z911.58 	08759859	15.99.99.0009
36–55 cm	Mittel (Medium)	1 St.	Z912.58 	08759888	15.99.99.0009
40–70 cm	Groß (Large)	1 St.	Z913.58 	08759925	15.99.99.0009

* gemessen im Bereich des oberen Bundes der Beinbeuteltasche

Beinbeuteltasche – Urobag

Geschnitten wie eine Stulpe, mit Klettverschluss und aufgenähter Tasche. Zur Fixierung dient ein elastischer Bund am oberen und unteren Rand. Kann am linken oder am rechten Bein, auch am Unterschenkel, getragen werden. Für Fußgängerbeutel und Rechteckbeutel mit 0,6 l Fassungsvermögen | **Seite 50 und 54**.

Material: 80 % Polyester, 20 % Elasthan
 Pflege: waschbar 60°C, trocknergeeignet (niedrige Temperatur)

Beinumfang*	Größe	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
30–45 cm	Klein (Small)	2 St.	Z91.01 	09293268	15.99.99.0009
36–60 cm	Mittel (Medium)	2 St.	Z91.02 	09293274	15.99.99.0009
45–75 cm	Groß (Large)	2 St.	Z91.03 	09293280	15.99.99.0009
54–90 cm	Extragroß (X-Large)	2 St.	Z91.04 	09293297	15.99.99.0009

* gemessen im Bereich des oberen Bundes der Beinbeuteltasche

Zubehör

Schlauch

			Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
Weich-PVC	Ø innen 5,3 mm, außen 7,3 mm	cm*	55.00	07138888	15.99.99.0002
Latex	Ø innen 6,0 mm, außen 9,0 mm	cm*	55.06	00591633	15.99.99.0002
Latex	Ø innen 8,0 mm, außen 12,0 mm	cm*	55.08	07138262	15.99.99.0002

* Länge nach Wunsch in cm



Kupplungsschlauch

		Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
Latex	Ø innen 6,0 mm, außen 9,0 mm, 5 cm lang	5 St.	55.38	00967162	15.99.99.0003
Silikon		5 St.	55.39	00967191	15.99.99.0003



Adapter

Zum Anschluss eines Urin-Beinbeutels mit weichem, kürzbarem Einlaufschlauch an ein Urinal-Kondom oder einen Katheter.

	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
aufsteckbar, glatt	5 St.	60.09	00860168	15.99.99.0003
aufsteckbar, gestuft	5 St.	60.10	00860398	15.99.99.0003



Auslaufhahn

	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
Schwenkhahn	5 St.	57.67	00859722	15.99.99.0001
Drehhahn	5 St.	57.68	00859745	15.99.99.0001
Schiebehahn	5 St.	57.66	00859716	15.99.99.0001



57.67



57.68



57.66

Ventile

Mit gestuften Adapter.

	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
Schwenkhahn mit gestuften Adapter	5 St.	60.20	17876297	15.99.99.0003
Schwenkhahn mit gestuften Adapter u. Kupplungsschlauch	5 St.	60.21	18782635	15.99.99.0003
Schiebehahn mit gestuften Adapter	5 St.	60.26	17876305	15.99.99.0003
Drehhahn mit gestuften Adapter und Kupplungsschlauch	5 St.	60.33	17876311	15.99.99.0003



60.20



60.21



60.26



60.33

Sicherungsring

Für Schwenkhahn, verhindert unbeabsichtigtes Öffnen.

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
10 St.	55.32	16938955	15.99.99.0003



55.32

Draht-Betthalterung

Mit runden Haken, weiß lackierter Stahl, Tragfähigkeit 3 l (kg)

Überbeutel

Zum Einlegen eines Urin-Bettbeutels. Der Überbeutel dient so als Sichtschutz und bietet zusätzliche Sicherheit (wasserdicht). Passend für alle Bettbeutel bis 3 Liter. Aus undurchsichtiger Folie.

Die Abbildung zeigt ein Anwendungsbeispiel. Betthalterung und Urin-Bettbeutel werden nicht mitgeliefert, bei Bedarf bitte separat bestellen.



70.56



70.50

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
1 St.	70.56	10329698	15.99.99.0010

Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
1 St.	70.50	17755205	15.99.99.0010

URI**bag**®



999.806

Faltbare Urinflasche Uribag

Der Uribag ist für Männer und Frauen in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Sie haben folgende Merkmale gemeinsam:

- faltbarer Urin-Auffangbeutel aus weichem Latex
- Ansatzstück und Deckel aus Kunststoff
- sicher verschließbar
- hohes Fassungsvermögen von 1,2 Liter
- wiederverwendbar

Der Unterschied besteht in der Form des Ansatzstückes. Für Männer hat es die Form eines Zylinders, für Frauen ist das Ansatzstück der weiblichen Anatomie angepasst.

Ausführung	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
Uribag für Männer	1 St.	999.806	07357917	-
Uribag F für Frauen	1 St.	999.808	00680319	-

Uribag

Was tun, wenn man muss, aber kein „stilles Örtchen“ in der Nähe ist? Nicht nur Rollstuhlfahrer/innen sind davon betroffen. Auch Kranführer, Segelflieger, Autofahrer und viele andere kennen dieses Problem.

Der Uribag hilft in dieser Not: Sicher und diskret – zusammenfaltbar – wiederverwendbar.



999.808

- 1 Der Deckel verschließt den Uribag sicher. Beim Uribag für Männer ist er durch eine Lasche gesichert, so dass er nicht verloren gehen kann.
- 2 Das Ansatzstück besteht aus Kunststoff.
 - ♂ Für Männer ist es zylinderförmig (Länge 8 cm, Durchmesser 4 cm).
 - ♀ Für Frauen ist es der weiblichen Anatomie angepasst.
- 3 Der Urin-Auffangbeutel besteht aus weichem Latex und nimmt 1,2 Liter Flüssigkeit auf.
 - ↗ Der Urin-Auffangbeutel kann im Ansatzstück komplett verstaut werden.

Anwendung

Den Urin-Auffangbeutel aus dem Ansatzstück unten herausziehen und den Deckel des Uribag öffnen.

Nach Entleerung den Uribag einfach mit Wasser ausspülen, evtl. etwas Reinigungsmittel oder ein geeignetes Desinfektionsmittel zugeben. Anschließend trocknen.

i

Die Manfred Sauer GmbH bietet die komplette Versorgung bei Blaseninkontinenz für Rollstuhlfahrer, Fußgänger, Bettlägerige und Teilinkontinente. Dazu stehen verschiedene Informationsmaterialien in mehreren Sprachen zur Verfügung, die wir Ihnen gerne kostenlos zusenden.

Maßband 99.897



Informationsmaterial

Katalog „Kontinenz-Systeme“

Kontinenz-Systeme der Manfred Sauer GmbH, 80 Seiten.

Menge Best.-Nr./REF

1 St. **99.900**

Schulungsmappe „Kondom-Urinal“

Umfangreiche Hinweise zur Anwendung unserer Kondom-Urinalen, 44 Seiten.

Menge Best.-Nr./REF

1 St. **99.890**

Maßband für Urinal-Kondom

Zur Ermittlung der exakten Kondomgröße. Es ist kostenlos erhältlich.

Menge Best.-Nr./REF

1 St. **99.897**

Flyer für den ISK

Menge Best.-Nr./REF

IQ-Cath – Der Einmalkatheter

1 St. **99.936**

IQ-Cath – Frauen

1 St. **99.913**

IQ-Cath – Der Einmalkatheter mit Sleeve

1 St. **99.910**

KIC-System

1 St. **99.920**

Flyer für Urinal-Kondome

SAUER-Comfort

1 St. **99.912**

SAUER-Comfort – Violett

1 St. **99.914**

Flyer für Nephrostomie Drainagesystem

SAUER-NephSys

1 St. **99.939**

Besuchen Sie uns im Internet:
www.manfred-sauer.com

Artikelfinder

Best.-Nr./REF	Seite	55.00	68	701.2212-xx	45	721.3730.SE	67	97.4511.32	28
100.01	21	55.06	68	701.2212-xx.S	45	723.3200-xx	59	97.4511.35	28
100.05	21	55.08	68	701.2222-xx	45	723.3200-xx.S	59	97.6000.20	27
103.24	21	55.32	71	701.2222-xx.S	45	731.1345-xx	53	97.6000.24	27
103.26	21	55.38	21, 68	701.2335-xx	43	731.1445-xx	53	97.6000.26	27
103.28	21	55.39	41, 68	701.2435-xx	43	731.2345-xx	53	97.6000.28	27
103.30	21	56.24	31	701.2435-xx.S	43	731.2445-xx	53	97.6000.30	27
103.30.D	21	56.26	31	701.3020-xx	43	732.2208-xx	55	97.6000.32	27
103.32	21	56.28	31	701.3435-xx	43	732.2232-xx	55	97.6000.35	27
103.35	21	56.30	31	701.5020-xx	43	771.11120-xx	61	97.6000.37	27
103.35.D	21	56.32	31	701.2912-xx.S	45	771.12120-xx	61	97.6000.40	27
110.02	19	56.35	31	702.1020-xx	47	771.21120-xx	61	97.6001.22	27
110.33	19	56.40	31	702.1112-xx	49	771.22120-xx	61	97.6001.24	27
110.60	19	57.38	68	702.1212-xx	49	771.32120-xx.S	61	97.6001.26	27
110.61	19	57.39	68	702.1335-xx	47	793.28130-30	62	97.6001.28	27
110.65	19	57.40	65	702.1435-xx	47	93.25	29	97.6001.30	27
110.66	19	57.42	65	702.2020-xx	47	93.29	29	97.6001.32	27
50.00	35	57.43	65	702.2112-xx	49	93.32	29	97.6001.35	27
50.01	35	57.44	68	702.2212-xx	49	93.36	29	97.6001.37	27
50.03	35	57.48	68	702.2335-xx	47	93.41	29	97.6001.40	27
50.09	36	57.49	68	702.2435-xx	47	94.25	29	97.7501.22	25
50.05	36	57.53	68	702.3435-xx	47	94.29	29	97.7501.24	25
50.14	36	57.66	71	710.1345-xx	51	94.32	29	97.7501.26	25
50.20	35	57.67	71	710.1445-xx	51	94.36	29	97.7501.28	25
50.22	35	57.68	71	710.2345-xx	51	95.25	29	97.7501.30	25
50.23	36	60.09	66	710.2445-xx	51	95.29	29	97.7501.32	25
50.38	37	60.10	66	710.2445-xx.S	51	95.32	29	97.7501.35	25
50.50	37	60.20	71	711.1345-xx	51	95.36	29	97.7501.37	25
50.52	37	60.21	71	711.1445-xx	51	95.41	29	97.7501.40	25
50.58	37	60.26	71	711.2345-xx	51	97.18	25	99.890	73
52.70-24	37	60.33	71	711.2445-xx	51	97.20	25	99.895	73
52.70-28	37	70.50	71	711.3445-xx	51	97.22	25	99.897	73
52.70-30	37	70.56	71	711.3445-xx.S	51	97.24	25	99.898	73
52.70-32	37	701.1020-xx	43	720.1000-xx	57	97.26	25	99.900	73
52.70-35	37	701.1112-xx	43	720.1100-xx	57	97.28	25	99.912	73
53.24	33	701.1112-xx.S	43	720.2000-xx	57	97.30	25	99.914	73
53.26	33	701.1122-xx	45	720.2200-xx	57	97.32	25	99.920	73
53.26.D	33	701.1212-xx	45	721.1000-xx	57	97.35	25	99.921	73
53.28	33	701.1212-xx.S	45	721.1100-xx	57	97.37	25	99.936	73
53.30	33	701.1222-xx	45	721.1200-xx	57	97.40	25	99.939	73
53.30.D	33	701.1222-xx.S	45	721.1720.SE	67	97.4511.18	28	999.806	72
53.32	33	701.1335-xx	43	721.1730.SE	67	97.4511.20	28	999.808	72
53.35	33	701.1435-xx	43	721.2000-xx	57	97.4511.22	28	IQ 2004.10	7
53.35.D	33	701.1435-xx.S	43	721.2100-xx	57	97.4511.24	28	IQ 2004.12	7
53.37	33	701.2020-xx	43	721.2200-xx	57	97.4511.26	28	IQ 2004.14	7
53.40	33	701.2112-xx	45	721.3200-xx	57	97.4511.28	28	IQ 2004.16	7
53.50	37	701.2122-xx	45	721.3720.SE	67	97.4511.30	28	IQ 2014.12	7

IQ 2014.14.....	7	IQ 3004.14.....	15
IQ 2014.16.....	7	IQ 3004.16.....	15
IQ 2014.18.....	7	IQ 3104.10.....	15
IQ 2104.10.....	7	IQ 3104.12.....	15
IQ 2104.12.....	7	IQ 3104.14.....	15
IQ 2104.14.....	7	IQ 3104.16.....	15
IQ 2104.16.....	7	IQ 3114.12.....	15
IQ 2104.18.....	7	IQ 3114.14.....	15
IQ 2114.10.....	7	IQ 3114.16.....	15
IQ 2114.12.....	7	IQ 3204.10.....	17
IQ 2114.14.....	7	IQ 3204.12.....	17
IQ 2302.10.....	13	IQ 3204.14.....	17
IQ 2302.12.....	13	IQ 3204.16.....	17
IQ 2302.14.....	13	IQ 3204.18.....	17
IQ 2303.10.....	13	IQ 3604.12.....	17
IQ 2303.12.....	13	IQ 3604.14.....	17
IQ 2303.14.....	13	IQ 3604.16.....	17
IQ 2304.10.....	9	IQ 3614.12.....	17
IQ 2304.12.....	9	IQ 3614.14.....	17
IQ 2304.14.....	9	IQ 4303.10.....	11, 13
IQ 2304.16.....	9	IQ 4303.12.....	11, 13
IQ 2304.18.....	9	IQ 4303.14.....	11, 13
IQ 2604.12.....	9	IQ 4304.10.....	11
IQ 2604.14.....	9	IQ 4304.12.....	11
IQ 2604.16.....	9	IQ 4304.14.....	11
IQ 2614.12.....	9	IQ 4304.16.....	11
IQ 2614.14.....	9	IQ 4304.18.....	11
IQ 2614.16.....	9	Z91.01.....	69
IQ 2902.10.....	13	Z91.02.....	69
IQ 2902.12.....	13	Z91.03.....	69
IQ 2902.14.....	13	Z91.04.....	69
IQ 2904.10.....	9	Z911.58.....	69
IQ 2904.12.....	9	Z912.58.....	69
IQ 2904.14.....	9	Z913.58.....	69
IQ 2904.16.....	9		
IQ 2904.18.....	9		
IQ 3004.12.....	15		

Latex-Artikel

Viele unserer Kunden bestätigen eine langjährige Anwendung der SAUER-Urinal-Kondome aus Latex ohne Hautreaktionen. Für Latex spricht auch, dass es gegenüber Synthesematerialien unbestrittene Vorteile hat: ein nahezu unbegrenzt zur Verfügung stehendes Naturprodukt, gewonnen vom Kautschukbaum, und umweltfreundlich sowohl in der Herstellung als auch in der Entsorgung.

Haben Sie begründete Bedenken gegen die Verwendung von latexhaltigen Kondomen oder Hautklebern oder ist bei Ihnen eine entsprechende Unverträglichkeit nachgewiesen worden, können Sie auf latexfreie, aus synthetischen Materialien bestehende Produkte wechseln.

Man darf nicht vergessen, dass Synthesekautschuk und Silikon eine Vielzahl von chemischen Substanzen enthalten, deren Wirkungen noch nicht ausreichend bekannt sind. Die Herstellung und Verarbeitung von Synthesekautschuk, einem Erdölprodukt, ist aufwendiger und aufgrund der hohen Anteile benzinähnlicher Lösemittel für die Mitarbeiter in der Produktion und für die Umwelt wesentlich problematischer.

Mehr zu diesem Thema finden Sie in unserer Schulungsmappe „Kondom-Urinal“, die Sie bei Bedarf anfordern oder von unserer Homepage herunterladen können:

www.manfred-sauer.com

ZERTIFIZIERUNG

Die MANFRED SAUER GmbH ist nach DIN EN ISO 13485:2021 durch die TÜV Süd Product Service GmbH zertifiziert. Weiterhin zertifiziert die TÜV Süd Product Service GmbH die Katheter und die sterilen Beutel der Manfred Sauer GmbH nach der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte, Anhang VIII.

Technische Änderungen unserer Produkte und andere Formen der Verpackung, die z. B. dem Umweltschutz dienen, behalten wir uns vor.

Stichwortverzeichnis

100 %-Prüfung	5, 23, 32	KIC-Spreizring.....	21	Tragedauer	23, 36, 41,
Abdecktuch.....	37, 21, 25–33	KIC-System.....	20, 21	Überbeutel	71
Ableitungssset.....	13	Kinderbeutel	58	UltraFlex – selbstklebende Kondome	29
Adapter	39–61, 64, 70	Klebeband – Doppelseitiges Klebeband		Uribag – Faltbare Urinflasche.....	72
Anti-Allergen – Synthetik-Kondome.....	30	Klebekraft.....	37	Urinal-Kondome.....	22–33
Auslauf	39–61, 71	Kleber-Entfernungstücher	37	Ausstattungsmerkmale	22
Auslaufhahn.....	71	Klebeverstärkung	37	Auswahl.....	23
Befestigung für Urin-Beinbeutel	68–69	Klebewirkung	22, 24	gebrauchsfertig	24–29
Beinbeuteltaschen.....	69	Klebezone.....	24–28	Latex-Kondome.....	32
Beingurte	59, 68	Klettpad.....	65	nicht gebrauchsfertig.....	24, 25
Beschichtung (Viskose-Flock).....	38, 40, 50	Knie-Spreiz-Kissen.....	19	ohne Pufferzone.....	29
Bettbeutel.....	62	Kochsalzlösung.....	4–13	selbstklebend.....	24–29
Beutelbefestigung	68, 69	Kondome – Urinal-Kondome		separate Fixierung	30, 33
Carebag – Beinbeuteltasche.....	69	Kondom-Fixierung.....	34–37	Synthetik-Kondome	22–31
Charrière	6–16	Kundenberatung	77	Urin-Auffangbeutel.....	38
Clip	68	Kupplungsschlauch		NephSys-Beutel	66
Comfort – selbstklebende Kondome	23–28		21, 41, 42–64, 74	Urin-Beinbeutel.....	38
Däumling.....	23	Latex-Artikel.....	75	Ausstattungsmerkmale	38, 39
Diskretbeutel	58	Latex-Hautkleber.....	34	Befestigung	68, 69
Doppelseitiges Klebeband.....	36	Linksträger (Rollibeutel).....	41, 43	Diskretbeutel.....	58
Draht-Betthalterung	71	Maßband.....	23, 67	Fußgängerbeutel.....	50–53
Drehhahn	39, 41, 42–65, 71	Nephrostomie Drainage-System.....	64–68	Kinderbeutel.....	58
Einlauf	39–65, 71	NephSys	64–68	Rechteckbeutel.....	54
Einmalkatheter – IQ-Cath Einmalkatheter.....	4	Peel-Verpackung.....	4, 8, 9, 11	Rollibeutel.....	42–49
Faltbare Urinflasche Uribag.....	72	P.Grip	68	Spezialanfertigungen.....	40
Fassungsvermögen	38–65	Pop-On – selbstklebende Kondome	29	Sportbeutel.....	56
Fixier-Klebeplatz	65, 68	Preventox	37	sterile Ausführung.....	43, 45, 51, 59, 61, 64
Fixier-Hakenband	65	Pufferzone.....	23–33	Tragedauer.....	41
Funktionsbeutel	60	Rechteckbeutel.....	54	Urinflasche Uribag.....	52
sterile Ausführung	60	Roller (Preventox).....	37	Urobag – Beinbeuteltasche.....	69
Fußgängerbeutel.....	50–53	Rollibeutel.....	42–49	Ventile	71
Gel	4, 14	Rücklaufventil.....	39–62	Ventilkörper.....	39
Gleitgel	4, 14	SAUER-Comfort	24–28	Viskose-Flock.....	38, 40, 50
Gurtset Basic – Comfort	64	Schere	37	Wide-Band – selbstklebende Kondome.....	29
Haltegurte.....	68	Schiebehahn	39–61, 65	Zubehör.....	70
Hautkleber	34	Schlauch	21, 41, 66	Zubehör für Urinal-Kondome.....	37
Latex-Hautkleber	35	Schlauchansatz.....	24–28, 30		
Synthetik-Hautkleber	36	Schlauchkupplung	70		
Hilfsmittel für den ISK.....	18, 19	Schulungsmappe „Kondom-Urinal“	73		
Hygiene	23, 36	Schwenkhahn	39, 41, 42–61, 71		
Informationsmaterial	67	Schwenkhahn (gelb), gedreht	41, 43		
IQ-Cath – Einmalkatheter für den ISK	4–17	Selbstklebende Kondome.....	22–29		
Hydrophiler Einmalkatheter	6–13	ohne Pufferzone.....	29		
Gel-Einmalkatheter	14–17	SAUER-Comfort.....	24–28		
ISK (Intermitt. Selbstkatherismus)	4	Sicherungsring	71		
ISK-Hilfsmittel.....	18, 19	Sleeve	10, 11, 13		
Katalog „Kontinenz-Systeme“.....	73	Spiegel.....	19		
Katheter IQ-Cath Einmalkatheter		Sportbeutel	56		
KIC-Kondome	21	Sterile Urin-Beinbeutel	43, 45, 51, 59, 61, 64		
KIC-Kupplung.....	21	Synthetik-Kondome – Anti-Allergen.....	30		

KUNDENBERATUNG

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unser Beratungsteam ist gerne für Sie da. In einem Gespräch lassen sich Ihre Fragen am besten beantworten, bei Problemen Lösungen finden oder die entsprechenden Kontakte herstellen.

Möchten Sie lieber von uns angerufen werden, dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular auf unserer Homepage: **www.manfred-sauer.com**

Um unseren Kundenservice noch besser zu machen, bieten wir nun auch die Kommunikation über den Messenger WhatsApp an.

Wir bemühen uns Ihre Fragen zu unseren Produkten und deren Handhabung schnellstmöglich zu beantworten und freuen uns, das neue Medium zu nutzen.

FRAGEN?
WIR HELFEN WEITER ...



+49 6226 960 100

Festnetz oder per WhatsApp



 **MANFRED SAUER**

Neurott 7 – 15 · 74931 Lobbach · Germany
Tel. +49 6226 960 100 · Fax +49 6226 960 010
info@manfred-sauer.de · www.manfred-sauer.com


Kontakt

Tel. +49 6226 960 100
Mo–Do 8.00 – 16.30 Uhr · Fr 8.00 – 15.00 Uhr


Für Endkunden

Bei Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihre Apotheke bzw. Ihr Sanitätshaus.

Der Standort

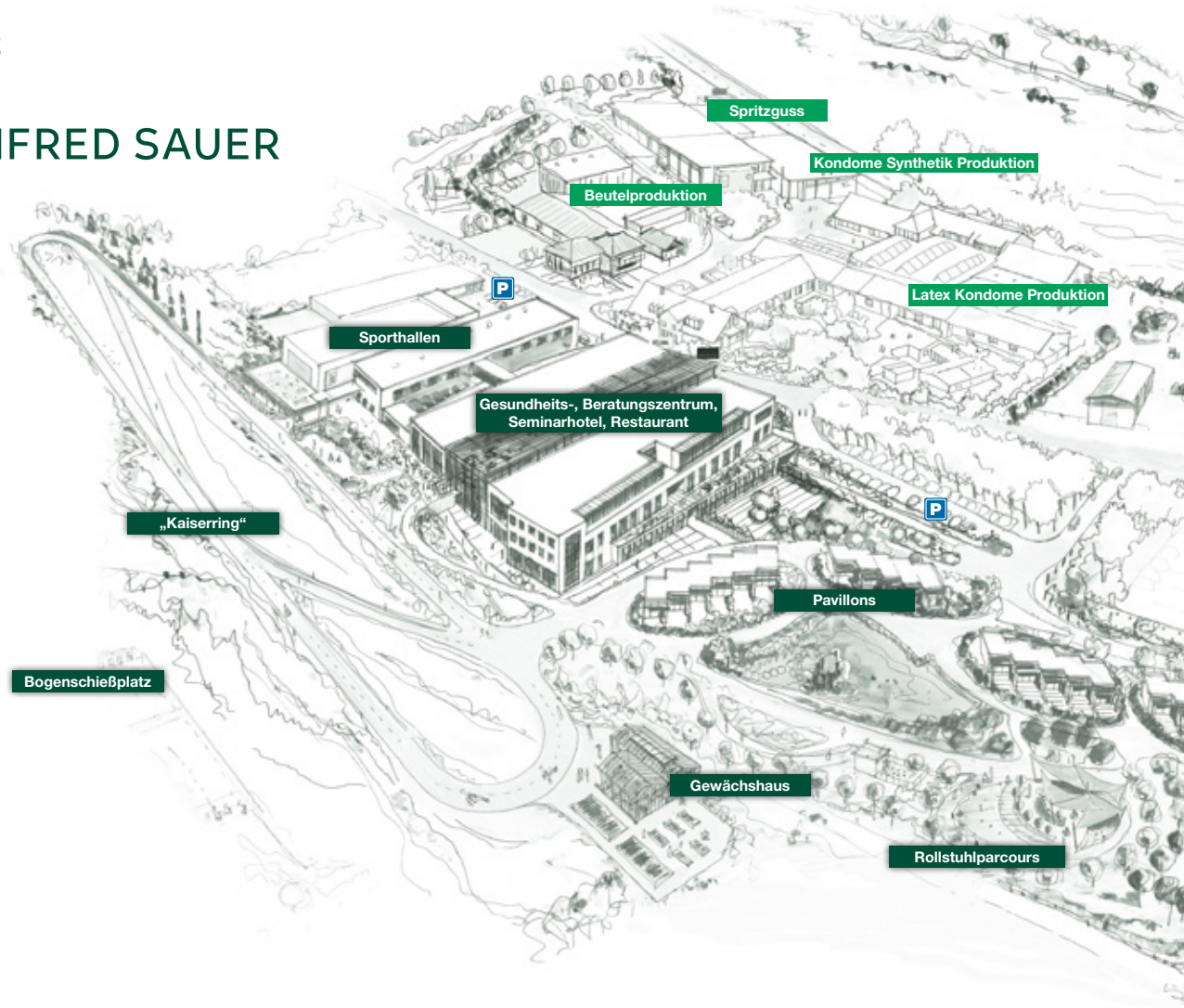

 **MANFRED SAUER GmbH**
MIT PRODUKTIONSABTEILUNGEN

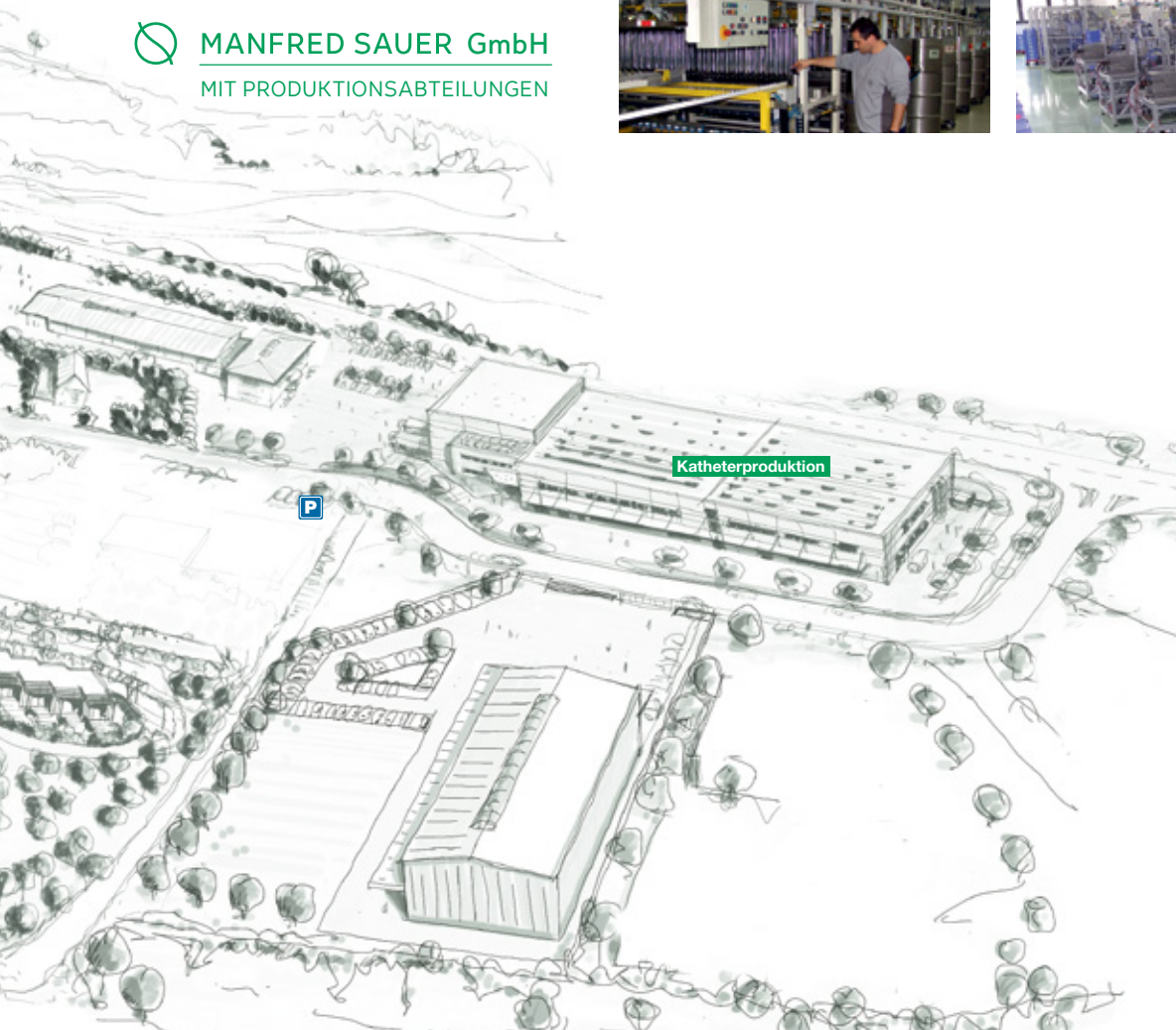

Seit 1982 befindet sich die MANFRED SAUER GmbH im Gewerbegebiet von Lobbach und ist dort kontinuierlich gewachsen. Hier werden die Kondom-Urine und die Einmalkatheter für den ISK entwickelt und produziert. Um den Standort zu sichern, wurde als Nachfolgeregelung der Produktionsbetrieb 2001 in die MANFRED-SAUER-STIFTUNG überführt.

Das Stiftungsgebäude wurde im Mai 2006 eröffnet. Nach dem Motto „Leistungsbereitschaft Querschnittgelähmter fördern“ sollen Betroffene unterstützt werden, ihr Leben trotz widriger Umstände neu zu strukturieren und wieder Eigenverantwortung zu übernehmen – als Grundlage für ein sinnerfülltes Leben.

Weitere Infos unter: www.manfred-sauer-stiftung.de und www.manfred-sauer.com



MANFRED SAUER

Neurott 7 – 15 · 74931 Lobbach · Germany
Tel. +49 6226 960 100 · Fax +49 6226 960 010
info@manfred-sauer.de · www.manfred-sauer.com

FRAGEN? **WIR HELFEN WEITER ...**



+49 6226 960 100

Festnetz oder per WhatsApp



info@manfred-sauer.de

Kontakt und Social Media



41DE 2026-02
REF 99.900

» MADE IN GERMANY – Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach