

SAUER-Comfort – das selbstklebende Urinal-Kondom

30 Kondome pro Packung, 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.




Hergestellt ohne Zugabe von Latex

SAUER-Comfort – Standard

11 Größen
18–40 mm

Gesamtlänge ca. 180 mm, Pufferzone 75 mm, Klebezone 50 mm, normaler Kleber

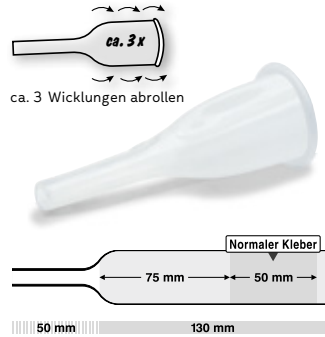


Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
18	97.18	00590668	
20	97.20	00590674	
22	97.22	00590680	
24	97.24	00590697	
26	97.26	00590705	
28	97.28	00590711	
30	97.30	00590728	
32	97.32	00590734	
35	97.35	00590740	
37	97.37	00590757	
40	97.40	00590763	

15.25.04.7002

SAUER-Comfort – Blau

9 Größen
22–40 mm

Gesamtlänge ca. 180 mm, Pufferzone 75 mm, Klebezone 50 mm, starker Kleber

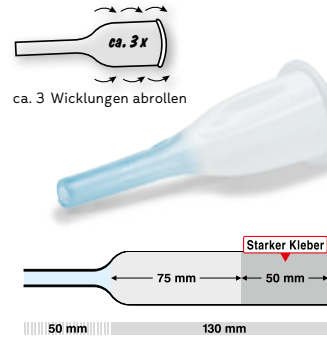


Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
22	97.7501.22	00464194	
24	97.7501.24	00464202	
26	97.7501.26	00464219	
28	97.7501.28	00464225	
30	97.7501.30	00464231	
32	97.7501.32	00464248	
35	97.7501.35	00464254	
37	97.7501.37	00464260	
40	97.7501.40	00464277	

15.25.04.7025

SAUER-Comfort – Grün

9 Größen
20–40 mm

Gesamtlänge ca. 165 mm, Pufferzone 60 mm, Klebezone 50 mm, normaler Kleber

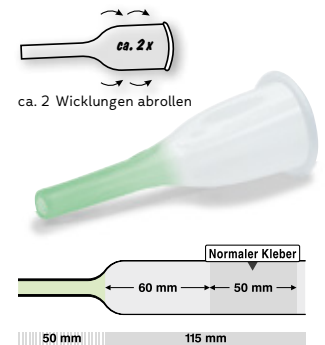


Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
20	97.6000.20	00464308	
24	97.6000.24	00464320	
26	97.6000.26	00464337	
28	97.6000.28	00464343	
30	97.6000.30	00464366	
32	97.6000.32	00464372	
35	97.6000.35	00464389	
37	97.6000.37	00464395	
40	97.6000.40	00464403	

15.25.04.7026

SAUER-Comfort – Rot

9 Größen
22–40 mm

Gesamtlänge ca. 165, Pufferzone 60 mm, Klebezone 50 mm, starker Kleber

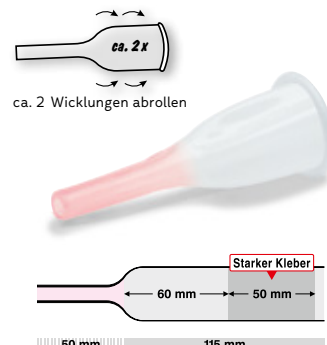


Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
22	97.6001.22	00464455	
24	97.6001.24	00464461	
26	97.6001.26	00464478	
28	97.6001.28	00464484	
30	97.6001.30	00464490	
32	97.6001.32	00464509	
35	97.6001.35	00464515	
37	97.6001.37	00464521	
40	97.6001.40	00464538	

15.25.04.7027

SAUER-Comfort – Violett

9 Größen
18–35 mm

Gesamtlänge ca. 125 mm, Pufferzone 45 mm, Klebezone 25 mm, starker Kleber

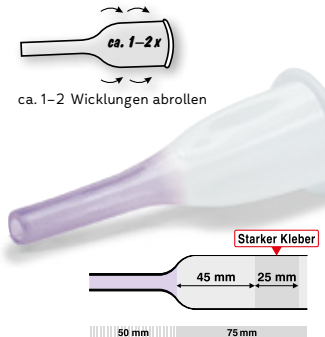

Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
18	97.4511.18	11054619	
20	97.4511.20	11054625	
22	97.4511.22	11054631	
24	97.4511.24	11054648	
26	97.4511.26	11054654	
28	97.4511.28	11054660	
30	97.4511.30	11054677	
32	97.4511.32	11054683	
35	97.4511.35	11054708	

15.25.04.7030

SCHLAUCHANSATZ


Je nach Ausführung unterschiedlich gefärbt.

PUFFERZONE

Gepudert, daher leicht milchiges Aussehen.

KLEBEZONE

Mit zwei verschieden starken Klebern.

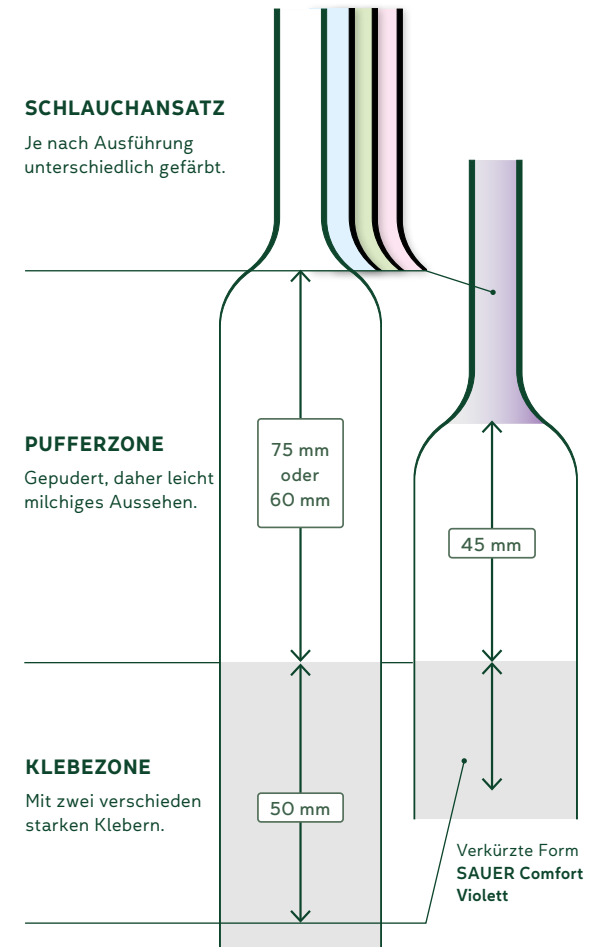


WELCHES IST DAS RICHTIGE?

Die Entscheidungshilfe auf der Rückseite hilft Ihnen Schritt für Schritt bei Ihrer Auswahl.



VOR DER ERSTEN ANWENDUNG

Um die Handhabung eines selbstklebenden Kondoms SAUER-Comfort kennenzulernen, können Sie einen sog. „Däumling“ anfordern (Durchmesser 22 oder 24 mm). Damit können Sie die einzelnen Schritte zum Anlegen des Kondoms am Daumen ausprobieren und herausfinden, wie Sie etwaige Hemmnisse beim Abrollen überwinden und Faltenbildung vermeiden, und Sie sehen, an welcher Stelle des Kondoms die Klebezone beginnt.

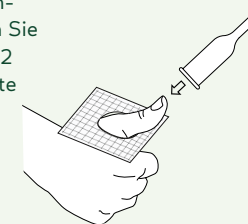


MASSBAND

Zur Ermittlung der exakten Kondomgröße. Es ist kostenlos erhältlich.



Auswahl eines selbstklebenden Urinal-Kondoms

zur Versorgung einer mittleren oder schweren Harninkontinenz

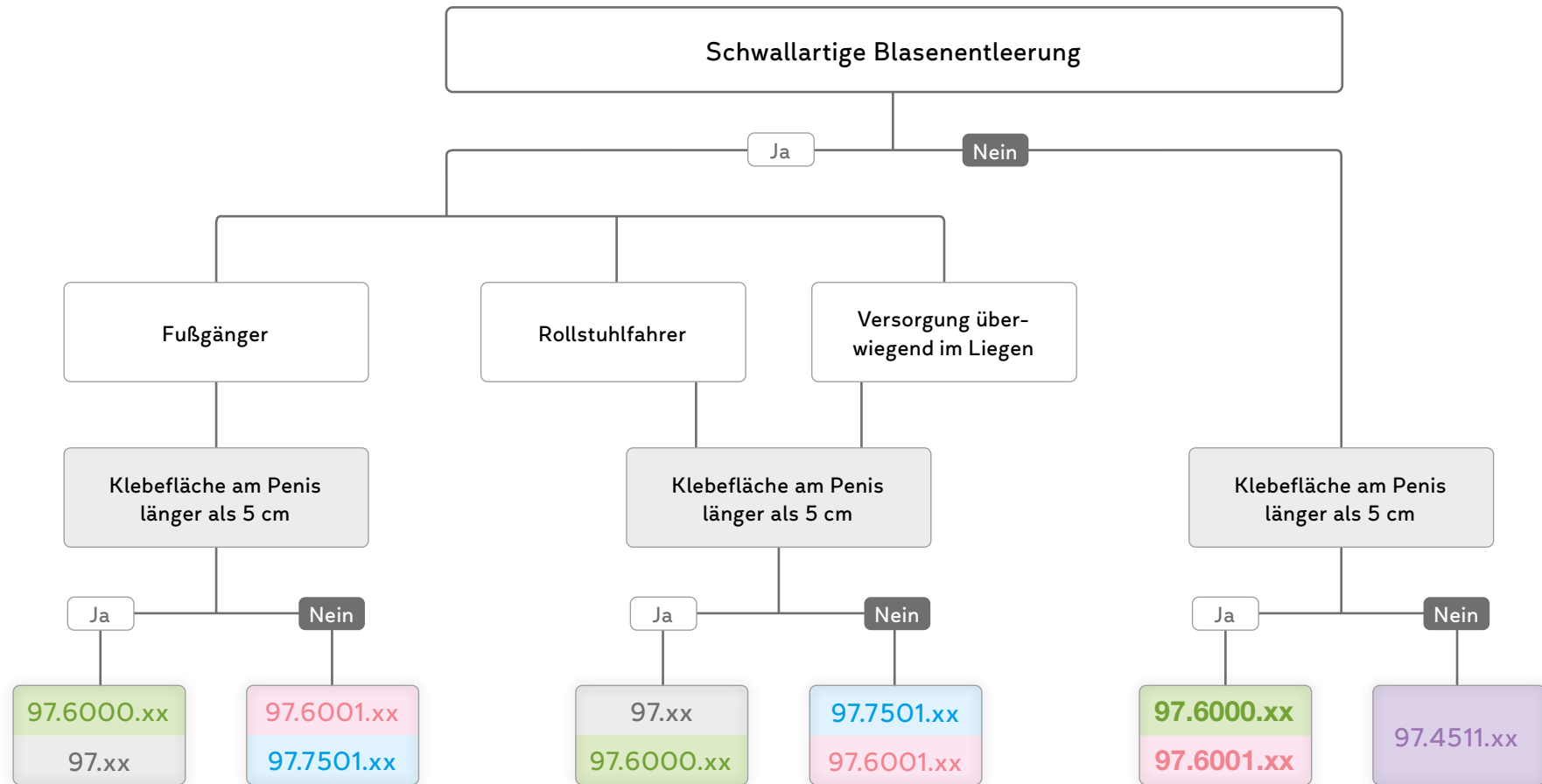

Wichtig!

Beratungstelefon: 06226 960 100

- Kondom in passender Größe verwenden (Größe mit dem Maßband ermitteln)
- die Haut sollte im Klebepbereich möglichst trocken und fettfrei sein
- Position des Kondoms so wählen, dass die Pufferzone die gewünschte Länge hat
- Kondom mit dem Urin-Auffangbeutel verbinden und darauf achten, dass der Urin ungehindert ablaufen kann

Wenn mit den getesteten Kondomen kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden konnte, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenberatung oder informieren sich in unserer „Schulungsmappe – Kondom-Urinal“, die wir Ihnen kostenlos zusenden oder die Sie sich von unserer Homepage herunterladen können.

SAUER-Comfort – Selbstklebendes Urinal-Kondom

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pufferzone	Klebezone	Kleber	Größen
97.xx	Standard	75 mm	50 mm	normal	11 (18–40 mm)
97.7501.xx	Blau	75 mm	50 mm	stark	9 (22–40 mm)
97.6000.xx	Grün	60 mm	50 mm	normal	9 (20–40 mm)
97.6001.xx	Rot	60 mm	50 mm	stark	9 (22–40 mm)
97.4511.xx	Violett	45 mm	25 mm	stark	9 (18–35 mm)

Bei der Best.-Nr. wird „xx“ durch die gewünschte Größe ersetzt (z. B. 97.7501.26)



MANFRED SAUER

Neurott 7 – 15 · 74931 Lobbach · Germany · Tel. +49 6226 960100 · Fax +49 6226 960010
info@manfred-sauer.de · www.manfred-sauer.com



DE 2022-06
REF 99.915